


OSTEO SAFE



AR—استخدام مبضع العظم OSTEOTOMES

AR - جهاز OSTEo SAFE طقم قطع العظم (مرجع: INKITOSTEOFULL)

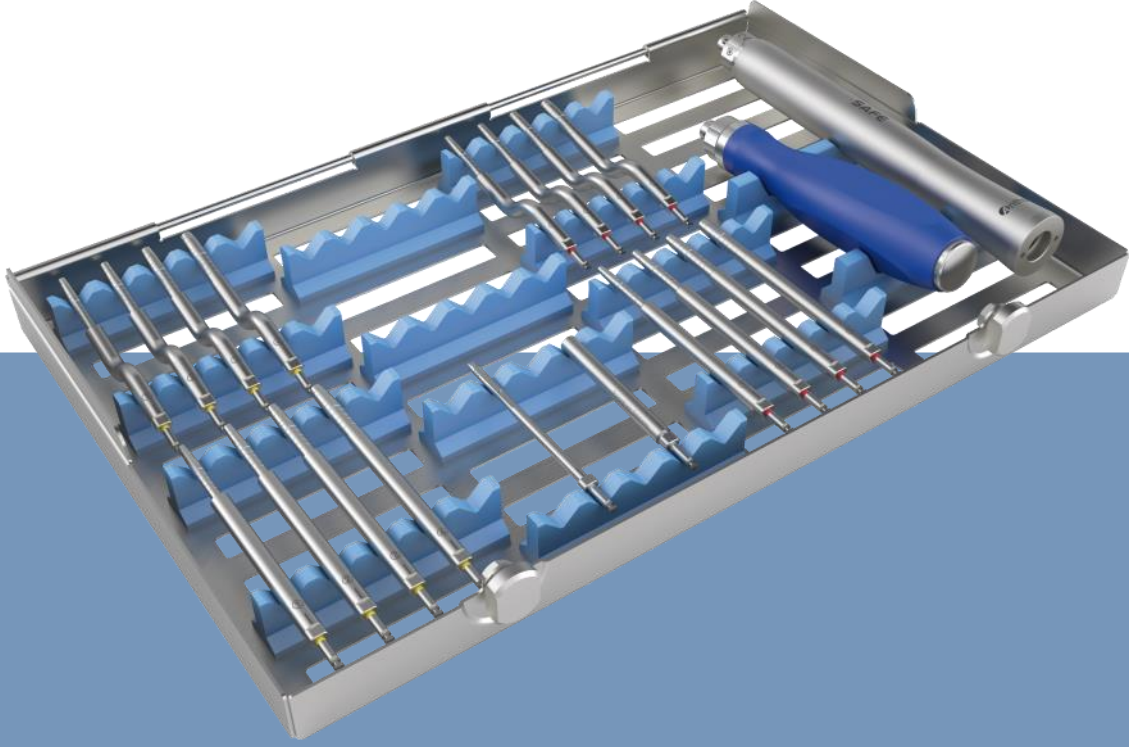

يحتوي الطقم على:

- ← 1 SAFE المسبار الآلي
- ← 1 طقم مكون من 4 مياضع مقعرة ومستقيمة للعظم
- ← 1 طقم مكون من 4 مياضع محدبة ومستقيمة للعظم
- ← 1 طقم مكون من 4 مياضع للعظم مقعرة وعلى شكل حربة ملتوية
- ← 1 طقم مكون من 4 مياضع للعظم محدبة وعلى شكل حربة ملتوية
- ← 1 أداة جراحية مستخدمة لجميع الأغراض
- ← 1 Axiom® REG/PX - عمود ملولب لغرسات الأسنان
- ← 1 امتداد للعمود بثلاثة فصوص بطول إضافي

التوضيح من الطقم بالكامل - مرجع: INKITOSTEOFULL. ينطبق بروتوكول وتعليمات الاستخدام أيضاً على مرجع INKITOSTEOCC و INKITOSTEOCX.

دواعي الاستعمال

المسبار الأصلي SAFE صالح للاستخدام في جراحات الأسنان، وعمليات شد الجيوب من خلال أسلوب كريستال "crestal approach"، وتكثيف الفك العلوي في حالة انخفاض كثافة العظام.

يستعمل هذا المسبار SAFE أيضاً للقيام بقلع الأسنان بفضل منتجاتنا إيكسو سايف (EXO SAFE) المعلومات متاحة على الموقع www.anthogyr.com

تعليمات الاستخدام

يستخدم المسبار الآلي SAFE لإحداث التأثيرات على الحدة والتردد الخاضعين للتحكم. عند استخدامه مع مبضع العظام، يمكن ممارسة تقنيات قطع العظم مثل "النقر" دون الحاجة إلى مطرقة. يتم التحكم بعدد التأثيرات الصغيرة من خلال تغيير سرعة المحرك.

يتوفر أيضاً مبضع العظم "Anthogyr" بالأنواع المقعرة والمحدبة بالطرز المستقيمة والتي تتخذ شكل حربة ملتوية.

يمكن استخدامهم في منطقة الفك العلوي الأمامية والخلفية في حالة انخفاض كثافة العظم.


يتم إدخاله في العظم عن طريق انخسار المسبار الآلي SAFE الذي يتصل مباشرة بالمحرك الصغير (اتصال من نوع ISO 3964 - ويتم ضبط الحد الأقصى لسرعة المحرك على 15,000 لفة في الدقيقة).

يمكن استخدام الأداة الجراحية المستخدمة لجميع الأغراض كخيار يدوي، مع مطرقة جراحية وملحقات طقم مبضع العظم المقدم، إذا لزم الأمر.

تسلسل مبضع العظم

OSTEOTOME N°	قُطر من ميل قمة مبضع العظم (بالمليمتر)	قُطر من الجزء الأسطواني بمبضع العظم - على علامة 18 مم (بالملي متر)	قُطر من الجزء المتوسط بمبضع العظم - على علامة 10 مم (بالملي متر)	قُطر جهاز AXIOM® REG/PX لغرس الأسنان (بالملي متر)
①	قُطر 2.00	قُطر 2.80	قُطر 2.45	قُطر 3.4
②	قُطر 2.50	قُطر 3.30	قُطر 2.80	قُطر 4.0
③	قُطر 3.00	قُطر 3.90	قُطر 3.50	قُطر 4.6
④	قُطر 3.50	قُطر 4.50	قُطر 4.10	قُطر 5.2

مواصفات الطول

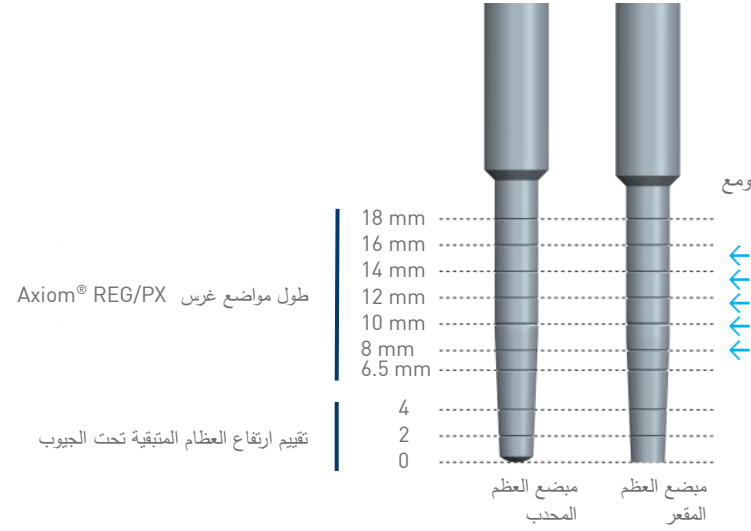

يتكون طقم كامل من مباضع العظم من 4 أدوات.

ذلك، يعتمد عدد مباضع الفم المطلوب لتحضير موضع الغرس على العوامل الطبية التالية:

- عرض نتوءات الفك العلوي
- ارتفاع العظام المتبقية تحت الجيوب
- سُمك العظام القشرية
- بنية العظام القشرية
- قُطر موضع الغرس

البروتوكول الجراحي

1- الثقب

الثقب الداخلي - قُطر 2.0 مللي متر
1500 لفة في الدقيقة

2 - الانخسار

لمحرك عند أقصى سرعة والتي تبلغ 15,000 لفة في الدقيقة.*
أو

مبضع العظم المحدب

مبضع العظم المقعر

3 - الحشو

يمكن إجراء حشو العظم وفقاً لتقنيات الطبيب.

4 - التثبيت الملولب

وضع الغرسة
25 لفة في الدقيقة

التنظيف - التطهير - التعقيم

التحضير للسحب

تسلم أجهزة DM غير معقمة. ومن الضروري تنظيفها وتطهيرها وتعقيمها قبل أول استخدام وبعد كل استخدام.

يدويًا

اغسل كل عنصر تحت الماء الجاري باستخدام فرشاة ناعمة.

• اغسل كل عنصر مع منظف مطهر (Neodisher Mediclean 5 mL/L) لمدة 3 دقائق على الأقل.

• اشطف لمدة دقيقة على الأقل تحت الماء المنقى من الشوائب

• جفف كل عنصر

أوتوماتيكيًا

• فقط في غسالة مع تطهير مناسب لمعالجة هذا النوع من **الأجهزة الطبية**. اتبع تعليمات الشركة المصنعة للجهاز

●دورة التطهير الحراري

الحرارة	المدة	نوع المنظف وتركيزه (عند الاحتساء)
الغسل الأولي	4 دقيقة	غير وارد
الغسل	5 دقيقة	Néodisher Mediclean Dental (2mL/L)
الغسل	3 دقيقة	Neodisher Z Dental (2mL/L)
الشطف	2 دقيقة	غير وارد
التطهير الحراري	10 دقيقة	غير وارد
التجفيف	10 دقيقة	غير وارد

تعقيم

- انتبه: بالنسبة للعاكس الآمن، يجب تشحيمه جيدًا قبل التعقيم (انظر دليل الجهاز الطبي).
- لا تعقم سوى الأدوات المنظفة، المشحمة (إذا كان ذلك ممكنا) والمختبرة (إذا كان ذلك ممكنا).
 - نوصي بشدة باستخدام جهاز التعقيم مع تحضير حالة ما قبل الفراغ (الفئة B).
 - ضع جميع الأجهزة الطبية في الكاسيت ثم ضع الكاسيت في كيس تعقيم وفقًا للمعايير المعمول بها ومتوافقًا مع المقاس
 - راعي المسافة بين الأكياس ولا تفرط في وضع الكثير منها في جهاز التعقيم.
 - يمكن تعقيم جميع الأجهزة الطبية وملحقاتها (باستثناء الملحقات التي تحمل شعار ⓘ للاستخدام الفردي) عند 132 درجة مئوية لمدة 3 دقائق (مدة إبقاء التعقيم).
 - وقت التجفيف 10 دقائق. تأكد من أن الجهاز جاف تمامًا في نهاية الدورة.

سرعة الموتور عند بدء (المحرك) / تكرار التأثيرات على نسبة الإخراج

التأثير / دقيقة	النسبة 1:1
20	لفة في الدقيقة
50	
100	
150	الحد

*يتم ضبط المحرك الصغير عند الحد الأقصى من السرعة المصرح بها 15000 لفة في الدقيقة بنسبة 1:1


مراجع التجديد

المرجع	الاسم	المرجع	الاسم	المرجع	الاسم
OSTECX34	مبضع العظم المحذب على شكل حرية ملتوية - قُطر 2.00 - قُطر 2.80	OSTSCX46	مبضع العظم المستقيم المحذب - قُطر 3.00 - قُطر 3.90	OSTSCC34	مبضع العظم المستقيم المقعر - قُطر 2.00 - قُطر 2.80
OSTECX40	مبضع العظم المحذب على شكل حرية ملتوية - قُطر 2.50 - قُطر 3.30	OSTSCX52	مبضع العظم المستقيم المحذب - قُطر 3.50 - قُطر 4.50	OSTSCC40	مبضع العظم المستقيم المقعر - قُطر 2.50 - قُطر 3.30
OSTECX46	مبضع العظم المحذب على شكل حرية ملتوية - قُطر 3.00 - قُطر 3.90	OSTECC34	مبضع العظم المقعر على شكل حرية ملتوية - قُطر 2.00 - قُطر 2.80	OSTSCC46	مبضع العظم المستقيم المقعر - قُطر 3.00 - قُطر 3.90
OSTECX52	مبضع العظم المحذب على شكل حرية ملتوية - قُطر 3.50 - قُطر 4.50	OSTECC40	مبضع العظم المقعر على شكل حرية ملتوية - قُطر 2.50 - قُطر 3.30	OSTSCC52	مبضع العظم المستقيم المقعر - قُطر 3.50 - قُطر 4.50
INEXMOST	امتداد عود مبضع العظم (*)	OSTECC46	مبضع العظم المقعر على شكل حرية ملتوية - قُطر 3.00 - قُطر 3.90	OSTSCX34	مبضع العظم المستقيم المحذب - قُطر 2.00 - قُطر 2.80
QPMVTOST	عود من النوع اللولبي بثلاثة قصوص (*)	OSTECC52	مبضع العظم المقعر على شكل حرية ملتوية - قُطر 3.50 - قُطر 4.50	OSTSCX40	مبضع العظم المستقيم المحذب - قُطر 2.50 - قُطر 3.30

(*) ملحقات لكذاء الجراحية المستخدمة لجميع الأغراض (مرجع INUSI)



CE 0459

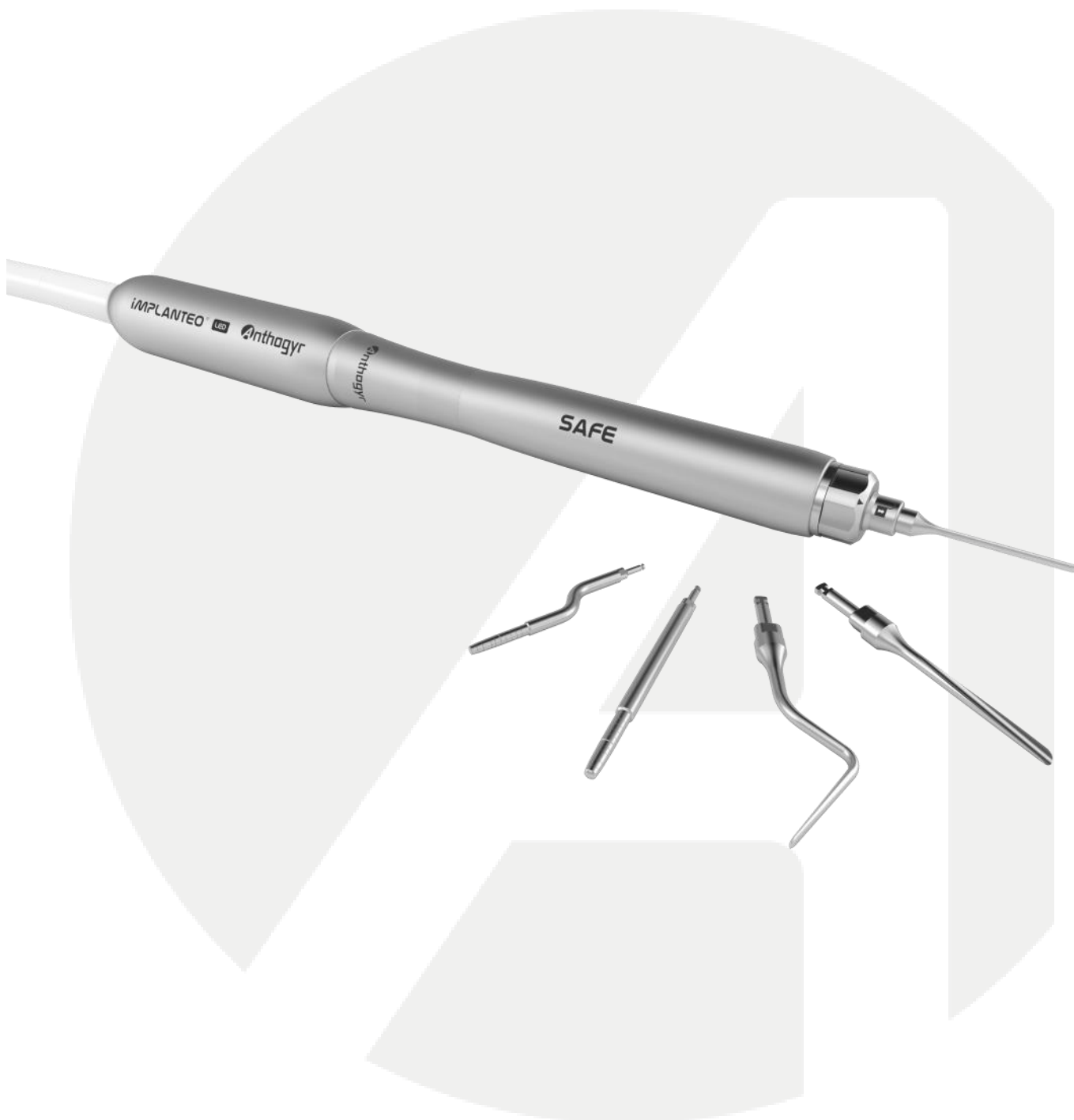

06305TEOTOMIE_NOT-2018-10

Crédits photos : Anthogyr - Tous droits réservés - Photos non contractuelles