

healfit[®] SH



HEALFIT[®] SH
BEDIENUNGSANLEITUNG

VIELEN DANK FÜR DAS VERTRAUEN, DAS SIE UNS MIT IHRER ENTSCHEIDUNG FÜR DIE AXIOM® IMPLANTATLÖSUNG ENTGEGENBRINGEN.

Dieses Dokument enthält Informationen für die Verwendung des Axiom® Produkts mit den für die Axiom® Bone Level und Axiom® Tissue Level Systeme spezifischen Versorgungsprotokollen sowie die Liste aller Komponenten.

Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Unser Vertriebsnetz und unser Expertenteam stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Anthogyr



Diese Bedienungsanleitung allein reicht nicht aus, um Anthogyr Medizinprodukte sicher zu verwenden. Bitte beachten Sie die produktspezifischen Gebrauchsanweisungen, die unter ifu.anthogyr.com zur Verfügung stehen.

Mit Erscheinen dieses Handbuchs werden alle früheren Ausgaben ungültig und durch dieses ersetzt.

ONLINE-GEBRAUCHSANWEISUNGEN IFU.ANTHOGR.COM

Sie finden unsere Anleitungen (Gebrauchsanweisungen und Handbücher) für Anthogyr Implantate und Prothetikkomponenten im PDF-Format auf unserer Website ifu.anthogyr.com. Sie können diese mit einem PDF-Reader (Adobe Acrobat Reader) anzeigen.



SO NUTZEN SIE UNSERE WEBSITE

In diesem Portal finden Sie die neuesten Bedienungsanleitungen für Anthogyr Produkte.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anleitungen für Ihr Produkt zu finden:

1- Wählen Sie Ihr Land

2- Geben Sie die Artikelnummer, die Beschreibung oder den UDI-DI-Code Ihres Produkts in das Suchfeld ein

3- Starten Sie die Suche durch Drücken der Eingabetaste

Die Anleitungen für das gesuchte Produkt stehen als PDF-Datei zur Verfügung, die Sie online einsehen und/oder ausdrucken können.

4- Sprachauswahl

Unsere Anleitungen stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung. Standardmäßig wird die Sprache angezeigt, die der Amtssprache im ausgewählten Land entspricht. Klicken Sie auf die bevorzugte Sprache im Sprachauswahlmenü, wenn Sie die Sprache ändern möchten.

AKTUALISIERUNGEN

Gebrauchsanweisungen werden regelmäßig aktualisiert und dann als „New“ gekennzeichnet. Sie können sich auf die Patientensicherheit auswirken.

Greifen Sie deshalb nicht auf vorhandene lokale Kopien zurück, sondern lesen Sie immer die Anleitungen im Anthogyr Portal.

Wenn Sie archivierte Anleitungen einsehen möchten, klicken Sie auf den Link „Siehe ältere Dokumentversionen [View old document versions]“.

Sie können Bedienungsanleitungen auch kostenfrei als Hardcopy erhalten.

Füllen Sie dazu bitte das Formular unter „Contact“ aus oder schicken Sie uns eine Anfrage mit Ihrer nächsten Bestellung.

Denken Sie an die Angabe der gewünschten Sprache.

Innerhalb von 7 Kalendertagen schicken wir Ihnen das Dokument zu.

Wir stehen für Hinweise und Vorschläge unter „Contact“ zu Ihrer Verfügung.

INHALTSVERZEICHNIS

Produktlinie Healfit® SH	6
1. Vorstellung	6
A. ÜBERBLICK ÜBER DIE PRODUKTLINIE	6
B. KODIERUNG	6
C. FARBKODIERUNG FÜR PROTHETIKKOMPONENTEN	7
D. IDENTIFIKATION DER HEALFIT® SH	7
2. Implantatverbindungen	8
A. AXIOM® BL	8
B. AXIOM® TL	9
Wahl der Healfit® SH	10
1. Empfohlene anatomische Form in Abhängigkeit von der Zahnposition	10
2. Healfit® SH Abmessungen	11
3. Erforderliche Healfit® SH Höhe	12
4. Kompatibilität	13
A. KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN HEALFIT® SH BL UND FLEXIBASE® BL FÜR EINZELZAHNVERSORGUNGEN	13
B. KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN HEALFIT® SH BL UND X-BASE® BL FÜR EINZELZAHNVERSORGUNGEN	14
C. KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN HEALFIT® SH TL UND FLEXIBASE® ODER X-BASE® TL FÜR EINZELZAHNVERSORGUNGEN	14
5. Planung	15
A. MIT EINER IMPLANTATPLANUNGSSOFTWARE	15
B. MIT DEM HEALFIT® SH HÖHENMESSER	16
Verwendung der Healfit® SH BL	18
1. Wahl der Healfit® SH BL	18
2. Platzierung der Healfit® SH BL auf dem Implantat	18
3. Abformung	19
4. Entfernung der Healfit® SH BL aus dem Implantat	20
Verwendung der Healfit® SH TL	21
1. Wahl der Healfit® SH TL	21
2. Platzierung der Healfit® SH TL auf dem Implantat	21
3. Abformung	22
4. Entfernung der Healfit® SH TL aus dem Implantat	22
Gestaltung und Herstellung der Einzelzahnversorgung	22
Healfit® SH Bibliotheken	23
1. Installation von CAD-Bibliotheken	23
A. EXOCAD	23
B. 3SHAPE	25
C. DENTAL WINGS / CARES	27

2. Struktur von CAD-Bibliotheken	27
A. EXOCAD	27
B. 3SHAPE	31
C. DENTAL WINGS / CARES	34
3. Kopieren des Gingivaprofils	37
A. EXOCAD	37
B. 3SHAPE	48
C. DENTAL WINGS / CARES	52

ARTIKELNUMMERN DER KOMPONENTEN	59
---------------------------------------	-----------

PRODUKTLINIE HEALFIT® SH

1. Vorstellung


A. ÜBERBLICK ÜBER DIE PRODUKTLINIE

Einheilung, Ausformung, Abformung – alles mit einer einzigen, schlüsselfertigen Lösung.

Zur Produktlinie Healfit® SH gehören 34 scanbare, anatomisch geformte Einheitschrauben für Einzelzahnversorgungen auf Axiom® Bone Level und Axiom® Tissue Level Implantaten.

Die 5 anatomischen Healfit® SH Formen, denen Hunderte untersuchte Zahnprofile zugrunde liegen, gewährleisten eine dem natürlichen Zahn entsprechende Einheilung und schonen das Knochen- und Weichgewebenvolumen. Daher sind sie für Sofortversorgungsprotokolle ideal geeignet.


Dank einer offenen Softwarelösung, die in den gängigsten CAD/CAM-Programmen zur Verfügung steht, bietet Healfit® SH die Flexibilität einer herkömmlichen oder digitalen Abformung mit einem Prothetik-Workflow, der sowohl im Labor als auch im zentralen Fräszentrum von Anthogyr durchgeführt werden kann.

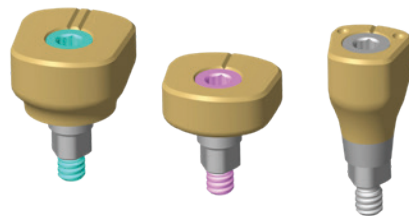


Healfit® SH TL R Healfit® SH TL N Healfit® SH BL

B. KODIERUNG

ZUSAMMENSETZUNG DER HEALFIT® SH BL ARTIKELNUMMERN


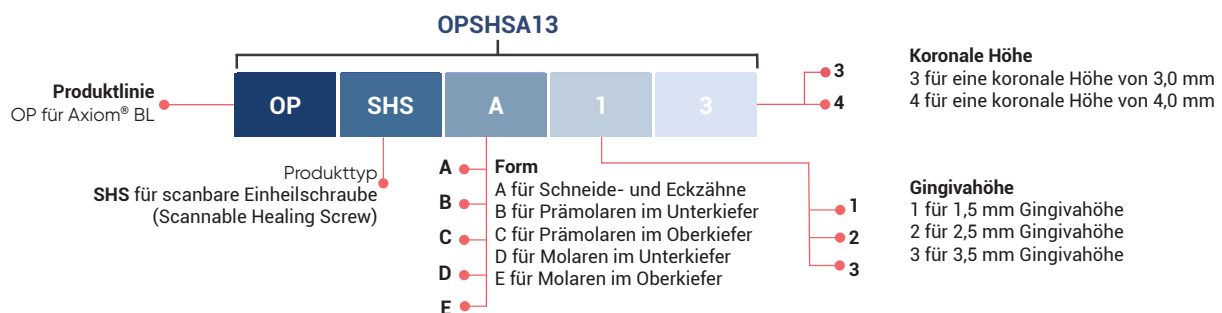


ZUSAMMENSETZUNG DER HEALFIT® SH TL ARTIKELNUMMERN

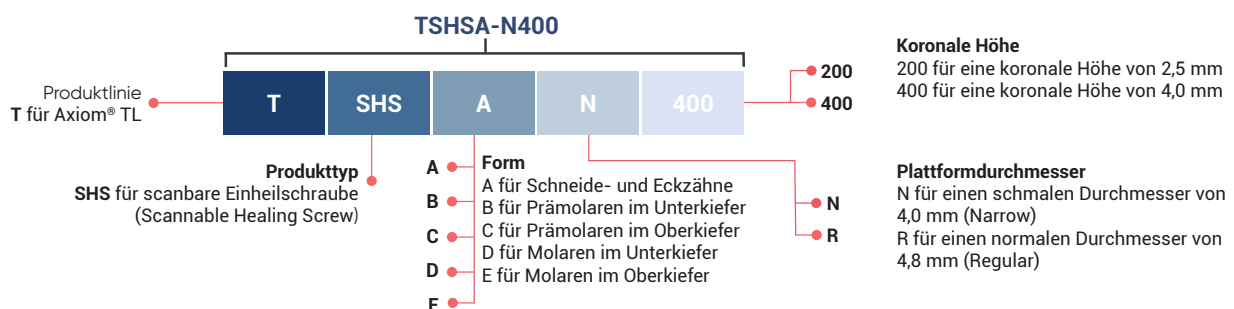

C. FARBKODIERUNG FÜR PROTHETIKKOMPONENTEN

Überprüfen Sie vor dem Öffnen der Verpackung immer die Angaben zur jeweiligen Prothetikkomponente.
Zur einfachen Identifikation der Produktlinie wurden dem auf dem Etikett dargestellten Piktogramm Farbcodes hinzugefügt.
Diese Farbcodes entsprechen denen, die für die Identifikation der Implantate verwendet werden.

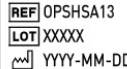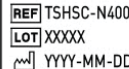Healfit® SH Musteretikett für Axiom® BL Implantate			Healfit® SH Musteretikett für Axiom® TL Implantate		
 REF OPSHSA13 LOT XXXXX Axiom BL	 REF OPSHSA13 LOT XXXXX Axiom BL	 REF OPSHSA13 LOT XXXXX Axiom BL	 REF TSHSC-N400 LOT XXXXX Axiom TL	 REF TSHSC-N400 LOT XXXXX Axiom TL	 REF TSHSC-N400 LOT XXXXX Axiom TL
 REF OPSHSA13 LOT XXXXX Axiom BL YYYY-MM-DD STERILE R Rx only 0459 de HEALFIT SH BL A GH1.5 KH3.0 it HEALFIT SH BL A AG1.5 AC3.0 es HEALFIT SH BL A AG1.5 AC3.0 pt HEALFIT SH BL A AG1.5 AC3.0 (01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(17)YYMMDD(10)XXXXXX en HEALFIT SH BL A GH1.5 CH3.0 fr HEALFIT SH BL A HG1.5 HC3.0			 REF TSHSC-N400 LOT XXXXX Axiom TL YYYY-MM-DD STERILE R Rx only 0459 de HEALFIT SH TL N C KH4.0 it HEALFIT SH TL N C AC4.0 es HEALFIT SH TL N C AC4.0 pt HEALFIT SH TL N C AC4.0 (01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(17)YYMMDD(10)XXXXXX en HEALFIT SH TL N C CH4.0 fr HEALFIT SH TL N C HC4.0		


Alle Prothetikkomponenten sind mit ablösaren, repositionierbaren Etiketten zur Rückverfolgung versehen, die in die Patientenakte geklebt werden müssen. Sie müssen in der Patientenakte aufbewahrt werden.

D. IDENTIFIKATION DER HEALFIT® SH

Zur Identifikation der verschiedenen Healfit® SH wurden die Produkte mit visuellen Indikatoren versehen.

HEALFIT® SH BL INDIKATOREN

Rillen = KH-Indikator
Müssen nach vestibulär ausgerichtet werden

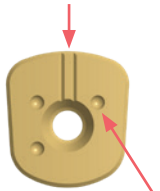

Punkte = GH-Indikator




Rillen = Indikator für die Schraubenlänge entsprechend der Gingivahöhe und der koronalen Höhe der Healfit® SH
1 für Gingivahöhe 1,5 + koronale Höhe 3
2 für Gingivahöhe 2,5 + koronale Höhe 3
3 für Gingivahöhe 3,5 + koronale Höhe 3
4 für Gingivahöhe 3,5 + koronale Höhe 4

Schraubenfarbe = Indikator für den Implantattyp
Grau für Axiom® BL

HEALFIT® SH TL INDIKATOREN

Rillen = KH-Indikator
Müssen nach vestibulär ausgerichtet werden

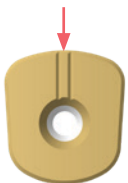

Rillen = Indikator für die Schraubenlänge entsprechend der koronalen Höhe der Healfit® SH

Schraubenfarbe = Indikator für den Implantattyp
Rosa für Axiom® TL Plattform N
Blau für Axiom® TL Plattform R

DARSTELLUNG DER GESAMTEN PRODUKTLINIE

		FORM						
		GH	KH	A	B	C	D	E
HEALFIT® SH BL	1,5	3,0						
	2,5	3,0						
	3,5	3,0						
	3,5	4,0						
		Platt-form	KH	A	B	C	D	E
HEALFIT® SH TL	N – 4,0	2,5						
	N – 4,0	4,0						
	R – 4,8	2,5						
	R – 4,8	4,0						


2. Implantatverbindungen

A. AXIOM® BL

Dank der Prothetikverbindung mit einem einzigen Durchmesser von 2,7 mm ist die Produktlinie Healfit® SH BL mit allen Axiom® BL Implantaten kompatibel, ungeachtet des gewählten Implantatdurchmessers, der gewählten Implantatlänge und des gewählten Implantatprofils (REG, PX, X3).




- Prothetik-Durchmesser 2,7 mm
- Erweiterte, indexierte, trilobuläre Schraubkonusverbindung
- Gewinde M1.6

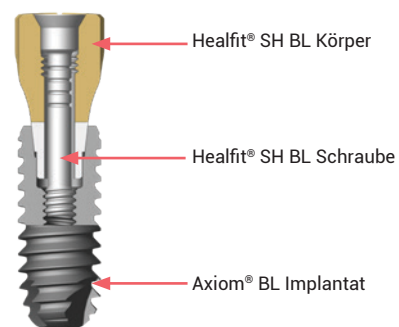

B. AXIOM® TL


Axiom® TL Implantate haben zwei Verbindungen, die unabhängig vom gewählten Implantatdurchmesser, von der gewählten Implantatlänge und vom gewählten Implantatprofil (REG, PX, X3) gleich sind. Die Produktlinie Healfit® SH TL ist mit allen Axiom® TL Implantaten kompatibel, die die nachstehend beschriebene indexierte Verbindung M1.6 verwenden:

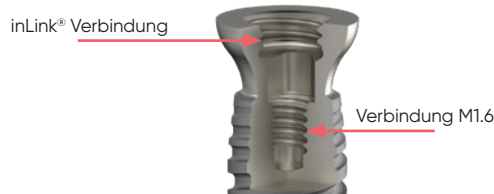

INLINK® VERBINDUNG:





- Für verschraubte festsitzende Full-Arch-Versorgungen
- Zwei Plattformdurchmesser: (N: Ø4,0 und R: Ø4,8)
- Mindesthöhe der prothetischen Versorgung: 4,2 mm
- Mindestbreite der prothetischen Versorgung: 4,2 x 5,2 mm
- Nicht indexierte, ebene Verbindung
- Fixierung durch Verriegelung (Halteschraube + Ring)
- Gewinde M2.8

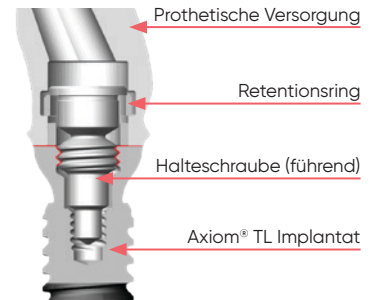

INDEXIERTE VERBINDUNG M1.6:




- Für verschraubte Einzelzahn- und mehrgliedrige Versorgungen
- 2 Plattformdurchmesser: (N: Ø4,0 und R: Ø4,8)
- Indexierte, trilobuläre Verbindung
- Fixierung durch Verschrauben (Schraube)
- Gewinde M1.6

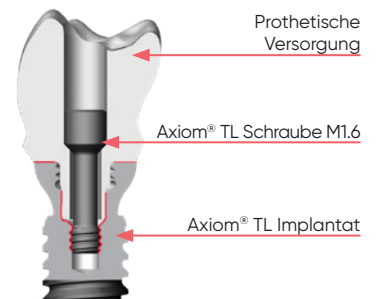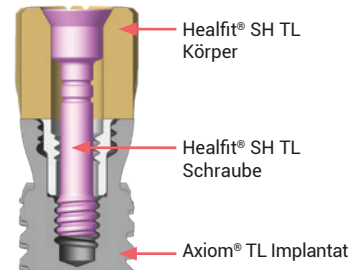

EBENE INNENVERBINDUNG M1.6:



- Für mehrgliedrige verschraubte Versorgungen oder herausnehmbare Deckprothesen
- 2 Plattformdurchmesser: (N: Ø4,0 und R: Ø4,8).
- Nicht indexierte, ebene Verbindung
- Fixierung durch Verschrauben (Schraube)
- Gewinde M1.6

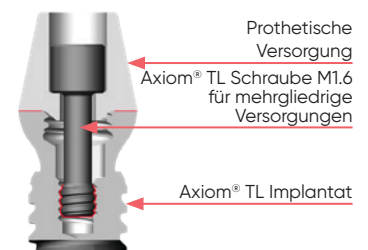

WAHL DER HEALFIT® SH

1. Empfohlene anatomische Form in Abhängigkeit von der Zahnposition

Healfit® SH ist in verschiedenen anatomischen Formen erhältlich, die eine der natürlichen Zahnform nahekommende Ausformung des Weichgewebes ermöglichen. Wie in der nachstehenden Abbildung beschrieben, empfiehlt Anthogyr folgende Optionen:

Form A für:


- Schneidezähne im Ober- und Unterkiefer
- Eckzähne im Ober- und Unterkiefer

Form B für Prämolaren im Unterkiefer

Form C für Prämolaren im Oberkiefer


Form D für Molaren im Unterkiefer

Form E für Molaren im Oberkiefer

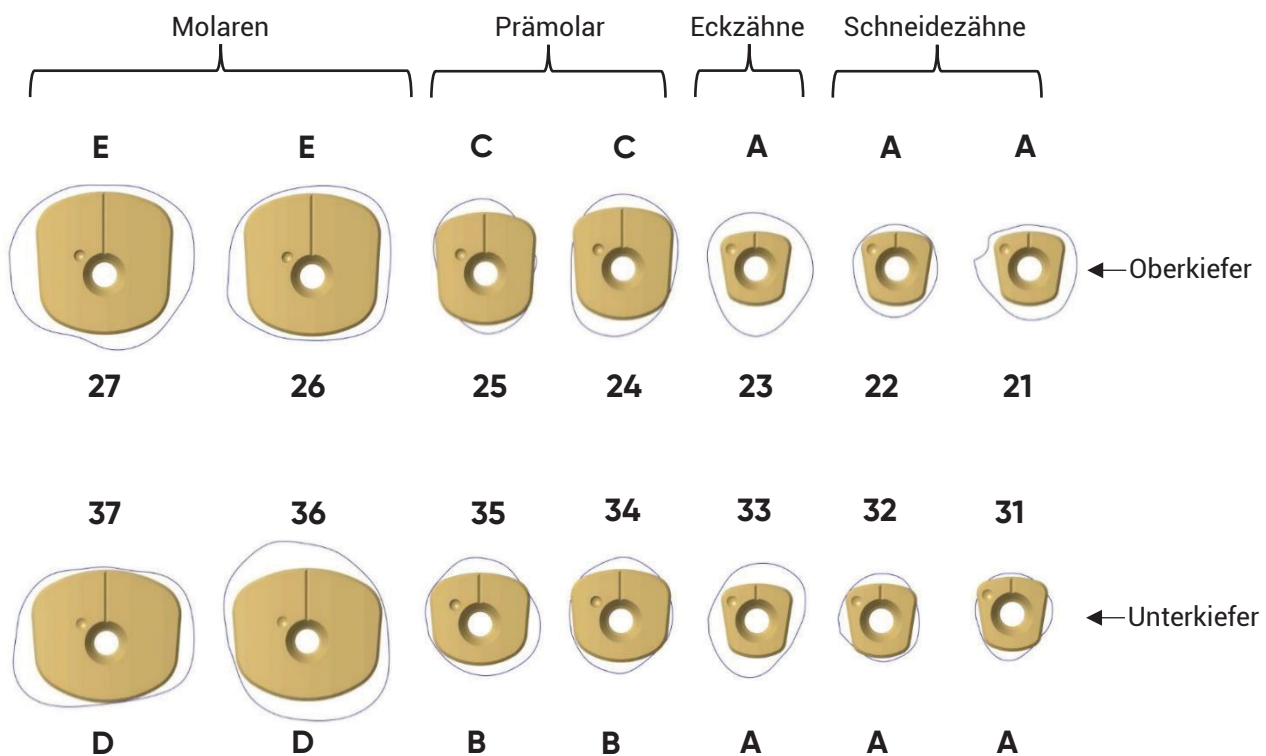


2. Healfit® SH Abmessungen

HEALFIT® SH BL:

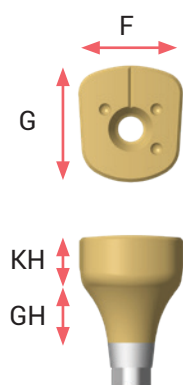

Form	F	G	GH	KH	Healfit® SH Artikelnummer
A	4,5	4,5	1,5	3,0	OPSHSA13
	4,5	4,5	2,5	3,0	OPSHSA23
	4,5	4,5	3,5	3,0	OPSHSA33
	4,5	4,5	3,5	4,0	OPSHSA34
B	6,2	5,6	1,5	3,0	OPSHSB13
	6,2	5,6	2,5	3,0	OPSHSB23
	6,2	5,6	3,5	3,0	OPSHSB33
	6,2	5,6	3,5	4,0	OPSHSB34
C	6,2	6,8	1,5	3,0	OPSHSC13
	6,2	6,8	2,5	3,0	OPSHSC23
	6,2	6,8	3,5	3,0	OPSHSC33
	6,2	6,8	3,5	4,0	OPSHSC34
D	9,2	8,0	1,5	3,0	OPSHSD13
	9,2	8,0	2,5	3,0	OPSHSD23
	9,2	8,0	3,5	3,0	OPSHSD33
	9,2	8,0	3,5	4,0	OPSHSD34
E	8,4	8,6	1,5	3,0	OPSHSE13
	8,4	8,6	2,5	3,0	OPSHSE23
	8,4	8,6	3,5	3,0	OPSHSE33
	8,4	8,6	3,5	4,0	OPSHSE34



HEALFIT® SH TL:

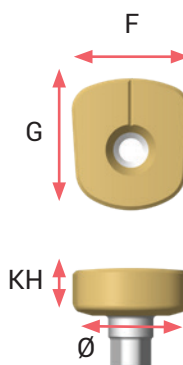


Form	F	G	Plattform-Ø	KH	Healfit® SH Artikelnummer
A	4,5	4,5	N	2,5	TSHSA-N200
	4,5	4,5	N	4,0	TSHSA-N400
B	6,2	5,6	N	2,5	TSHSB-N200
	6,2	5,6	N	4,0	TSHSB-N400
	6,2	5,6	R	2,5	TSHSB-R200
	6,2	5,6	R	4,0	TSHSB-R400
C	6,2	6,8	N	2,5	TSHSC-N200
	6,2	6,8	N	4,0	TSHSC-N400
	6,2	6,8	R	2,5	TSHSC-R200
	6,2	6,8	R	4,0	TSHSC-R400
D	9,2	8,0	R	2,5	TSHSD-R200
	9,2	8,0	R	4,0	TSHSD-R400
E	8,4	8,6	R	2,5	TSHSE-R200
	8,4	8,6	R	4,0	TSHSE-R400

3. Erforderliche Healfit® SH Höhe

Um bei der Abformung oder beim Scannen eine gute Qualität und Präzision zu erreichen, muss die Healfit® SH 1,5 mm über dem Weichgewebe platziert werden.

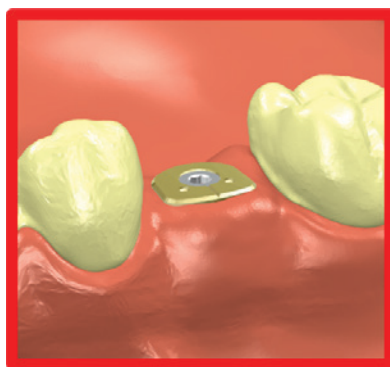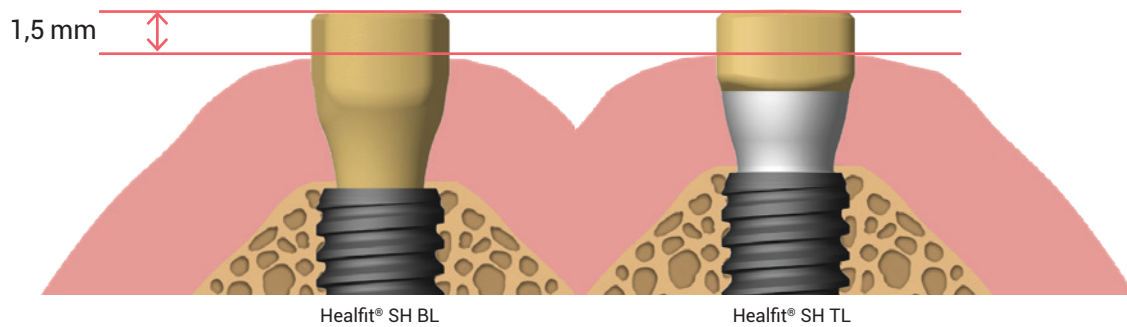

Zu tief platzierte Healfit SH

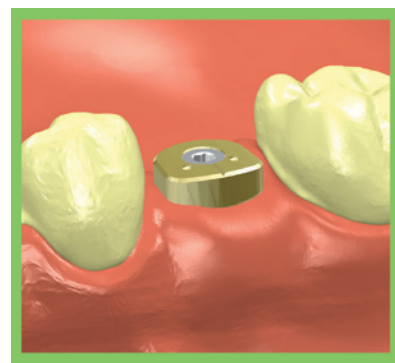

Richtig platzierte Healfit SH
(Überstand von 1,5 mm)

4. Kompatibilität

A. KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN HEALFIT® SH BL UND FLEXIBASE® BL FÜR EINZELZAHNVERSORGUNGEN

Für ein kontinuierliches Emergenzprofil zwischen der Healfit® SH BL und der Flexibase® BL empfiehlt Anthogyr, die Flexibase® BL wie folgt auszuwählen:

				Flexibase® BL					
				Ø4,0			Ø5,0		
				GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5
				KH 3,5	KH 3,5	KH 3,5	KH 3,5	KH 3,5	KH 3,5
				OPFLEX413	OPFLEX423	OPFLEX433	OPFLEX513	OPFLEX523	OPFLEX533
Healfit® SH BL	Form A 	GH 1,5 KH 3	OPSHSA13	✓					
		GH 2,5 KH 3	OPSHSA23		✓				
		GH 3,5 KH 3	OPSHSA33			✓			
		GH 3,5 KH 4	OPSHSA34			✓			
	Form B 	GH 1,5 KH 3	OPSHSB13				✓		
		GH 2,5 KH 3	OPSHSB23					✓	
		GH 3,5 KH 3	OPSHSB33						✓
		GH 3,5 KH 4	OPSHSB34						✓
	Form C 	GH 1,5 KH 3	OPSHSC13				✓		
		GH 2,5 KH 3	OPSHSC23					✓	
		GH 3,5 KH 3	OPSHSC33						✓
		GH 3,5 KH 4	OPSHSC34						✓
	Form D 	GH 1,5 KH 3	OPSHSD13						
		GH 2,5 KH 3	OPSHSD23						
		GH 3,5 KH 3	OPSHSD33						
		GH 3,5 KH 4	OPSHSD34						
	Form E 	GH 1,5 KH 3	OPSHSE13						
		GH 2,5 KH 3	OPSHSE23						
		GH 3,5 KH 3	OPSHSE33						
		GH 3,5 KH 4	OPSHSE34						

B. KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN HEALFIT® SH BL UND X-BASE® BL FÜR EINZELZAHNVERSORGUNGEN

Für ein kontinuierliches Emergenzprofil zwischen der Healfit® SH BL und der X-Base® BL empfiehlt Anthogyr, die X-Base® BL wie folgt auszuwählen:

				X-Base® BL mit geradem oder abgewinkeltem Schraubenzugang									
				Ø4,0			Ø5,0			Ø6,0			
				GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	
				KH 4 KH 6 KH 4 AA KH 6 AA KH 6 AA U	OPFLEX414 OPFLEX416 OPFLEX414-AA OPFLEX414-AAU OPFLEX416-AA OPFLEX416-AAU	OPFLEX424 OPFLEX426 OPFLEX424-AA OPFLEX424-AAU OPFLEX426-AA OPFLEX426-AAU	OPFLEX434 OPFLEX436 OPFLEX434-AA OPFLEX434-AAU OPFLEX436-AA OPFLEX436-AAU	OPFLEX514 OPFLEX516 OPFLEX514-AA OPFLEX514-AAU OPFLEX516-AA OPFLEX516-AAU	OPFLEX524 OPFLEX526 OPFLEX524-AA OPFLEX524-AAU OPFLEX526-AA OPFLEX526-AAU	OPFLEX534 OPFLEX536 OPFLEX534-AA OPFLEX534-AAU OPFLEX536-AA OPFLEX536-AAU	OPFLEX614 OPFLEX616 OPFLEX614-AA OPFLEX614-AAU OPFLEX616-AA OPFLEX616-AAU	OPFLEX624 OPFLEX626 OPFLEX624-AA OPFLEX624-AAU OPFLEX626-AA OPFLEX626-AAU	OPFLEX634 OPFLEX636 OPFLEX634-AA OPFLEX634-AAU OPFLEX636-AA OPFLEX636-AAU
Healfit® SH BL		Form A	GH 1,5 KH 3	OPSHSA13	✓								
		GH 2,5 KH 3	OPSHSA23		✓								
		GH 3,5 KH 3	OPSHSA33			✓							
		GH 3,5 KH 4	OPSHSA34			✓							
		Form B	GH 1,5 KH 3	OPSHSB13				✓					
		GH 2,5 KH 3	OPSHSB23					✓					
		GH 3,5 KH 3	OPSHSB33						✓				
		GH 3,5 KH 4	OPSHSB34						✓				
		Form C	GH 1,5 KH 3	OPSHSC13				✓					
		GH 2,5 KH 3	OPSHSC23					✓					
		GH 3,5 KH 3	OPSHSC33						✓				
		GH 3,5 KH 4	OPSHSC34						✓				
		Form D	GH 1,5 KH 3	OPSHSD13							✓		
		GH 2,5 KH 3	OPSHSD23									✓	
		GH 3,5 KH 3	OPSHSD33										✓
		GH 3,5 KH 4	OPSHSD34										✓
		Form E	GH 1,5 KH 3	OPSHSE13							✓		
		GH 2,5 KH 3	OPSHSE23									✓	
		GH 3,5 KH 3	OPSHSE33										✓
		GH 3,5 KH 4	OPSHSE34										✓

AA = Abgewinkelter Schraubenzugang

AAU = Abgewinkelter Schraubenzugang, U-Ausführung

C. KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN HEALFIT® SH TL UND FLEXIBASE® ODER X-BASE® TL FÜR EINZELZAHNVERSORGUNGEN

				Flexibase® TL Plattform N	X-Base® Plattform N					
				KH 3,5	KH 4,0			KH 6,0		
				IN	IN	IN AA	IN AA U	IN	IN AA	IN AA U
				TFLEX-N	TFLEX-N4-S	TFLEX-N4-SAA	TFLEX-N4-SAAU	TFLEX-N6-S	TFLEX-N6-SAA	TFLEX-N6-SAAU
Healfit® SH TL Plattform N	Form A	KH 2,5	TSHSA-N200	✓						
		KH 4	TSHSA-N400							
	Form B	KH 2,5	TSHSB-N200							
		KH 4	TSHSB-N400							
	Form C	KH 2,5	TSHSC-N200							
		KH 4	TSHSC-N400							

				Flexibase® TL Plattform R	X-Base® TL Plattform R					
				KH 3,5	KH 4,0			KH 6,0		
				IN	IN	IN AA	IN AA U	IN	IN AA	IN AA U
				TFLEX-R	TFLEX-R4-S	TFLEX-R4-SAA	TFLEX-R4-SAAU	TFLEX-R6-S	TFLEX-R6-SAA	TFLEX-R6-SAAU
Healfit® SH TL Plattform R	Form B	KH 2,5	TSHSB-R200							
		KH 4	TSHSB-R400							
	Form C	KH 2,5	TSHSC-R200							
		KH 4	TSHSC-R400							
	Form D	KH 2,5	TSHSD-R200							
		KH 4	TSHSD-R400							
	Form E	KH 2,5	TSHSE-R200							
		KH 4	TSHSE-R400							

IN = Indexiert

AA = Abgewinkelter Schraubenzugang

Hinweis: Healfit® SH TL Einheitschrauben sind nicht mit Titanbasen TL für mehrgliedrige Versorgungen kompatibel.

5. Planung

Für die Wahl der am besten geeigneten Healfit® SH ist es wichtig, eine präoperative Untersuchung durchzuführen und einen Behandlungsplan zu erstellen, der die individuelle anatomische Situation und die daraus resultierenden Einschränkungen berücksichtigt.

A. MIT EINER IMPLANTATPLANUNGS SOFTWARE

BEISPIEL FÜR KOMPATIBLE SOFTWARE

Healfit® SH stehen in den gängigsten Planungssoftwares zur Verfügung, sodass Sie die für den klinischen Fall am besten geeignete Form und Höhe der Healfit® SH auswählen können.



.Implant-
Planner



B. MIT DEM HEALFIT® SH HÖHENMESSER

Nach der Implantatinserterion kann die für den klinischen Fall am besten geeignete Höhe der Healfit® SH mithilfe der Healfit® Messlehre ausgewählt werden.

Merkmale:

- Wird unsteril geliefert
- Wiederverwendbar
- Höhenmesser für Healfit® SH BL und Healfit® SH TL





FUNKTIONSPRINZIP:





ANWENDUNGSPROTOKOLL:

→ Setzen Sie die BL-Seite des Höhenmessers in das Axiom® BL Implantat bzw. die TL-Seite des Höhenmessers in das Axiom® TL Implantat ein, um die am besten geeignete Höhe der Healfit® SH zu bestimmen. Die Rillen auf der Messlehre entsprechen den verfügbaren Healfit® Höhen und der Gingivagrenze, um einen Überstand von 1,5 mm zu gewährleisten.


BL-Seite

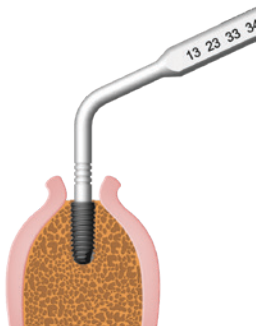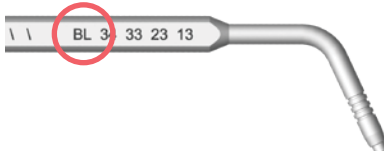


TL-Seite

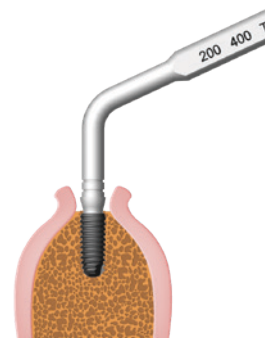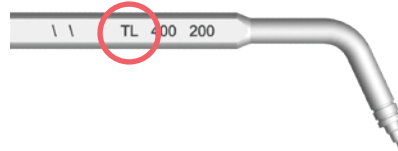

- Wählen Sie die Referenz der am besten geeigneten Healfit® SH und achten Sie darauf, dass die gewählte Referenz die Gingiva um mindestens 1,5 mm überragt.

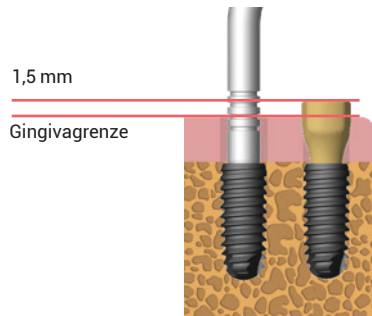

- Beispiel für das Axiom® BL Implantat: Mit der 2. Linie übereinstimmende Gingivagrenze = Healfit SH BL GH 2,5 + KH 3 wählen

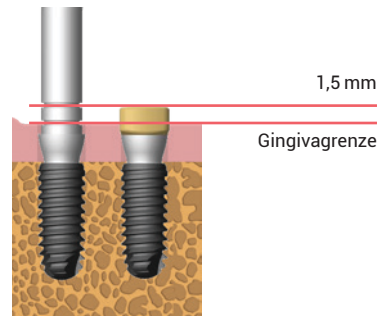

- Beispiel für das Axiom® TL Implantat: Mit der 1. Linie übereinstimmende Gingivagrenze = Healfit SH TL KH 2,5 wählen

VERWENDUNG DER HEALFIT® SH BL



Merkmale:


- Für Einzelzahnversorgungen auf Axiom® BL Implantaten
- Steril geliefert
- Einmalartikel
- Die Schraube M1.6 und der Hauptkörper werden demontiert geliefert
- Rotationsgesicherte Verbindung

1. Wahl der Healfit® SH BL


Zur Wahl stehen fünf anatomische Formen (A, B, C, D, E), drei Gingivahöhen (1,5, 2,5, 3,5 mm) und zwei koronale Höhen (3,0, 4,0 mm).
Siehe Abschnitt „Wahl der Healfit® SH“ auf S. 10.

2. Platzierung der Healfit® SH BL auf dem Implantat

ERFORDERLICHE AUSRÜSTUNG

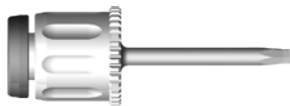

Handschlüssel für Chirurgie
OPCS100

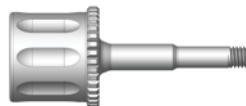

OPTIONAL
Axiom® BL Greifinstrument für Sekundärteile
(nur Körper)
INEXPS / INEXPL



Healfit® SH BL
Katalog S. 59

ANWENDUNGSPROTOKOLL

Option 1

➤ Setzen Sie den Körper der Healfit® SH in das Implantat ein (ggf. mit dem Axiom® BL Greifinstrument für Sekundärteile INEXPS / INEXPL) und achten Sie darauf, dass die Rille(n) auf der Oberseite der Healfit® SH zum Vestibulum hin ausgerichtet sind.

➤ Setzen Sie die Schraube M1.6 mit dem Handschlüssel für Chirurgie OPCS100 in den Körper der Healfit® SH.


➤ Ziehen Sie die Schraube M1.6 der Healfit® SH mit dem Handschlüssel für Chirurgie OPCS100 mit < 10 Ncm von Hand an, ohne die Einheilschraube mit Gewalt in das Implantat zu drehen.

➤ Vernähen Sie das Weichgewebe um die Healfit® SH herum, um die Einheilphase einzuleiten. Achten Sie darauf, dass der koronale Anteil das Weichgewebe um mindestens 1,5 mm überragt, damit eine spätere Abformung möglich ist.



Option 2

- Montieren Sie die Schraube und den Körper der Healfit® SH extraoral.
- Setzen Sie die montierte Healfit® SH mit dem Handschlüssel für Chirurgie OPCS100 in das Implantat ein und achten Sie darauf, dass die Rille(n) auf der Oberseite der Healfit® SH zum Vestibulum hin ausgerichtet sind.
- Ziehen Sie die Schraube M1.6 der Healfit® SH mit dem Handschlüssel für Chirurgie OPCS100 mit < 10 Ncm von Hand an, ohne die Einheilschraube mit Gewalt in das Implantat zu drehen.
- Vernähen Sie das Weichgewebe um die Healfit® SH herum, um die Einheilphase einzuleiten. Achten Sie darauf, dass der koronale Anteil das Weichgewebe um mindestens 1,5 mm überragt, damit eine spätere Abformung möglich ist.

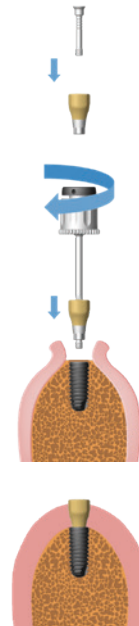

3. Abformung

ANFORDERUNGEN

- Stellen Sie sicher, dass die Healfit® SH vollständig in das Implantat eingeschraubt ist. Überprüfen Sie dies im Zweifelsfall anhand von senkrecht zu den Verbindungen angefertigten periapikalen Röntgenaufnahmen.
- Achten Sie darauf, dass der koronale Anteil das Weichgewebe um mindestens 1,5 mm überragt.

DIGITALE ABFORMUNG

In der Zahnarztpraxis:

- Digitalisieren Sie den Quadranten, den gegenüberliegenden Quadranten und die Okklusion.
- Kontrollieren Sie die Qualität der Scans.
- Weitere Informationen hierzu finden Sie in der LABSIDE-Bedienungsanleitung.

Hinweis:

Die Healfit® SH Referenz muss dem Labor mitgeteilt werden.

HERKÖMMLICHE ABFORMUNG

In der Zahnarztpraxis:

- Nehmen Sie eine herkömmliche Abformung mit einem handelsüblichen Abformlöffel vor.
- Senden Sie die Abformung an das Dentallabor.

Hinweis:

Die Healfit® SH Referenz muss dem Labor mitgeteilt werden.

In der Zahnarztpraxis:


- Digitalisieren Sie das Meistermodell mit einem Laborscanner.

GESTALTUNG UND HERSTELLUNG DER VERSORGUNG


Siehe entsprechenden Abschnitt auf Seite 22.

4. Entfernung der Healfit® SH BL aus dem Implantat

ERFORDERLICHE AUSTRÜSTUNG

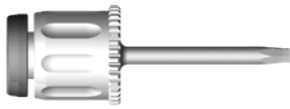


Handschlüssel für Chirurgie
OPCS100

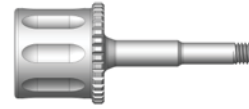

OPTIONAL
Axiom® BL Greifinstrument für Sekundärteile
(nur Körper)
INEXPS / INEXPL


ANWENDUNGSPROTOKOLL

- ➔ Setzen Sie nach der Einheilphase einen Sechskantschlüssel in die Schraube M1.6 der Healfit® SH ein.

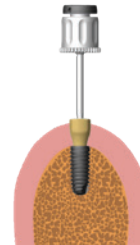

Option 1

- ➔ Drehen Sie die Schraube M1.6 von Hand aus dem Implantat und entfernen Sie die Einheilschraube.

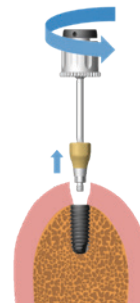


Option 2


Wenn die Healfit® SH BL im Axiom® BL festsetzt:

- ➔ Lösen Sie die Schraube M1.6 von Hand und entfernen Sie sie aus dem Implantat.
- ➔ Schrauben Sie den Körper von INEXPS / INEXPL in den Körper der Healfit® SH BL.
- ➔ Verwenden Sie den Körper von INEXPS / INEXPL als Greifinstrument und lösen Sie die festsetzende Healfit® SH BL vom Implantat.

Hinweis: Für die Entfernung einer festsetzenden Healfit® SH BL darf nur der Körper des Axiom® Sekundärteil-Extraktors INEXPS / INEXPL verwendet werden. Der Schaft des Extraktors ist nicht mit Healfit® SH BL kompatibel.

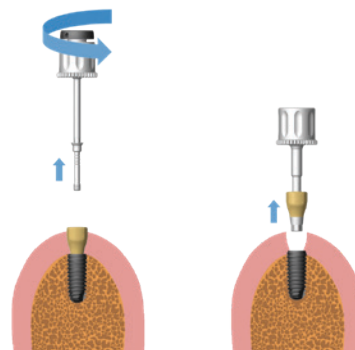

VERWENDUNG DER HEALFIT® SH TL

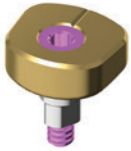

Merkmale:


- Für Einzelzahnversorgungen auf Axiom® TL Implantaten
- Steril geliefert
- Einmalartikel
- Die Schraube M1.6 wird montiert geliefert (unverlierbare Schraube)
- Rotationsgesicherte Verbindung

1. Wahl der Healfit® SH TL

Zur Wahl stehen fünf anatomische Formen (A, B, C, D, E), zwei Plattformen (N/Ø4,0 und R/Ø4,8) und zwei koronale Höhen (2,5, 4,0 mm). Siehe Abschnitt „Wahl der Healfit® SH“ auf S. 10.

2. Platzierung der Healfit® SH TL auf dem Implantat

ERFORDERLICHE AUSTRÜSTUNG

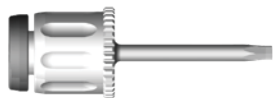

Handschlüssel für Chirurgie
OPCS100




Healfit® SH TL
Katalog S. 60

ANWENDUNGSPROTOKOLL

- Setzen Sie die Healfit® SH mit dem Handschlüssel für Chirurgie OPCS100 in das Implantat ein und achten Sie darauf, dass die Rille(n) auf der Oberseite der Healfit® SH zum Vestibulum hin ausgerichtet sind.

- Ziehen Sie die Schraube M1.6 der Healfit® SH mit dem Handschlüssel für Chirurgie OPCS100 mit < 10 Ncm von Hand an, ohne die Einheitschraube mit Gewalt in das Implantat zu drehen.

- Vernähen Sie das Weichgewebe um die Healfit® SH herum, um die Einheilphase einzuleiten. Achten Sie darauf, dass der koronale Anteil das Weichgewebe um mindestens 1,5 mm überragt, damit eine spätere Abformung möglich ist.

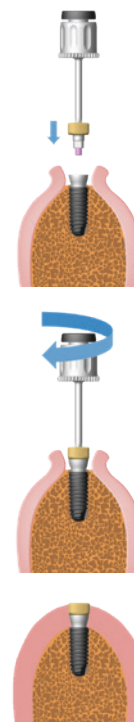


3. Abformung

Siehe Abschnitt „Abformung“ auf S. 19.

4. Entfernung der Healfit® SH TL aus dem Implantat

ERFORDERLICHE AUSRÜSTUNG

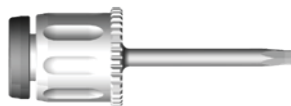


Handschlüssel für Chirurgie
OPCS100

ANWENDUNGSPROTOKOLL

- Setzen Sie nach der Einheilphase einen Sechskantschlüssel in die Schraube M1.6 der Healfit® SH ein.

- Drehen Sie die Schraube M1.6 von Hand aus dem Implantat und entfernen Sie die Einheilschraube.

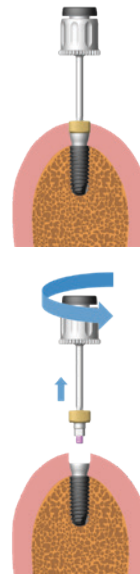

GESTALTUNG UND HERSTELLUNG DER EINZELZAHNVERSORGUNG

Hinweis: Bevor Sie beginnen, muss die Healfit® SH in der Scandatei identifiziert werden. Vergewissern Sie sich, dass die Artikelnummer dem Dentallabor mitgeteilt wurde.

- Entwerfen Sie die prothetische Versorgung in der gewählten CAD-Software.
- Stellen Sie die prothetische Versorgung her.
- Bei Bedarf können Sie ein Modell entwerfen und drucken, das mit einem Anthogyr Modellanalog für gedrucktes Modell kompatibel ist.

Siehe hierzu:

- die LABSIDE-Bedienungsanleitung, um weitere Informationen zur Digitalisierung und zum Design der prothetischen Versorgung zu erhalten,
- den Abschnitt Healfit SH Bibliotheken auf S. 23, um weitere Informationen zu Healfit SH Bibliotheken und zum Kopieren des Gingivaprofils zu erhalten.

HEALFIT® SH BIBLIOTHEKEN

1. Installation von CAD-Bibliotheken

A. EXOCAD

Hinweis:

Wenn Sie die Bibliothek „Labside Healfit® SH BL“ aktualisieren, müssen Sie alle Dateien der vorherigen „Healfit® SH BL“-Bibliothek entfernen.

Wenn Sie die Bibliothek „Labside Healfit® SH TL“ aktualisieren, müssen Sie alle Dateien der vorherigen „Healfit® SH TL“-Bibliothek entfernen.

Wählen Sie beim Herunterladen der Bibliothek bitte die Bibliotheksversion aus, die Ihrer Exocad-Version entspricht. Filtern Sie zum Beispiel nach „**Exocad-Elfsina**“ für Elfsina und spätere Versionen.

INSTALLATION


→ Entpacken Sie die erste Zip-Datei:

Name der Zip-Datei:	Enthaltene Ordner:
Anthogyr_Labside_HealfitSH_BL_exoCAD_VX.XX.XX.zip	- Anthogyr_Labside_HealfitSH_BL_exoCAD_VX.XX.XX.zip - README_Healfit_SH_manual_link.pdf
Anthogyr_Labside_HealfitSH_TL_exoCAD_VX.XX.XX.zip	- Anthogyr_Labside_HealfitSH_TL_exoCAD_VX.XX.XX.zip - README_Healfit_SH_manual_link.pdf


→ Entpacken Sie die zweite Zip-Datei:

Name der Zip-Datei:	Enthaltene Ordner:
Anthogyr_Labside_HealfitSH_BL_exoCAD_VX.XX.XX.zip	- Anthogyr-Labside-HealfitSH-BL - Anthogyr-Labside-ModelCreator
Anthogyr_Labside_HealfitSH_TL_exoCAD_VX.XX.XX.zip	- Anthogyr-Labside-HealfitSH-TL - Anthogyr-Labside-ModelCreator


Um den Speicherort von ExoCAD® auf Ihrem PC zu finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das DentalCADApp-Symbol und wählen Sie „Open file location“ (Dateispeicherort öffnen).

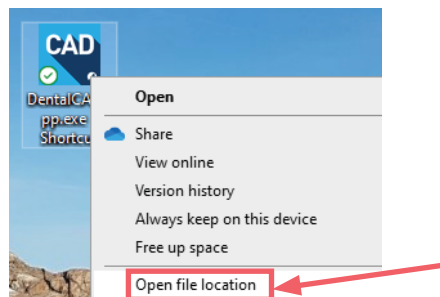


→ Öffnen Sie den DentalCADApp-Ordner:

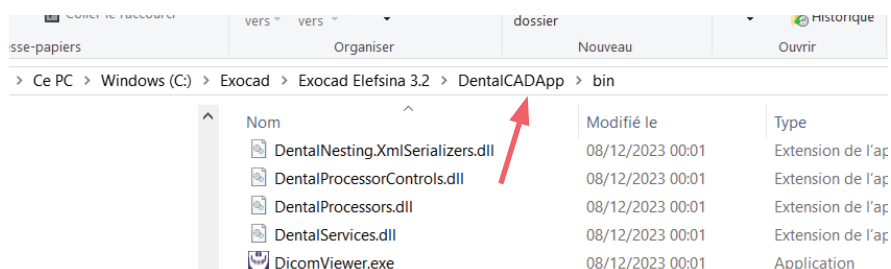


- Öffnen Sie den Ordner „library“ (Bibliothek):

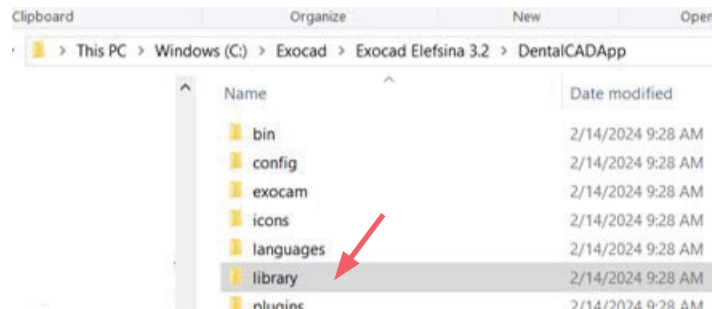

- Fügen Sie die Ordner Healfit® SH BL und Healfit® SH TL in den Ordner „implant“ (Implantat) ein:


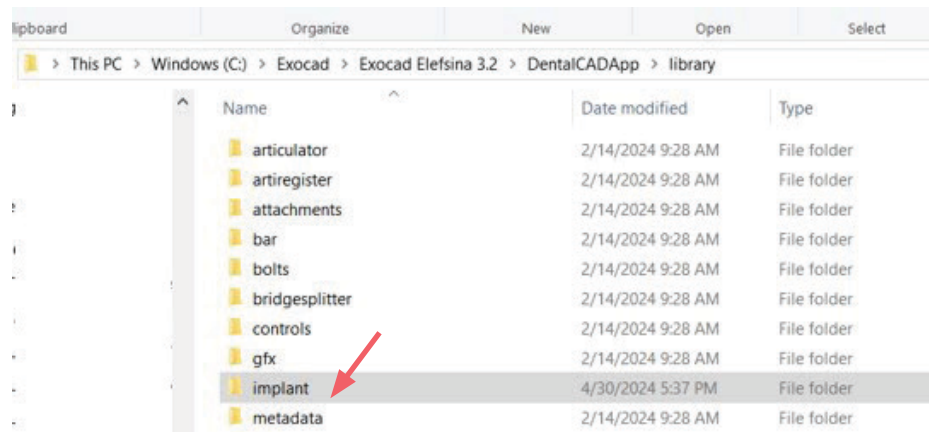


- Fügen Sie den Ordner Anthogyr_Labside_ModelCreator in den Ordner „\modelcreator\implants“ ein:

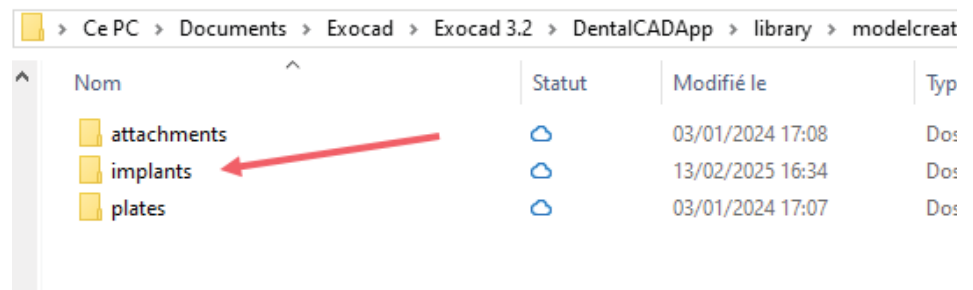

Hinweis:

Wenn Sie andere Anthogyr Healfit® SH Bibliotheken und andere Anthogyr Bibliotheken (Anthogyr Labside Flexibase®, Anthogyr Labside PreFace und Anthogyr Labside X-Base®) installiert haben, sollten Sie nur einen Anthogyr Labside Model Creator Ordner haben:

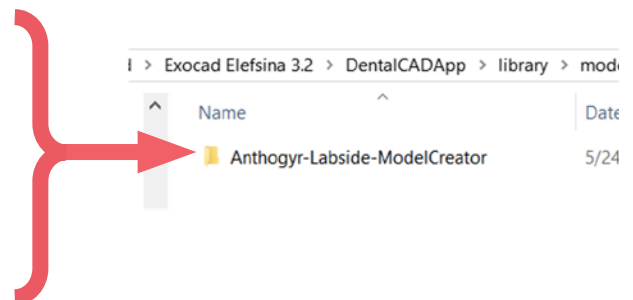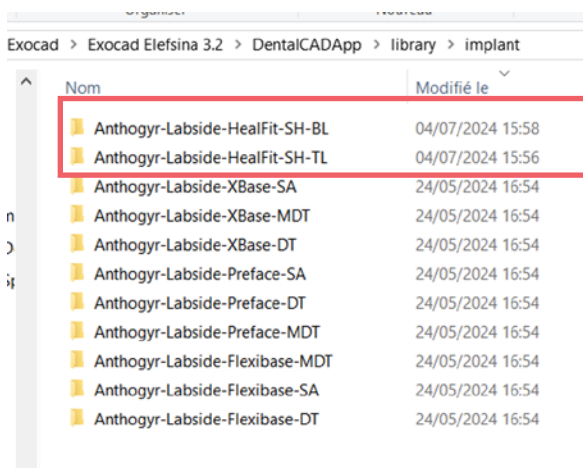

B. 3SHAPE

Achten Sie darauf, die richtige Bibliothek auszuwählen, die mit Ihrer Softwareversion kompatibel ist. Wenn Sie die Healfit® SH-Bibliothek von unserer Website herunterladen, **wählen Sie bitte den Filter aus, der Ihrer Version von 3Shape entspricht**. Zum Beispiel den Filter „2023“ für die 3Shape-Version 2023.

Hinweis:

Wenn Sie die Bibliothek „Anthogyr Labside Healfit® SH BL“ aktualisieren, müssen Sie alle Dateien der vorherigen „Healfit® SH BL“-Bibliothek entfernen.


Wenn Sie die Bibliothek „Anthogyr Labside Healfit® SH TL“ aktualisieren, müssen Sie alle Dateien der vorherigen „Healfit® SH TL“-Bibliothek entfernen.

INSTALLATION

Entpacken Sie die Zip-Datei gemäß der 3Shape-Version:

Name der Zip-Datei:	Enthaltene Ordner:
Anthogyr_Labside_HealfitSH_BL_3Shape_VX.XX.XX.zip	- Anthogyr_Labside_HealfitSH_BL_3Shape_VX.XX.XX.dme - README_Healfit_SH_manual_link.pdf
Anthogyr_Labside_HealfitSH_TL_3Shape_VX.XX.XX.zip	- Anthogyr_Labside_HealfitSH_TL_3Shape_VX.XX.XX.dme - README_Healfit_SH_manual_link.pdf

- Öffnen Sie das 3Shape Dental System Control Panel.
- Gehen Sie zu Import/Export:

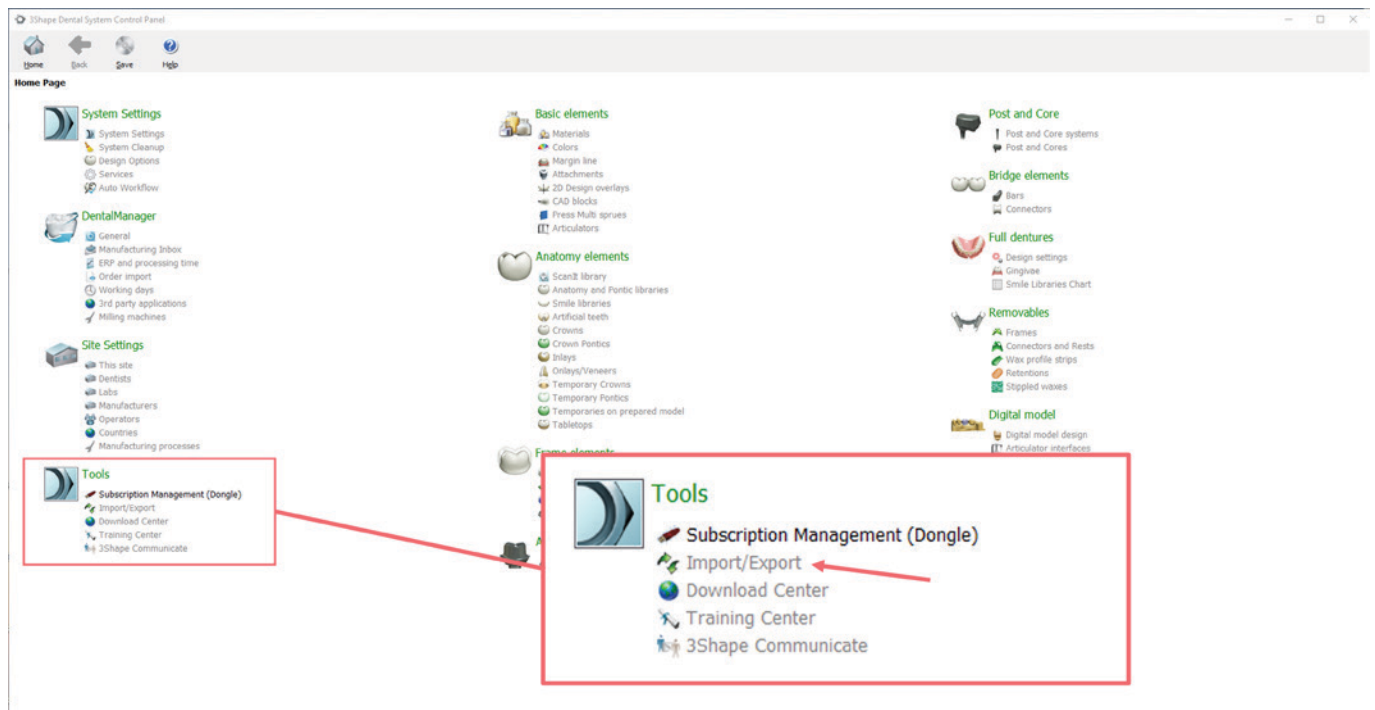

- Importieren Sie die DME-Datei: Klicken Sie auf „Import materials“ (Materialien importieren) und wählen Sie die DME-Datei aus.



- Speichern und schließen Sie das Control Panel.
- Starten Sie das dentale CAD-System neu.

C. DENTAL WINGS / CARES


Hinweis:

Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner, wenn Sie eine „lebenslange Lizenz“ haben.

Dental Wings und CARES® Visual Bibliotheken werden direkt aus der Software heraus aktualisiert:

Bitte öffnen Sie die Straumann Dental Desktop Software und klicken Sie auf „Update“.

Die verfügbaren Updates sind in der rechten Spalte aufgeführt.

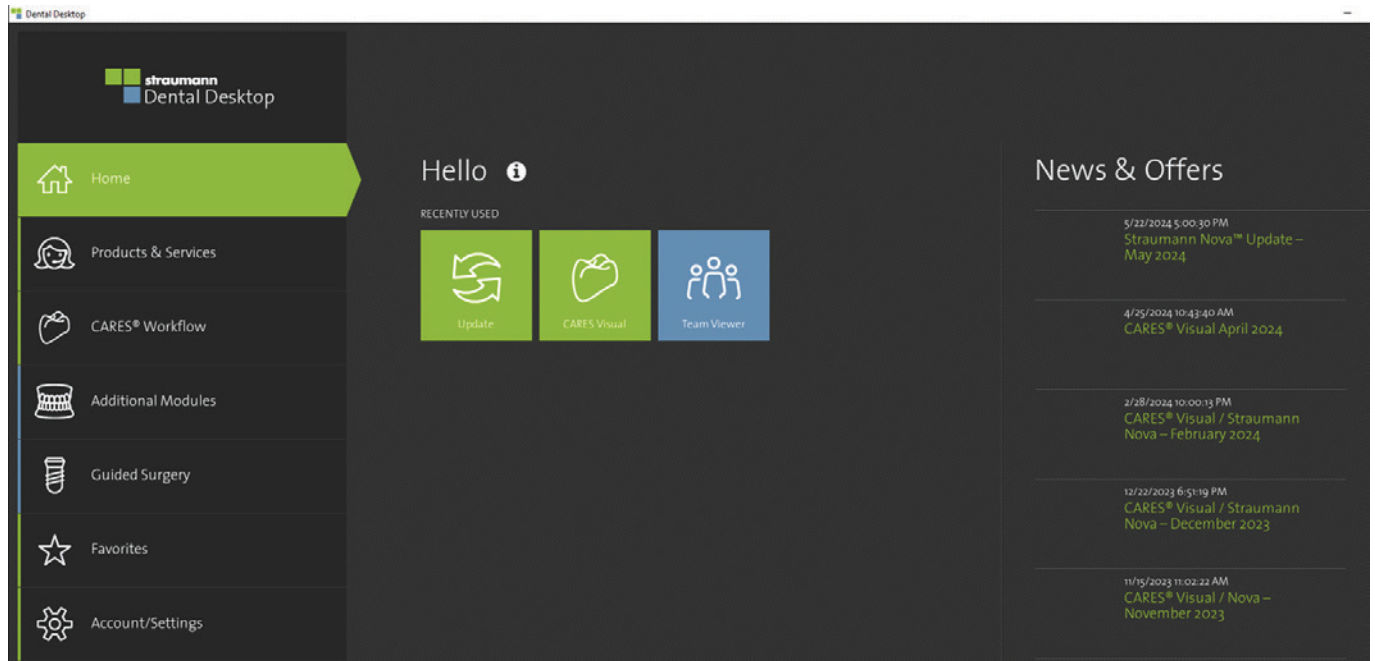


2. Struktur von CAD-Bibliotheken


A. EXOCAD

Zwei verschiedene Bibliotheken: Healfit® SH BL und Healfit® SH TL.

- Bitte wählen Sie die Bibliothek entsprechend der im Mund des Patienten eingesetzten Healfit® SH aus.

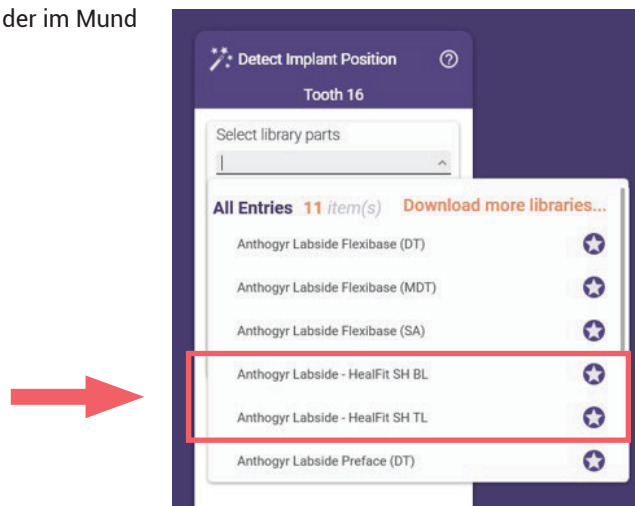

→ In der zweiten Ebene wählen Sie die im Mund des Patienten eingesetzte Healfit® SH Referenz und die Art der gewünschten Sekundärteil-Versorgung aus: Flexibase®, X-Base® gerade, X-Base® abgewinkelt oder PreFace.

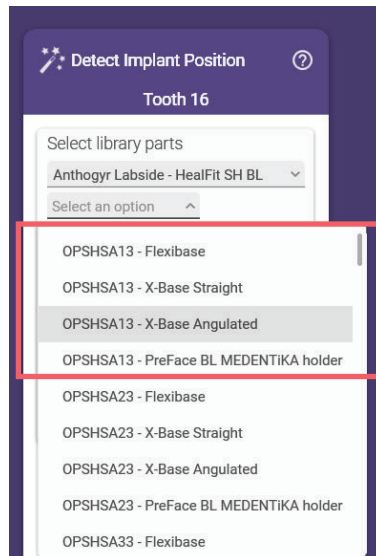

Beispiel für die Art der Sekundärteil-Versorgung bei OPSHSA13

→ In der letzten Ebene wählen Sie das gewünschte Sekundärteil aus. Weitere Einzelheiten sind den nachstehenden Beispielen zu entnehmen.

HEALFIT® SH BL


Die Bibliothek ist unterteilt in die Healfit® SH Referenz und anschließend das Sortiment an Titanbasen. Siehe nachstehende Beispiele:

Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH BL für Flexibase®

Struktur bei allen Exocad-Versionen

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit Flexibase® kompatiblen Healfit® SH BL Produktlinie bestimmt.

In diesem Beispiel heißt die Flexibase®, die für die Verwendung mit OPSHSA13 empfohlen wird, „RECO“. Bei allen anderen Healfit® SH BL Referenzen endet der Name der empfohlenen Flexibase® auf „RECO“.

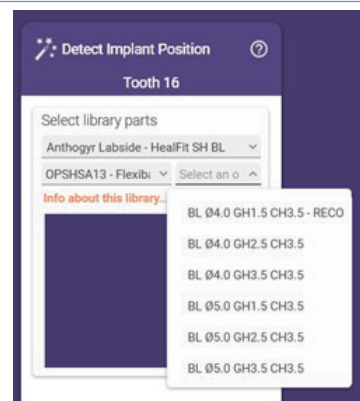

Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH BL für X-Base® gerade

Struktur bei allen Exocad-Versionen

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit X-Base® (nur gerader Schraubenkanal) kompatiblen Healfit® SH BL Produktlinie bestimmt.

In diesem Beispiel heißt die X-Base®, die für die Verwendung mit OPSHSB23 empfohlen wird, „RECO“. Bei allen anderen Healfit® SH BL Referenzen endet der Name der empfohlenen X-Base® auf „RECO“.



Beispiel für die Struktur bei Healfit[®] SH BL für X-Base[®] mit abgewinkeltem Schraubenzugang

Struktur bei Exocad Rijeka und älteren Versionen

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit X-Base[®] (nur abgewinkelter Schraubenkanal, Standard- oder U-Ausführung) kompatiblen Healfit[®] SH BL Produktlinie bestimmt.

In diesem Beispiel heißt die X-Base[®], die für die Verwendung mit OPSHSC13 empfohlen wird, „RECO“. Bei allen anderen Healfit[®] SH BL Referenzen endet der Name der empfohlenen X-Base[®] auf „RECO“.



Struktur bei Exocad Elefsina und späteren Versionen

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit X-Base[®] (nur abgewinkelter Schraubenkanal, Standard- oder U-Ausführung) kompatiblen Healfit[®] SH BL Produktlinie bestimmt.

In diesem Beispiel heißt die X-Base[®], die für die Verwendung mit OPSHSC13 empfohlen wird, „RECO“. Bei allen anderen Healfit[®] SH BL Referenzen endet der Name der empfohlenen X-Base[®] auf „RECO“.

Nur die Abwinkelungen 10°, 15°, 20° und 25° sind erhältlich.

Alle Abwinkelungen von 0° bis 25° sind erhältlich.

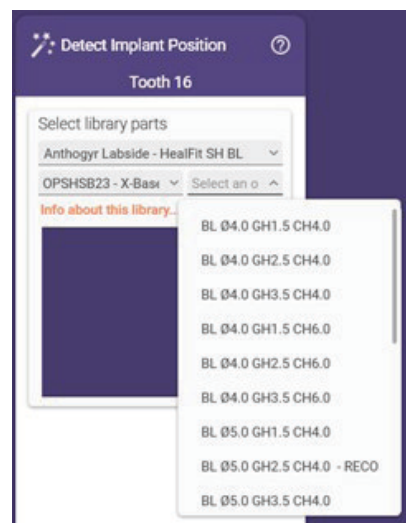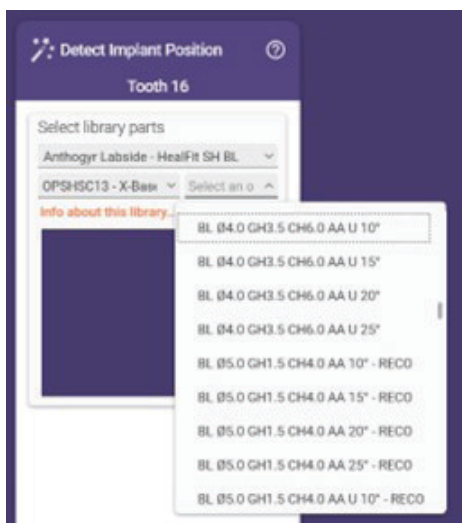


Beispiel für die Struktur bei Healfit[®] SH BL für PreFace BL MEDENTiKA Rohlinghalter

Struktur bei allen Exocad-Versionen

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit dem PreFace BL MEDENTiKA Rohlinghalter kompatiblen Healfit[®] SH BL Produktlinie bestimmt.

In diesem Beispiel heißt die PreFace-Komponente, die für die Verwendung mit OPSHA23 empfohlen wird, „RECO“. Bei allen anderen Healfit[®] BL Referenzen endet der Name der empfohlenen PreFace-Sekundärteile auf „RECO“.

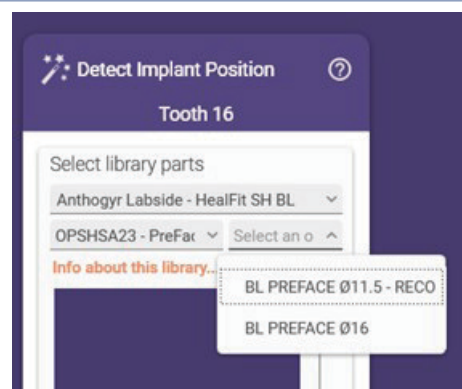


HEALFIT® SH TL

Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH TL für Flexibase®

Struktur bei allen Exocad-Versionen


Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit Flexibase® kompatiblen Healfit® SH TL Produktlinie bestimmt.

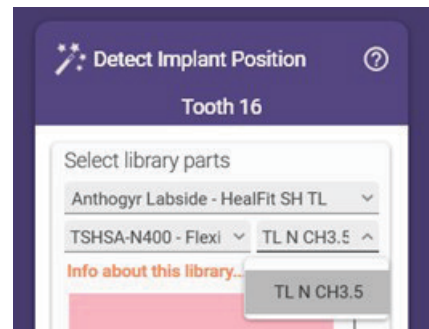

Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH TL für X-Base® gerade

Struktur bei allen Exocad-Versionen

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit X-Base® (nur gerader Schraubenkanal) kompatiblen Healfit® SH TL Produktlinie bestimmt.

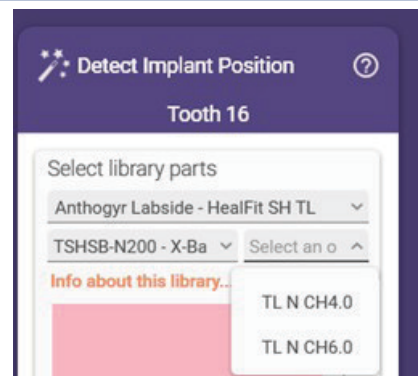


Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH TL für X-Base® mit abgewinkelterm Schraubenzugang

Struktur bei Exocad Rijeka und älteren Versionen

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit X-Base® (nur abgewinkelter Schraubenkanal, Standard- oder U-Ausführung) kompatiblen Healfit® SH TL Produktlinie bestimmt.


Nur die Abwinkelungen 10°, 15°, 20° und 25° sind erhältlich.

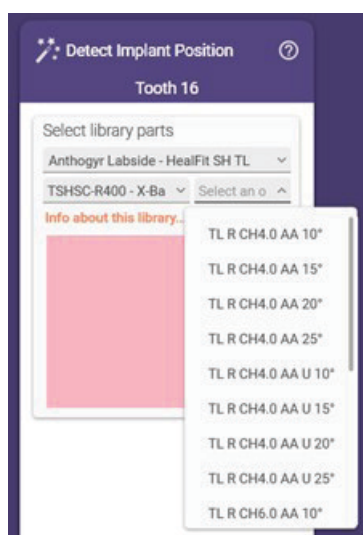

Struktur bei Exocad Elefsina und späteren Versionen

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit X-Base® (nur abgewinkelter Schraubenkanal, Standard- oder U-Ausführung) kompatiblen Healfit® SH TL Produktlinie bestimmt.


Alle Abwinkelungen von 0° bis 25° sind erhältlich.

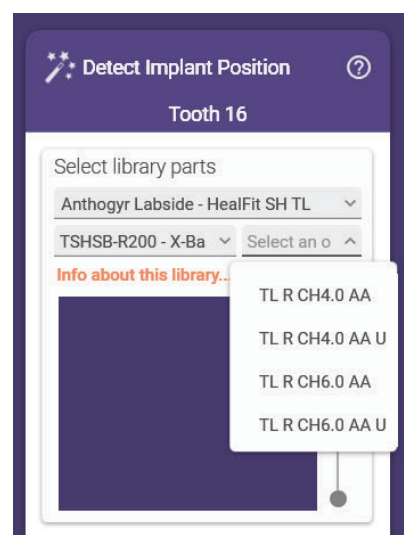

Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH TL für PreFace TL MEDENTiKA Rohlinghalter

Struktur bei allen Exocad-Versionen


Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit dem PreFace TL MEDENTiKA Rohlinghalter kompatiblen Healfit® SH TL Produktlinie bestimmt.

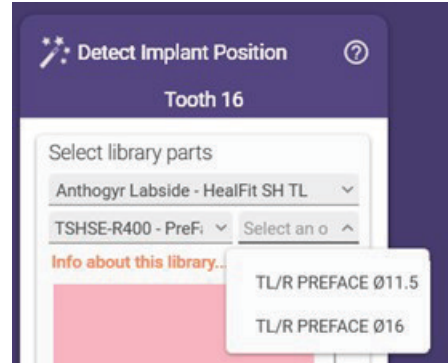


B. 3SHAPE

Es stehen zwei verschiedene Bibliotheken zur Verfügung: Healfit® SH BL und Healfit® SH TL

- Bitte wählen Sie die Bibliothek entsprechend der im Mund des Patienten eingesetzten Healfit® SH aus.

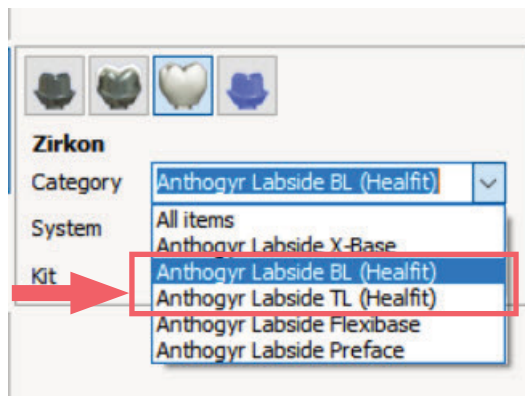

- In der zweiten Ebene wählen Sie die im Mund des Patienten eingesetzte Healfit® SH Referenz und die Art der gewünschten Sekundärteil-Versorgung aus: Flexibase®, X-Base® gerade, X-Base® abgewinkelt oder PreFace.

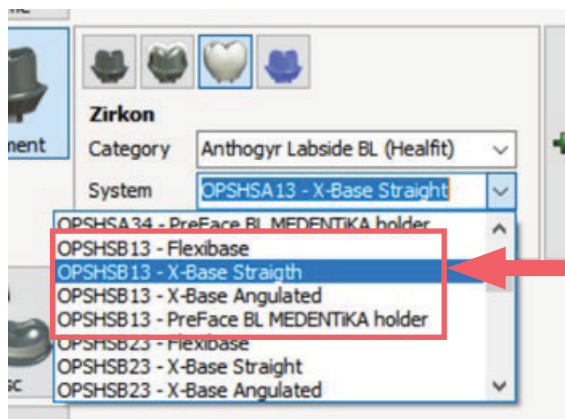

Beispiel für die Art der Sekundärteil-Versorgung bei OPSHSB13


- In der letzten Ebene wählen Sie das gewünschte Sekundärteil aus. Weitere Einzelheiten sind den nachstehenden Beispielen zu entnehmen.

HEALFIT® SH BL

Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH BL für Flexibase®

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit Flexibase® kompatiblen Healfit® SH BL Produktlinie bestimmt.

In diesem Beispiel heißt die Flexibase®, die für die Verwendung mit OPSHSA13 empfohlen wird, „RECO“. Bei allen anderen Healfit® SH BL Referenzen endet der Name der empfohlenen Flexibase® auf „RECO“.

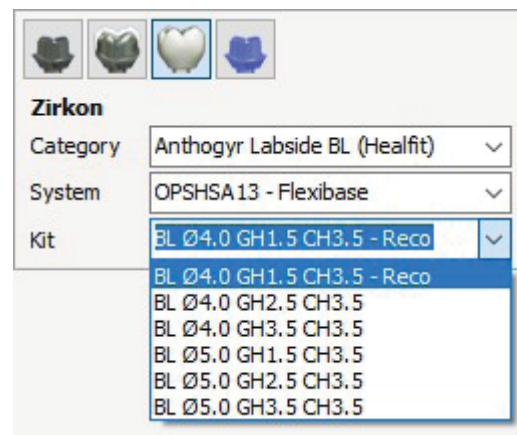

Zirkon

Category: Anthogyr Labside BL (Healfit) ▼

System: OPSHSA13 - Flexibase ▼


Kit: BL Ø4.0 GH1.5 CH3.5 - Reco ▼

- BL Ø4.0 GH1.5 CH3.5 - Reco
- BL Ø4.0 GH2.5 CH3.5
- BL Ø4.0 GH3.5 CH3.5
- BL Ø5.0 GH1.5 CH3.5
- BL Ø5.0 GH2.5 CH3.5
- BL Ø5.0 GH3.5 CH3.5

Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH BL für X-Base® gerade

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit X-Base® (nur gerader Schraubenkanal) kompatiblen Healfit® SH BL Produktlinie bestimmt.

In diesem Beispiel heißt die X-Base®, die für die Verwendung mit OPSHSB23 empfohlen wird, „RECO“. Bei allen anderen Healfit® SH BL Referenzen endet der Name der empfohlenen X-Base® auf „RECO“.

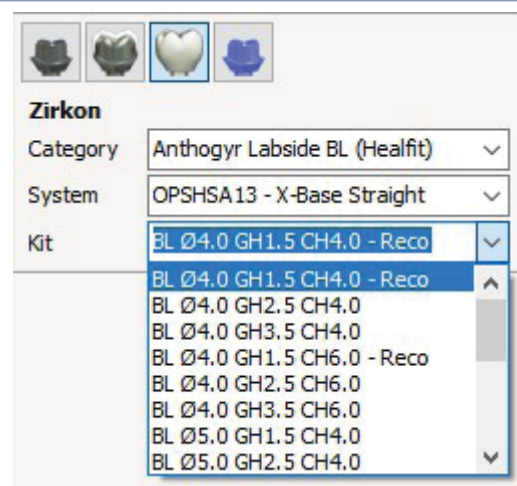

Zirkon

Category: Anthogyr Labside BL (Healfit) ▼

System: OPSHSA13 - X-Base Straight ▼


Kit: BL Ø4.0 GH1.5 CH4.0 - Reco ▼

- BL Ø4.0 GH1.5 CH4.0 - Reco
- BL Ø4.0 GH2.5 CH4.0
- BL Ø4.0 GH3.5 CH4.0
- BL Ø4.0 GH1.5 CH6.0 - Reco
- BL Ø4.0 GH2.5 CH6.0
- BL Ø4.0 GH3.5 CH6.0
- BL Ø5.0 GH1.5 CH4.0
- BL Ø5.0 GH2.5 CH4.0

Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH BL für X-Base® mit abgewinkeltem Schraubenzugang

Diese Ebenen sind für die Verwendung der mit X-Base® (nur abgewinkelter Schraubenkanal, Standard- oder U-Ausführung) kompatiblen Healfit® SH BL Produktlinie bestimmt.

In diesem Beispiel heißt die X-Base®, die für die Verwendung mit OPSHSC13 empfohlen wird, „RECO“. Bei allen anderen Healfit® SH BL Referenzen endet der Name der empfohlenen X-Base® auf „RECO“.

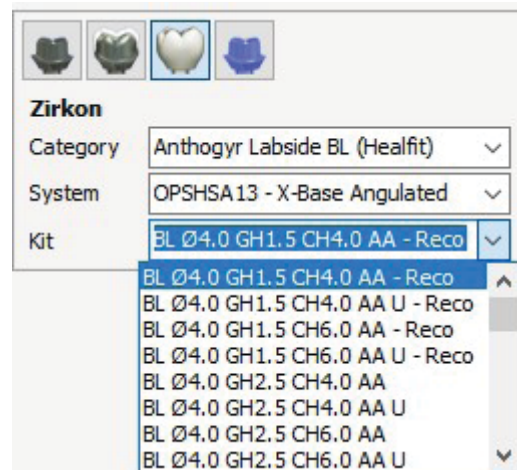

Zirkon

Category: Anthogyr Labside BL (Healfit) ▼

System: OPSHSA13 - X-Base Angulated ▼

Kit: BL Ø4.0 GH1.5 CH4.0 AA - Reco ▼

- BL Ø4.0 GH1.5 CH4.0 AA - Reco
- BL Ø4.0 GH1.5 CH4.0 AA U - Reco
- BL Ø4.0 GH1.5 CH6.0 AA - Reco
- BL Ø4.0 GH1.5 CH6.0 AA U - Reco
- BL Ø4.0 GH2.5 CH4.0 AA
- BL Ø4.0 GH2.5 CH4.0 AA U
- BL Ø4.0 GH2.5 CH6.0 AA
- BL Ø4.0 GH2.5 CH6.0 AA U

Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH BL für PreFace BL MEDENTiKA Rohlinghalter

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit dem PreFace BL MEDENTiKA Rohlinghalter kompatiblen Healfit® SH BL Produktlinie bestimmt.

In diesem Beispiel heißt die PreFace-Komponente, die für die Verwendung mit OPSHA23 empfohlen wird, „RECO“. Bei allen anderen Healfit® SH BL Referenzen endet der Name der empfohlenen X-Base® auf „RECO“.

The screenshot shows the 'Zirkon' (Zircon) section of the software. It has four icons at the top: a black heart, a green heart, a white heart (selected), and a blue heart. Below the icons are three dropdown menus: 'Category' set to 'Anthogyr Labside BL (Healfit)', 'System' set to 'OPSHA23 - PreFace BL MEDENT', and 'Kit'. The 'Kit' dropdown is open, showing three options: 'BL PREFACE Ø11.5 - Reco' (highlighted), 'BL PREFACE Ø11.5 - Reco', and 'BL PREFACE Ø16'.

HEALFIT® SH TL

Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH TL für Flexibase®

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit Flexibase® kompatiblen Healfit® SH TL Produktlinie bestimmt.

The screenshot shows the 'Zirkon' (Zircon) section of the software. It has four icons at the top: a black heart, a green heart, a white heart (selected), and a blue heart. Below the icons are three dropdown menus: 'Category' set to 'Anthogyr Labside TL (Healfit)', 'System' set to 'TSHSA-N200 - Flexibase', and 'Kit' set to 'TL N CH3.5'.

Beispiel für die Struktur bei X-Base® gerade

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit X-Base® (nur gerader Schraubenkanal) kompatiblen Healfit® SH TL Produktlinie bestimmt.

The screenshot shows the 'Zirkon' (Zircon) section of the software. It has four icons at the top: a black heart, a green heart, a white heart (selected), and a blue heart. Below the icons are three dropdown menus: 'Category' set to 'Anthogyr Labside TL (Healfit)', 'System' set to 'TSHSA-N200 - X-Base Straight', and 'Kit'. The 'Kit' dropdown is open, showing three options: 'TL N CH4.0' (highlighted), 'TL N CH4.0', and 'TL N CH6.0'.


Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH TL für X-Base® mit abgewinkelter Schraubenzugang

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit X-Base® (nur abgewinkelter Schraubenkanal, Standard- oder U-Ausführung) kompatiblen Healfit® SH TL Produktlinie bestimmt.

The screenshot shows the 'Zirkon' (Zircon) section of the software. It has four icons at the top: a black heart, a green heart, a white heart (selected), and a blue heart. Below the icons are three dropdown menus: 'Category' set to 'Anthogyr Labside TL (Healfit)', 'System' set to 'TSHSA-N200 - X-Base Angulated', and 'Kit'. The 'Kit' dropdown is open, showing five options: 'TL N CH4.0 AA' (highlighted), 'TL N CH4.0 AA U', 'TL N CH6.0 AA', and 'TL N CH6.0 AA U'.

Beispiel für die Struktur bei Healfit® SH TL für PreFace TL MEDENTiKA Rohlinghalter

Diese Ebenen sind für die Verwendung mit der mit dem PreFace TL MEDENTiKA Rohlinghalter kompatiblen Healfit® SH TL Produktlinie bestimmt.

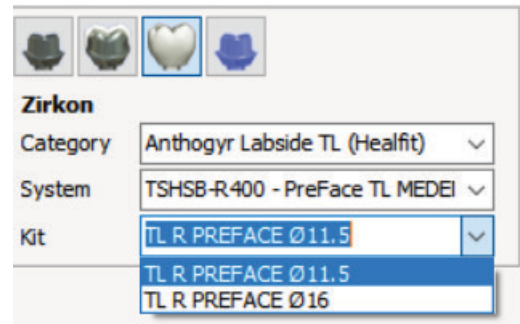


Weitere Informationen zu den Designspezifikationen von X-Base® Sekundärteilen finden Sie in der LABSIDE-Bedienungsanleitung.

C. DENTAL WINGS / CARES

Healfit® SH Komponenten wurden zum Scankörper-Menü hinzugefügt.

Es werden nur mit dem jeweiligen Implantat compatible Healfit® SH Komponenten angezeigt. Siehe nachstehendes Beispiel:

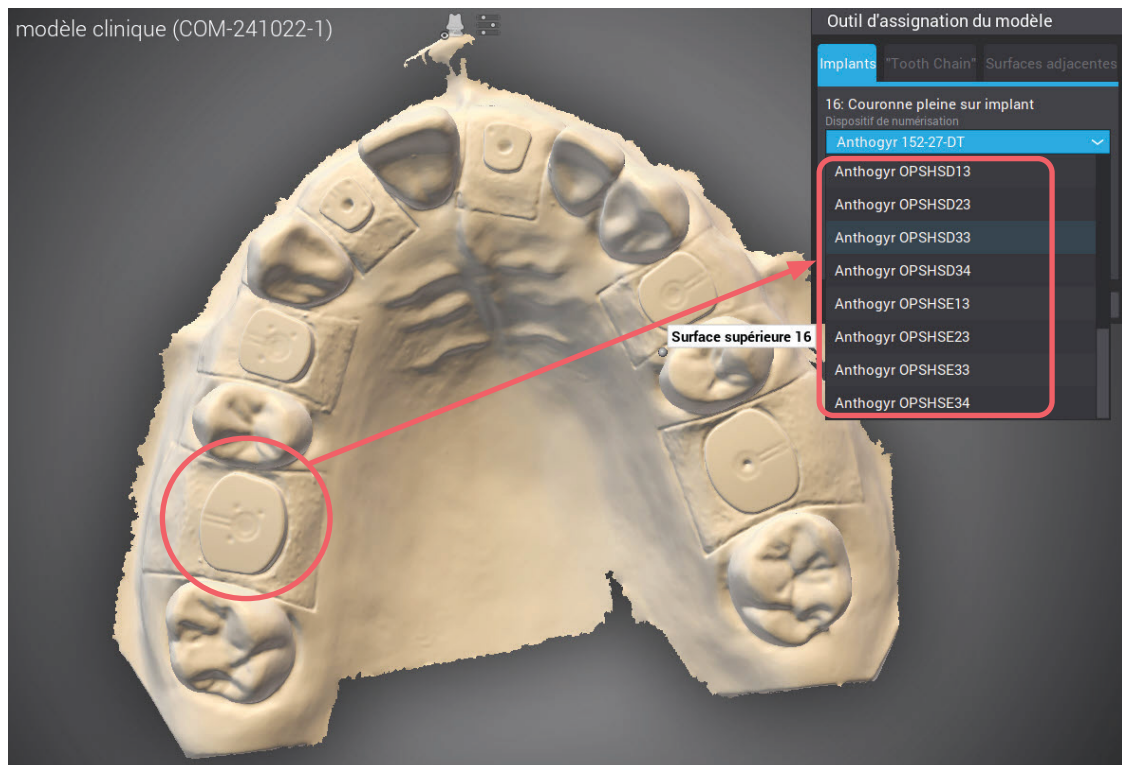


Weitere Informationen zur Struktur der Bibliothek und zu den Designspezifikationen von X-Base® Sekundärteilen finden Sie in der LABSIDE-Bedienungsanleitung.

AUSWAHL DES SCANKÖRPERS


Die Healfit® SH Referenzen werden gemäß den kompatiblen Implantaten angezeigt:

Beispiel für das Axiom® BL Implantat:

Mit Healfit® SH kompatible
Komponenten

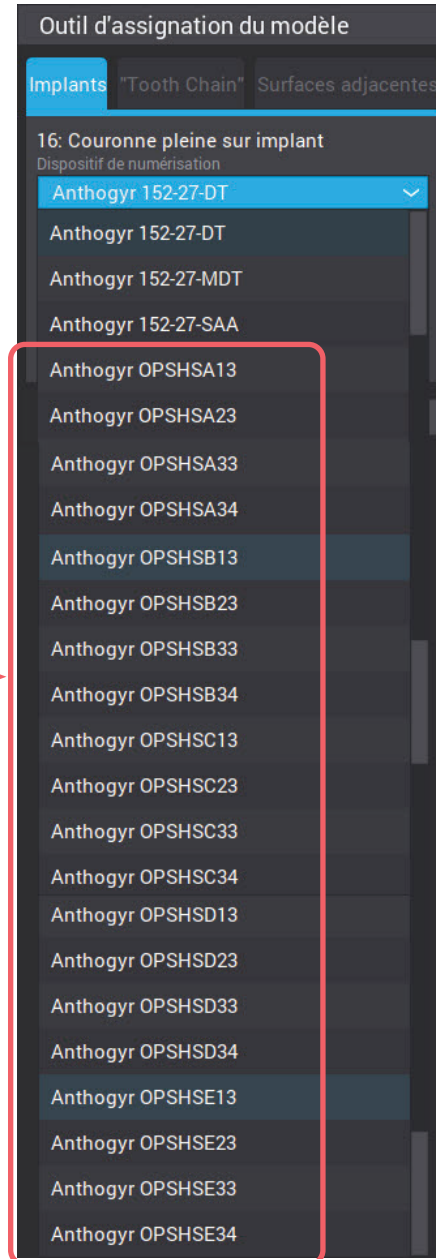


Beispiel für das Axiom® TL Implantat mit Plattform N:

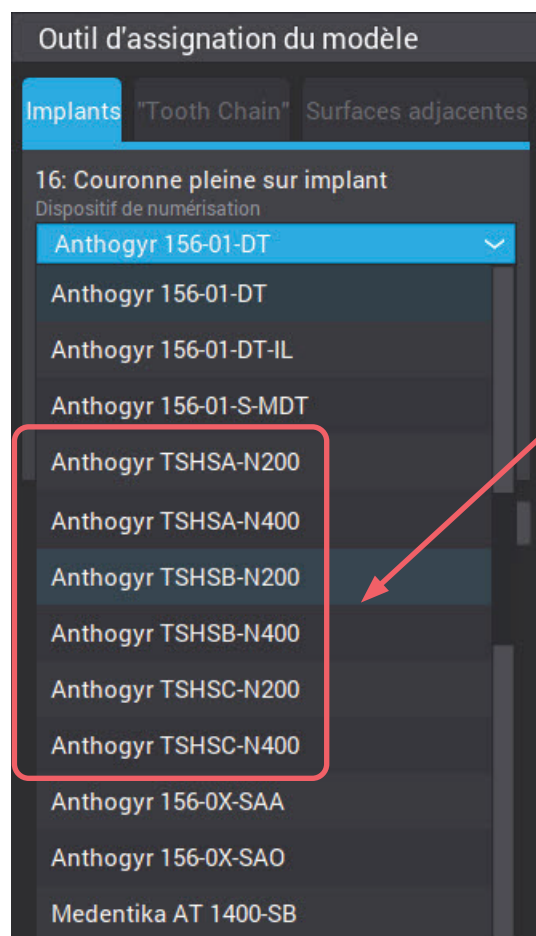


Mit Healfit® SH
kompatible
Komponenten

Beispiel für das Axiom® TL Implantat mit Plattform R:

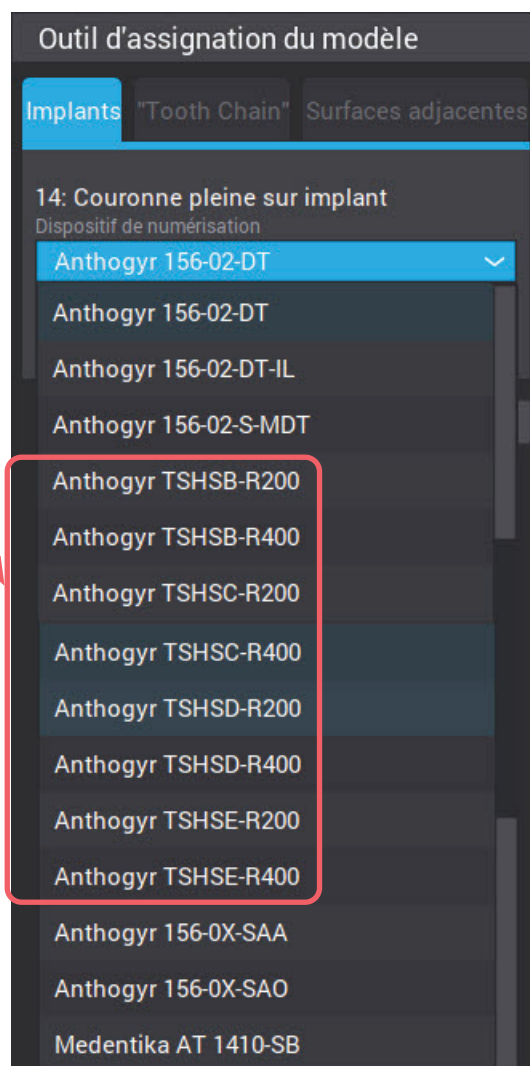

3. Kopieren des Gingivaprofils

3D-Dateien des Emergenzprofile der Healfit® SH stehen auf unserer Website auf der Seite Labside-Bibliotheken unter folgendem Namen zur Verfügung: **Anthogyr Labside Healfit SH – Emergence Profile 3D-Files**.

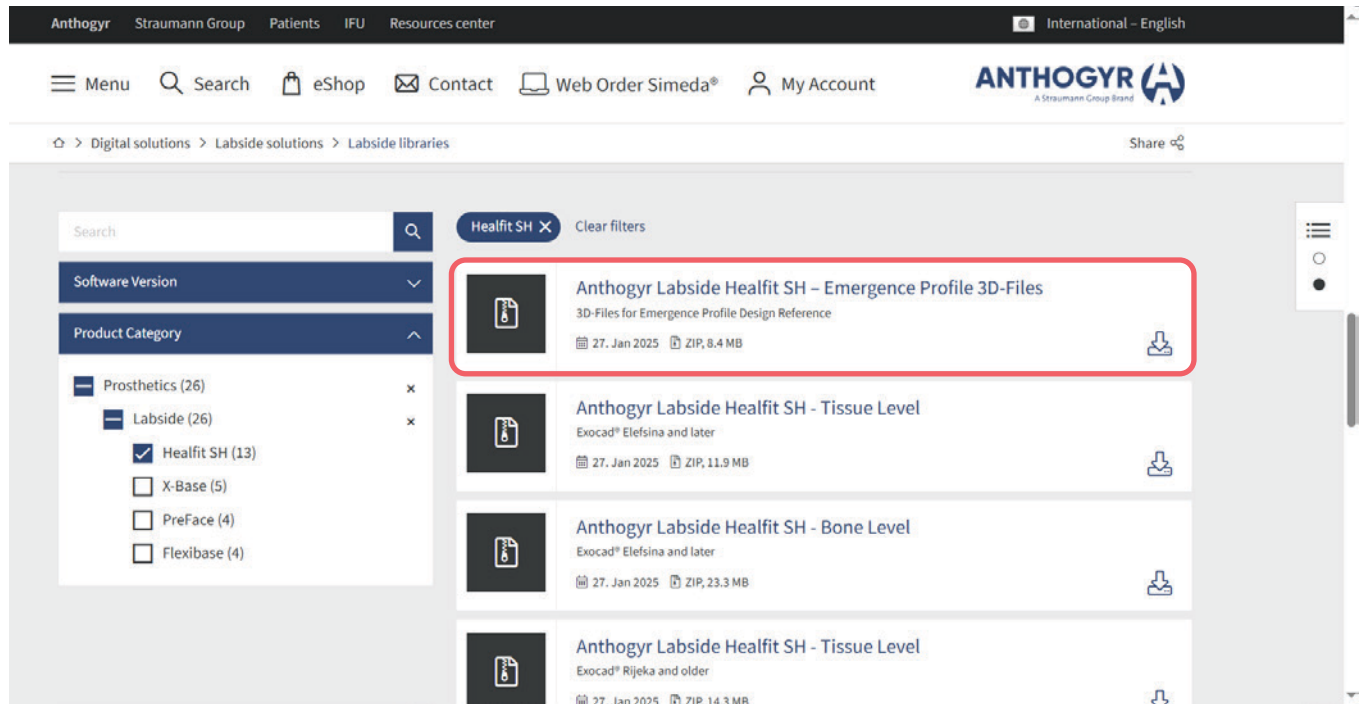


- Mit der Exocad-Bibliothek können diese Dateien für die halbautomatische Gestaltung des Gingivaprofils verwendet werden (Option 1).
- Mit der CARES- und Dental Wings-Bibliothek können diese Dateien für die manuelle Gestaltung des Gingivaprofils verwendet werden.

A. EXOCAD

Je nach gewählter Form der Healfit® SH gibt es zwei Möglichkeiten, das Gingivaprofil der prothetischen Versorgung zu gestalten:

Option 1: Halbautomatisch mit zusätzlicher Datei

1. Füllen Sie das Auftragsformular wie gewohnt aus: Kunde, Name, Techniker ...

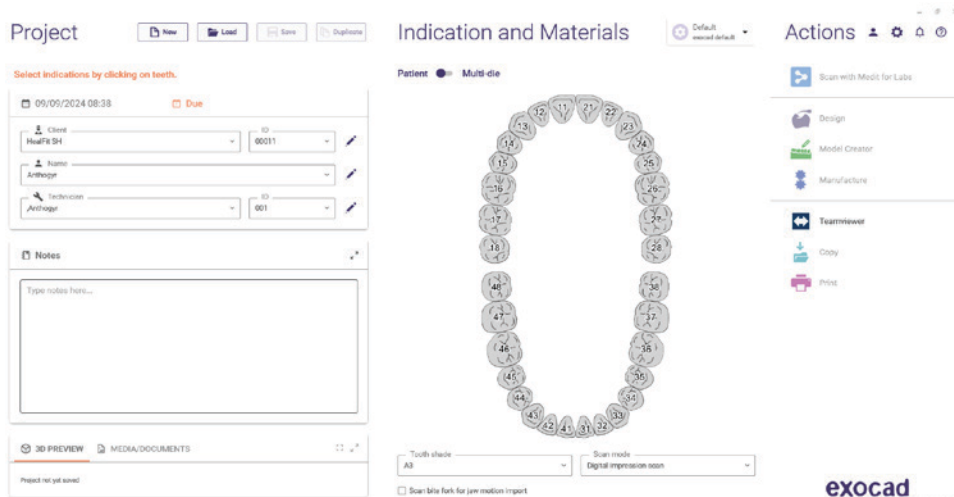


2. Wählen Sie den Zahn:

- a. Im nächsten Fenster: Wählen Sie, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt, die Art der Versorgung, das gewünschte Material und andere Einstellungen aus.

Es ist wichtig, dass Sie im Abschnitt „Additional Scans“ (Zusätzliche Scans) die Option „**Pre-op model**“ (Situ-Modell) auswählen, damit die Software die Gingivaform der prothetischen Versorgung entsprechend der ausgewählten Healfit® SH anpassen kann.


Die Schritte im Einzelnen: (a) Art der Krone > (b) Material > (c) Farbe > (d) Verschraubt > (e) Situ-Modell > (f) Scankörper in Hauptscan.

Klicken Sie auf OK, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

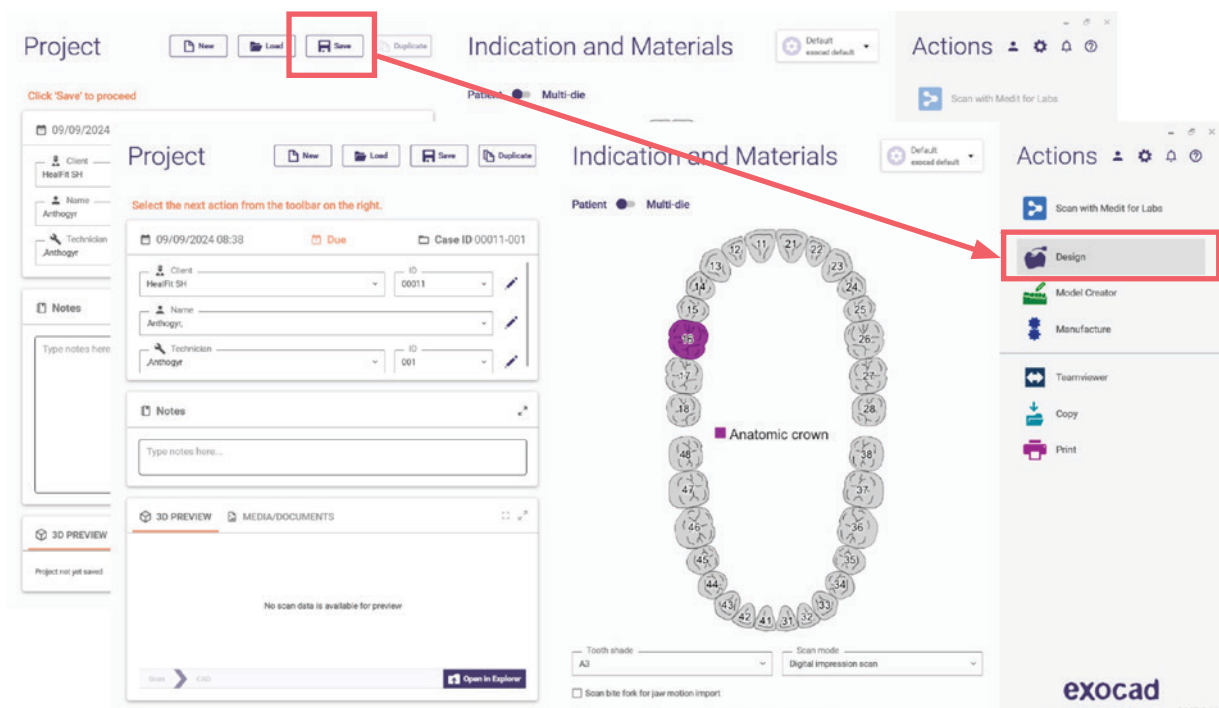


Hinweis: Bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren, muss die Healfit® SH in der Scandatei identifiziert werden.

3. Klicken Sie im nächsten Fenster auf „Save“ (Speichern) und dann auf „Design“.
4. In den nächsten Fenstern:
 - a. Erstes Fenster: Wählen Sie die Scandatei (mit Healfit® SH als Scankörper).
 - b. Zweites Fenster: Wählen Sie die STL-Datei der Healfit® SH.

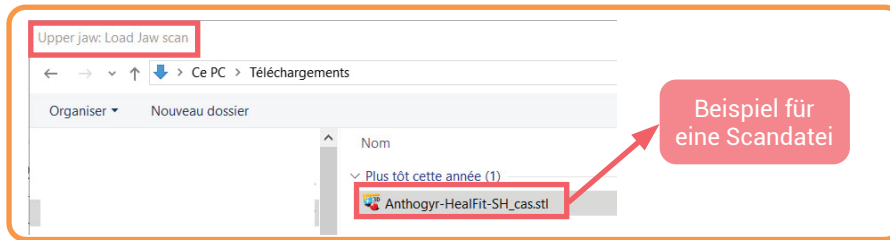


Erstes Fenster


Zweites
Fenster

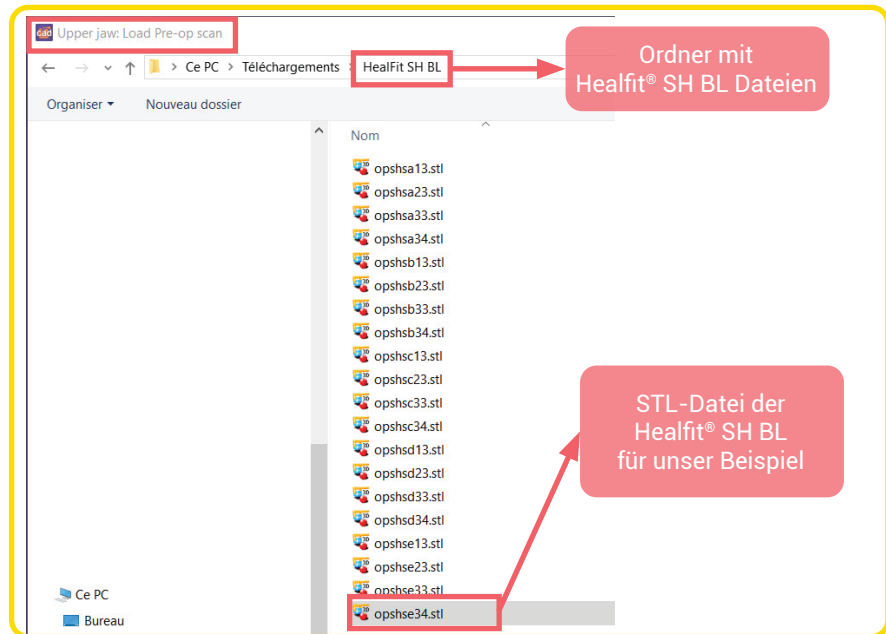



5. Stellen Sie die Scanausrichtung wie gewohnt ein.
6. Richten Sie die Scandatei und die Healfit® SH STL-Datei (Situ-Datei) aneinander aus.
 - a. Führen Sie eine manuelle Vorausrichtung durch.
 - b. Führen Sie dann eine Ausrichtung durch, indem Sie auf die 3 Punkte klicken. Siehe nachstehende Abbildung.

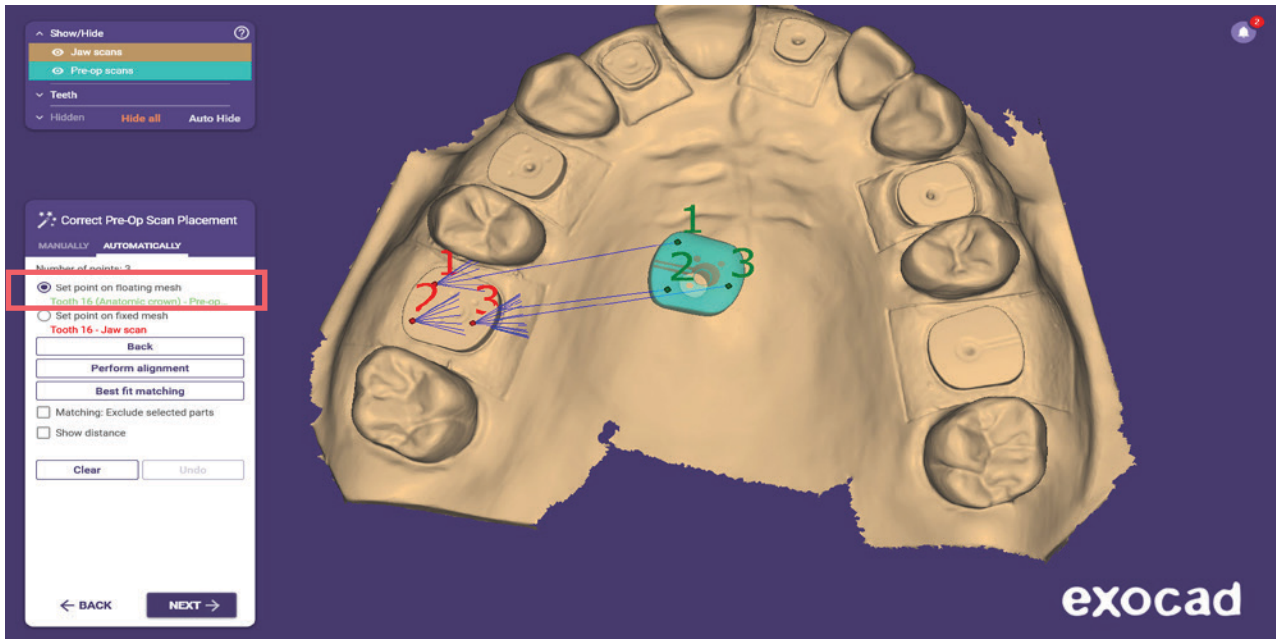

- c. Klicken Sie auf „Perform alignment“ (Ausrichtung durchführen).
- d. Klicken Sie bei gedrückter STRG-Taste auf „Best fit matching“ (Best-Fit-Matching). Dadurch können Sie die korrekte Ausrichtung mithilfe der Farbleiste überprüfen. Sie können die Ausrichtung auch in der Schnittansicht überprüfen. Siehe nachstehende Abbildung.

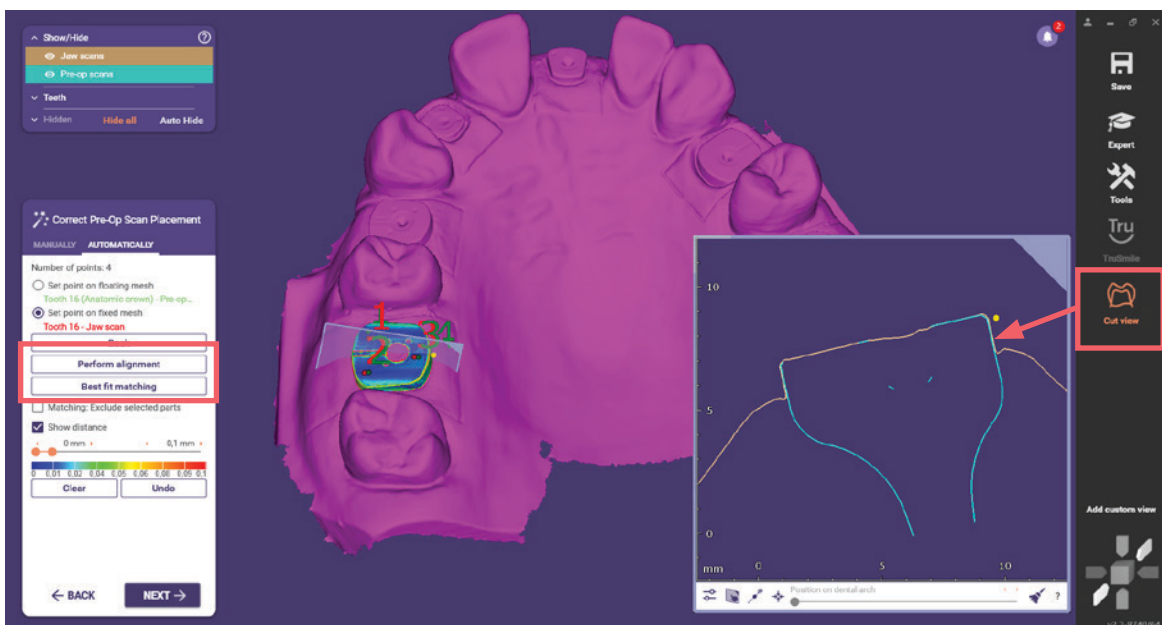

7. Wählen Sie die richtige Bibliothek aus.
 - a. Nachdem Sie die Bibliothek ausgewählt haben, schneiden Sie den Healfit® SH (Scankörper) mit dem Schieberegler aus. Siehe nachstehende Abbildung.

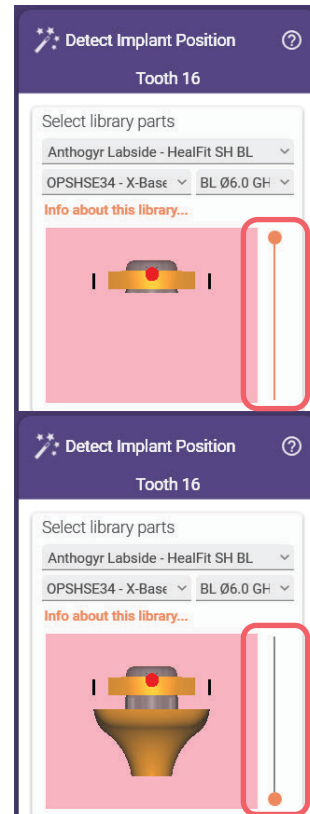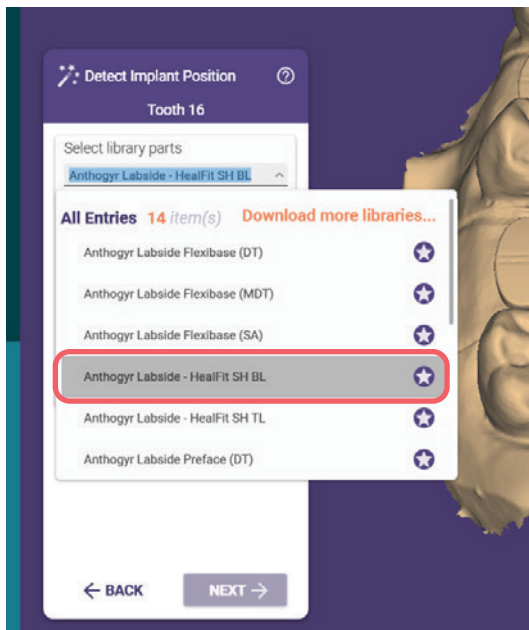

Schieberegler
oben




Schieberegler
unten



- b. Fahren Sie mit der Ausrichtung fort.
Bitte überprüfen Sie stets, ob die Ausrichtung erfolgreich durchgeführt wurde, indem Sie beim Matching die STRG-Taste drücken. Die nachstehenden Abbildungen zeigen ein Beispiel:


Erfolgreiche Ausrichtung:

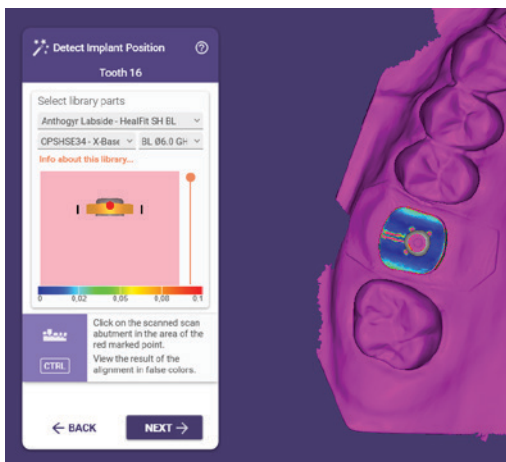


Falsche Ausrichtung:



8. Legen Sie das Emergenzprofil fest.
9. Platzieren Sie den Modellzahn.
10. Verringern Sie im Abschnitt „Abutment Bottoms“ (Sekundärteilböden) den unteren Teil (unten in grau), bis er verschwindet. Die Einstellungen können auf 0 mm reduziert werden, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Kontaktpunkte und die Form anpassen müssen, **bevor der gingivale Teil angepasst werden kann**.

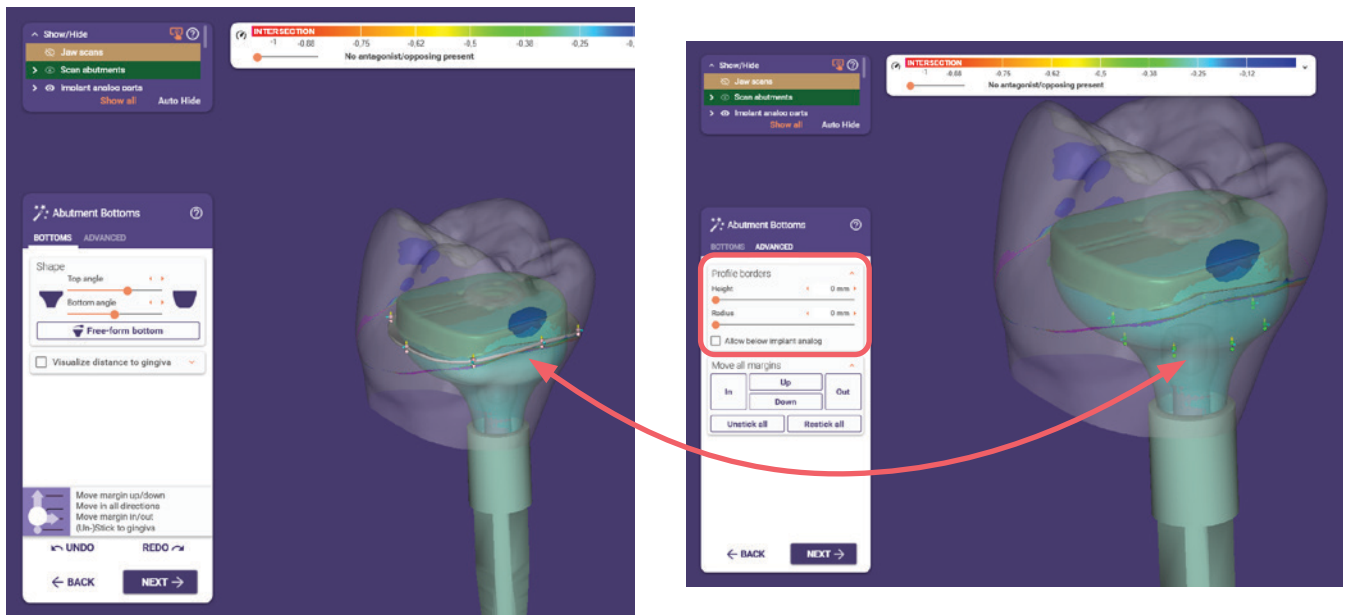


11. Wählen Sie als Nächstes den Expertenmodus aus.
 - a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie die Option **Adapt to Pre-Op Scan** (An Situ-Scan anpassen).

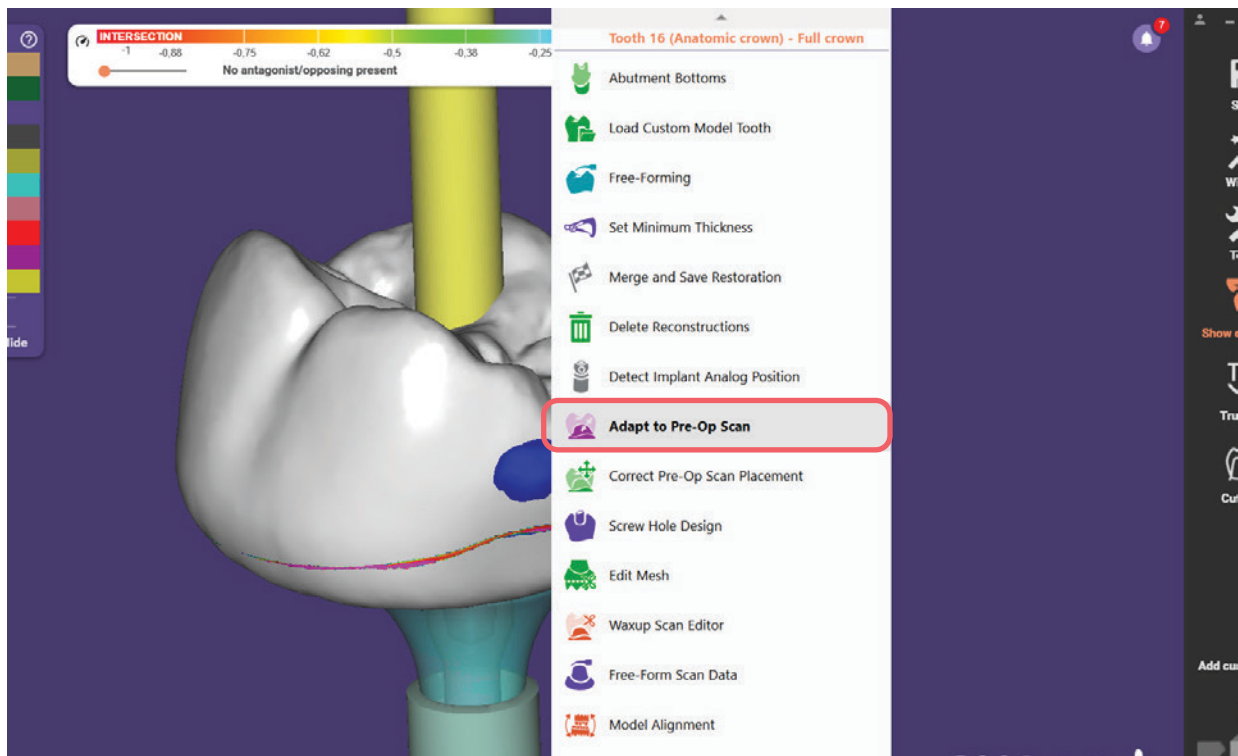


- b. Wählen Sie im nächsten Fenster die Option „Exclude selected parts“ (Markierte Bereiche ausschließen).
- c. Wählen Sie in dem nun angezeigten Fenster die Option „All other parts“ (Alle anderen Bereiche) aus. Diese Bereiche entsprechen dem Mesh, das **nicht** an die Healfit® SH Form **angepasst wird**.

In der nachstehenden Abbildung ist das Mesh, das nicht angepasst wird, rot, das Mesh, das angepasst werden soll, orange und die Datei der Healfit® SH blau dargestellt.

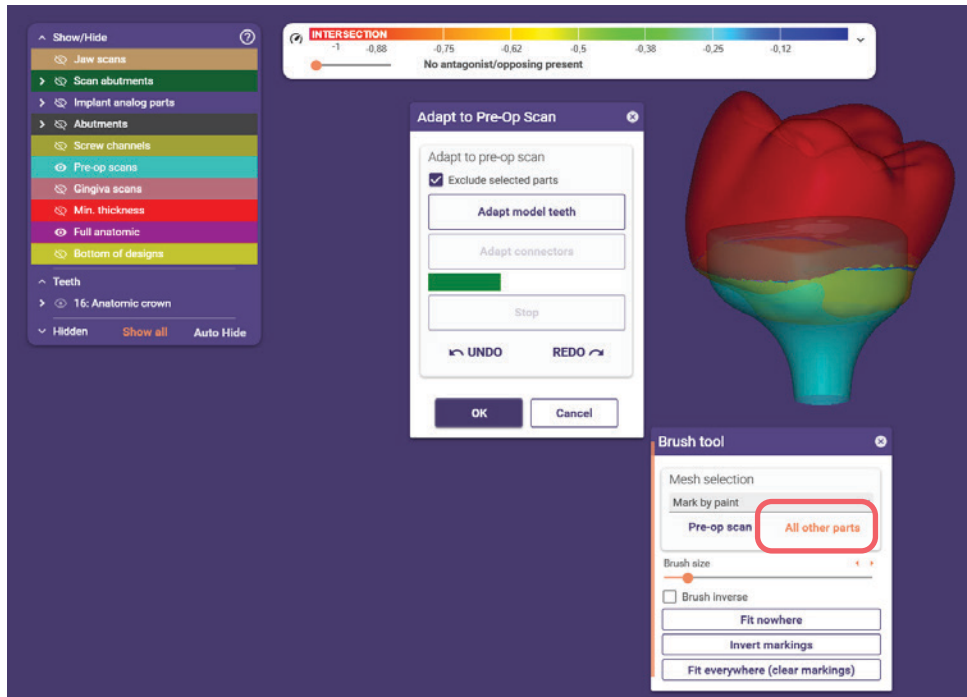

- d. Nachdem das gesamte Mesh ausgewählt wurde, klicken Sie auf „Adapt model teeth“ (Modellzähne anpassen). Wiederholen Sie ggf. die Schritte „c“ und „d“.


Bitte denken Sie daran, zu prüfen, ob die passende Form für den gesamten Fall gilt (Gingivabereich, mediale und distale Seite ...).

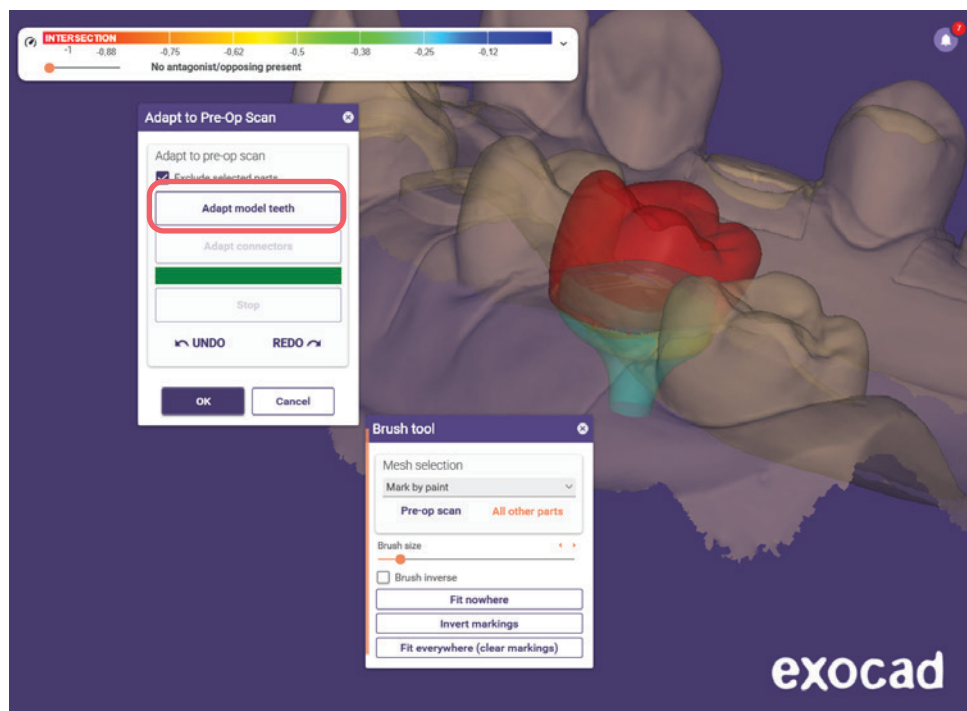

12. Klicken Sie auf „Wizard“ (oben rechts im Fenster): Ändern Sie im nächsten Modul, dem Modul Freiformen, ggf. die prothetische Versorgung (glätten, Durchdringungen abschneiden usw.).
13. Schließen Sie das Design der prothetischen Versorgung wie gewohnt ab.


Option 2: Manuell

1. Füllen Sie das Auftragsformular wie gewohnt aus: Kunde, Name, Techniker usw.

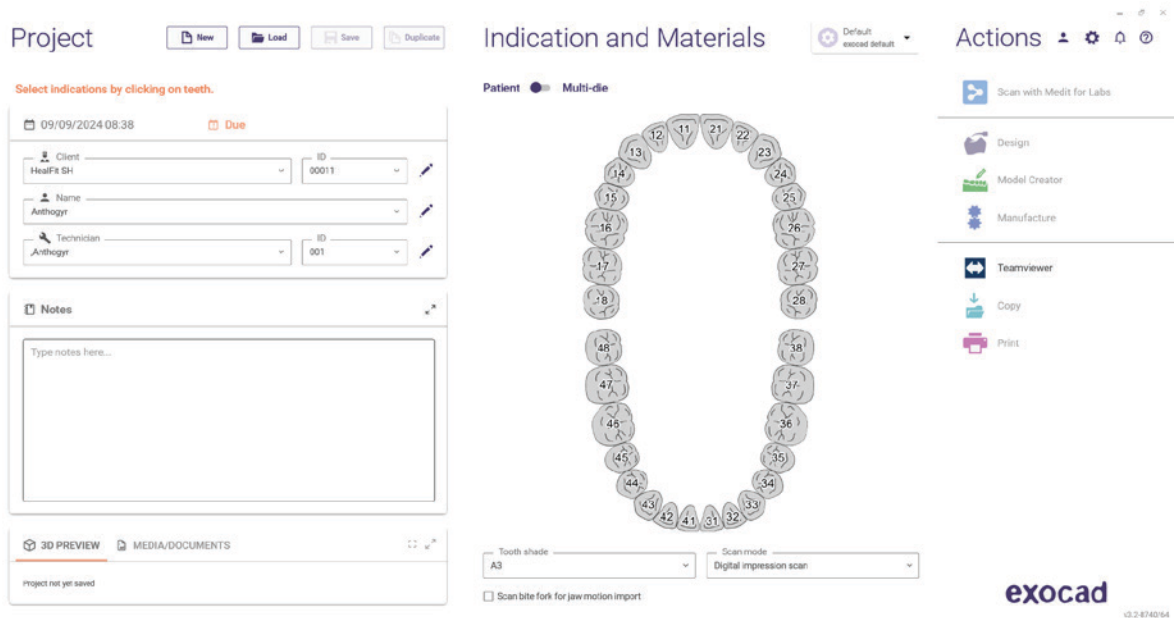


The screenshot shows the Anthogyr software interface. The 'Project' panel on the left contains fields for Client (HealFr SH), Name (Anthogyr), and Technician (Anthogyr), along with a 'Notes' section. The 'Indication and Materials' panel in the center displays a 3D model of a dental arch with numbered teeth. The 'Actions' panel on the right lists various options like 'Scan with Medit for Labs', 'Design', 'Model Creator', 'Manufacture', 'Teamviewer', 'Copy', and 'Print'. The 'exocad' logo is visible in the bottom right corner.

2. Wählen Sie den Zahn:
 - a. Im nächsten Fenster: Wählen Sie, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt, die Art der Versorgung, das gewünschte Material und andere Einstellungen aus.
Die Schritte im Einzelnen: (a) Art der Krone > (b) Material > (c) Farbe > (d) Verschraubt > (e) Scankörper in Hauptscan.
Klicken Sie auf OK, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

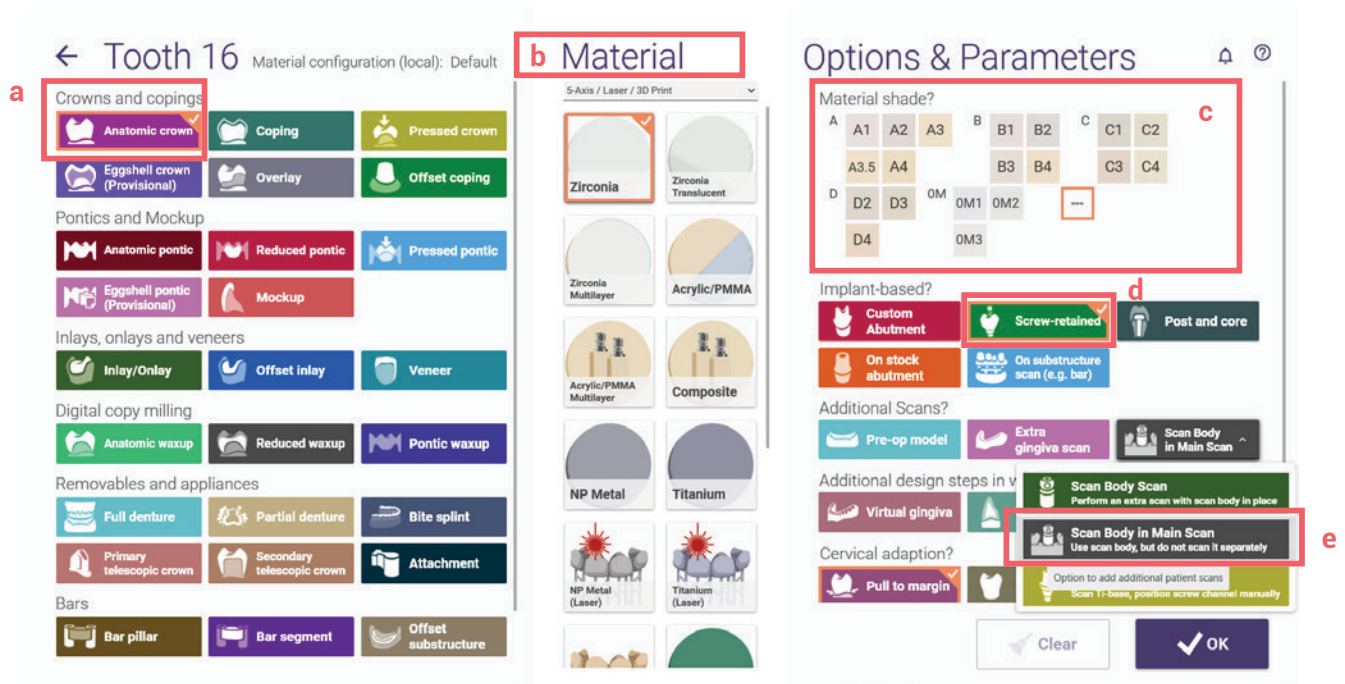


The screenshot shows the 'Tooth 16' configuration window. The 'Material' tab is selected, showing a grid of material options. The 'Options & Parameters' panel on the right contains various settings. Red boxes and letters 'a' through 'e' highlight specific options: 'a' points to 'Anatomic crown', 'b' points to the 'Material' tab, 'c' points to the 'Material shade?' grid, 'd' points to 'Screw-retained', and 'e' points to 'Scan Body in Main Scan'.

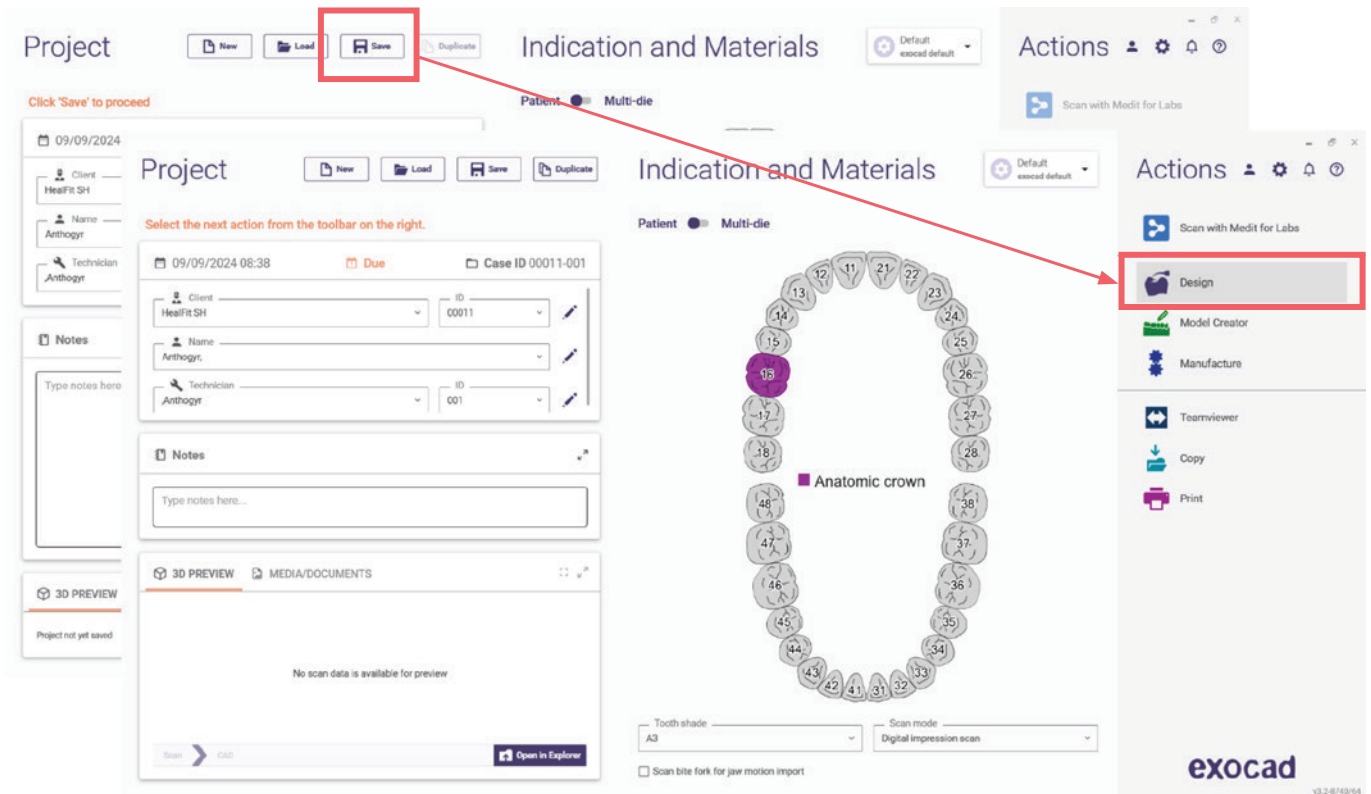

Hinweis: Bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren, muss die Healfit® SH in der Scandatei identifiziert werden.



3. Klicken Sie im nächsten Fenster auf „Save“ (Speichern) und dann auf „Design“.
4. Wählen Sie im nächsten Fenster die Scandatei (mit Healfit® SH als Scankörper).

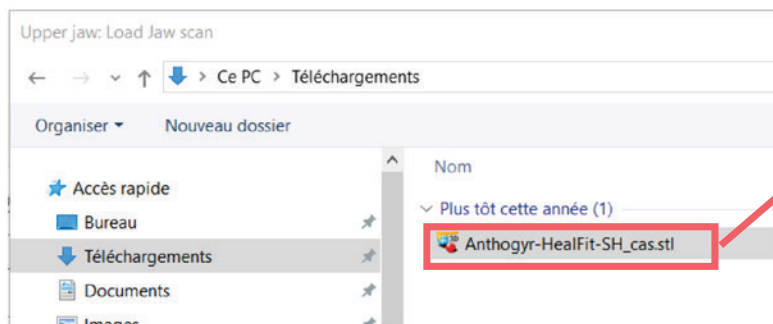


Beispiel für eine Scandatei

5. Stellen Sie die Scanausrichtung wie gewohnt ein.

6. Wählen Sie die richtige Bibliothek aus.
 - a. Nachdem Sie die Bibliothek ausgewählt haben, schneiden Sie den HealFit® SH (Scankörper) mit dem Schieberegler aus. Siehe nachstehende Abbildungen.

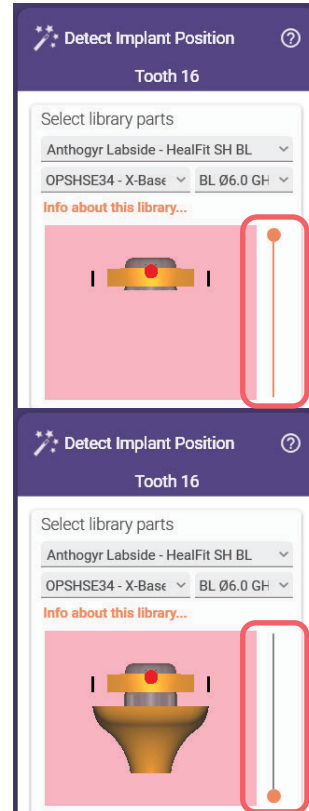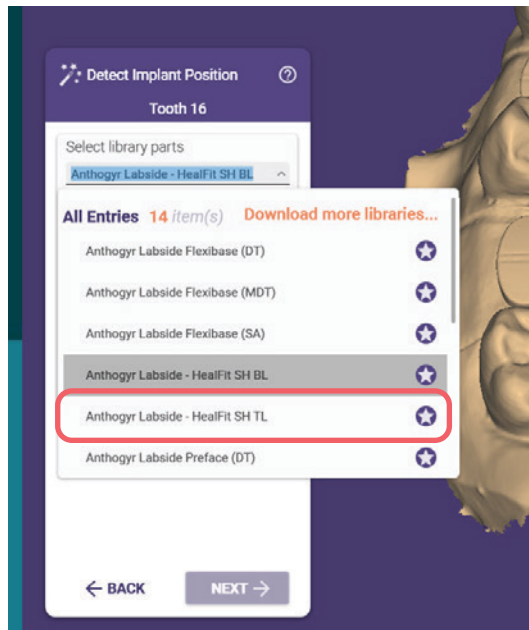

- b. Fahren Sie mit der Ausrichtung fort.
Bitte überprüfen Sie stets, ob die Ausrichtung erfolgreich durchgeführt wurde, indem Sie beim Matching die STRG-Taste drücken. Die nachstehenden Abbildungen zeigen ein Beispiel:

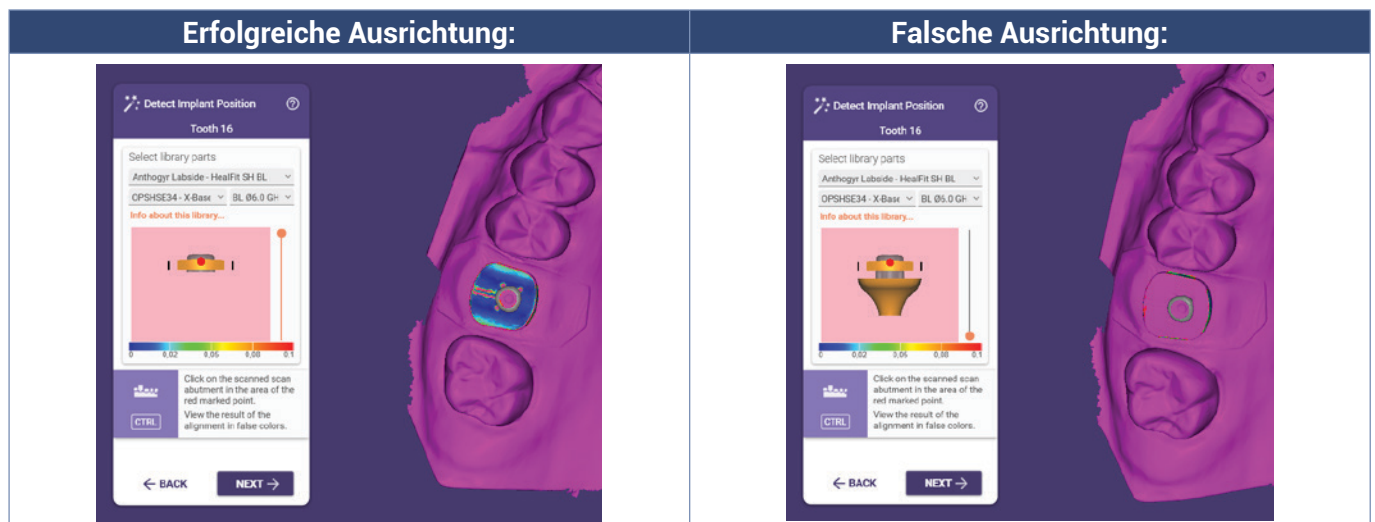


7. Legen Sie das Emergenzprofil fest.
8. Platzieren Sie den Modellzahn.



9. Legen Sie im Abschnitt „Abutment Bottoms“ (Sekundärteilböden) die Form der Healfit® SH so gut wie möglich fest (manuell bearbeiten).
 - a. Dazu müssen Sie die Scanmarker-Geometrie einblenden (unten in orange). Sie können auch den Kieferscan und die ganze anatomische Schicht ausblenden, um eine bessere Sicht zu erhalten.



- b. Sobald der Scanmarker angezeigt wird, können Sie so viele Punkte wie nötig setzen, um der Healfit® SH Form zu folgen (Ansicht von oben).

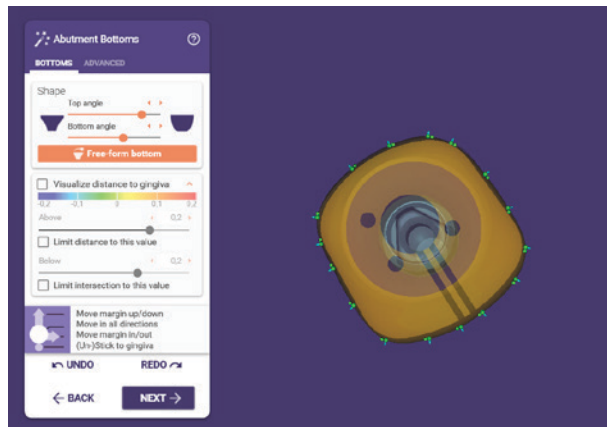

- c. Sie können auch den oberen und unteren Winkel ändern, um eine Gingivaform zu erhalten, die der Healfit® SH ähnelt, und die Option „Free-from bottom“ (Freiformen) verwenden (Abbildung unten links). Bei Bedarf können Sie einige Optionen im Bereich „Advanced“ (Erweitert) ändern (Abbildung unten rechts).

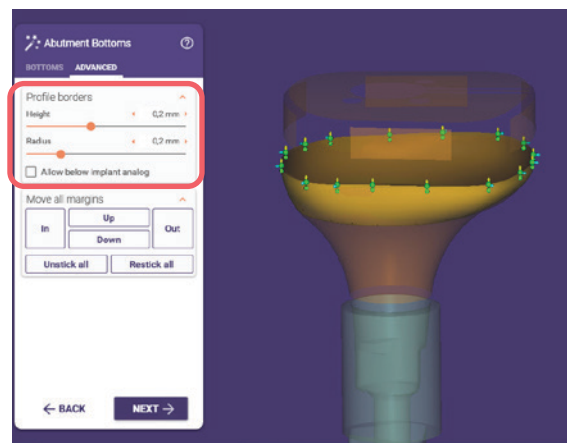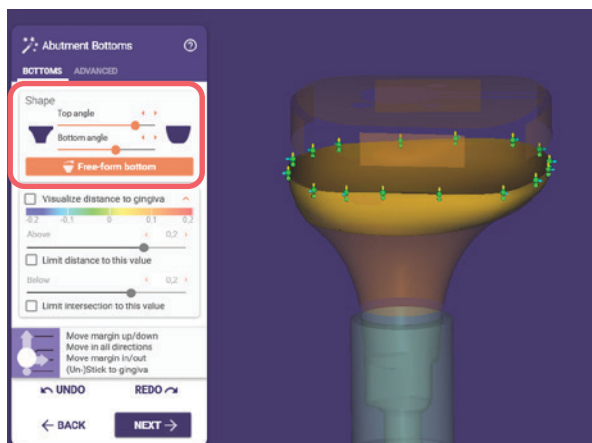


10. Ändern Sie im nächsten Modul, dem Modul Freiformen, ggf. die prothetische Versorgung (glätten, Durchdringungen abschneiden usw.).
11. Schließen Sie das Design der prothetischen Versorgung wie gewohnt ab.


B. 3SHAPE

Option 1: Manuell


1. Füllen Sie das Auftragsformular wie gewohnt aus:
 - a. Auftragsnummer, Kunde, Patienteninformationen ...
 - b. Wählen Sie den Zahn/die Zähne und die Art der Versorgung aus.
 - c. Wählen Sie die richtige Bibliothek aus:
 - i. Entsprechend der im Mund des Patienten eingesetzten Healfit® SH: Healfit® SH **BL** oder **TL**
 - ii. In Bezug auf den für die prothetische Versorgung verwendeten Titanbasen-Typ (Flexibase®, X-Base® gerade oder abgewinkelt, PreFace)

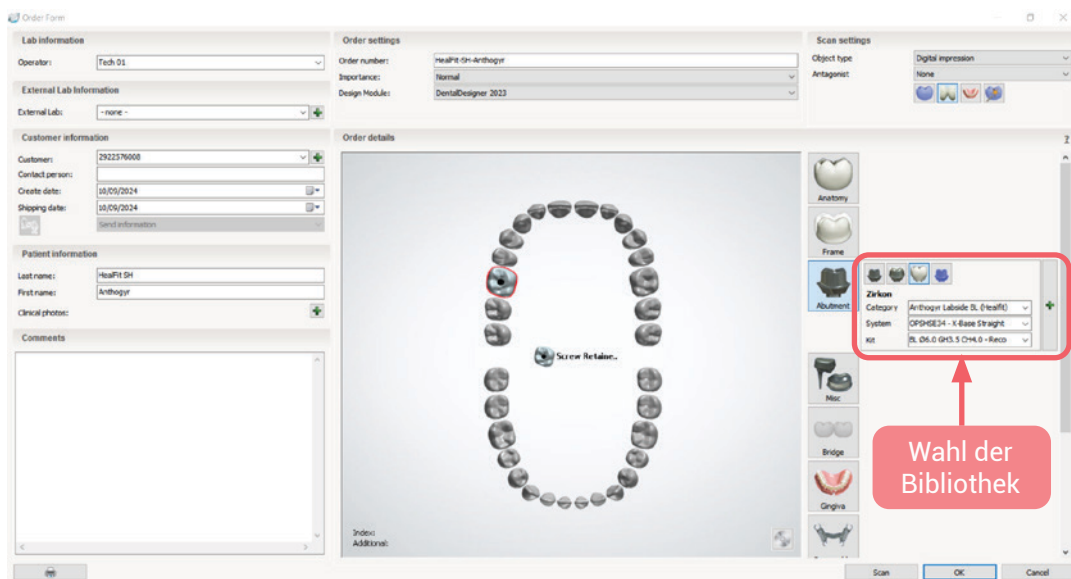

2. Importieren Sie die Scandatei.
3. Legen Sie die okklusale Ausrichtung wie gewohnt fest und ändern Sie ggf. die Scandatei.
4. Richten Sie den Scankörper aus, in diesem Fall Healfit® SH.
Er kann auf zweierlei Weise ausgerichtet werden: an einem Punkt oder an drei Punkten.
 - a. Ausrichtung an einem Punkt:

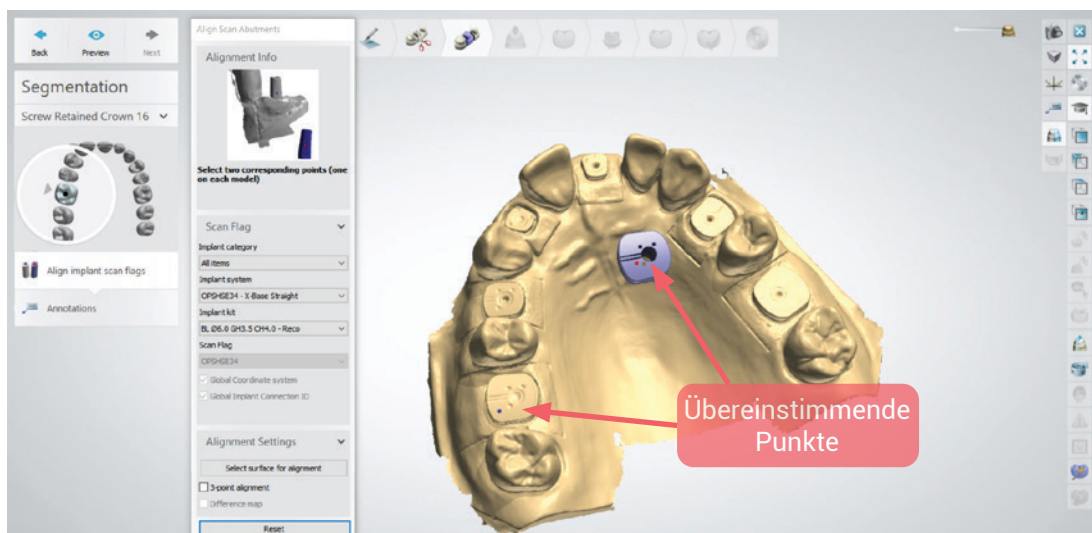


- b. Ausrichtung an drei Punkten: Sie müssen das Kontrollkästchen „3-point alignment“ (3-Punkte-Ausrichtung) aktivieren, bevor Sie in jeder Datei auf die übereinstimmenden Punkte klicken.

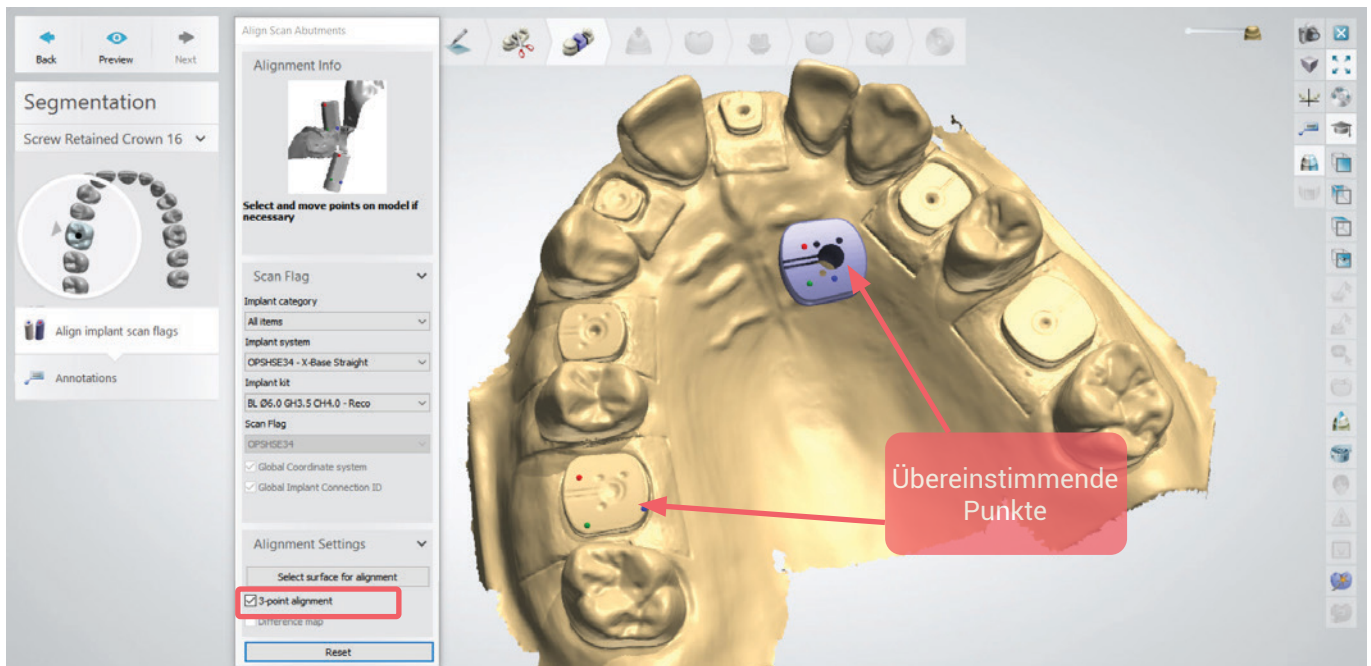


Wenn bei einer dieser Ausrichtungsoptionen eine Fehlermeldung angezeigt wird, ändern Sie bitte die Ausrichtung durch die andere Option.



Bitte überprüfen Sie stets, ob die Ausrichtung erfolgreich war. Verwenden Sie dazu die Option „Difference map“ (Unterschiedsübersicht). Wenn die Ausrichtung korrekt ist, muss die Farbe grau sein, wie in der nachstehenden Abbildung.

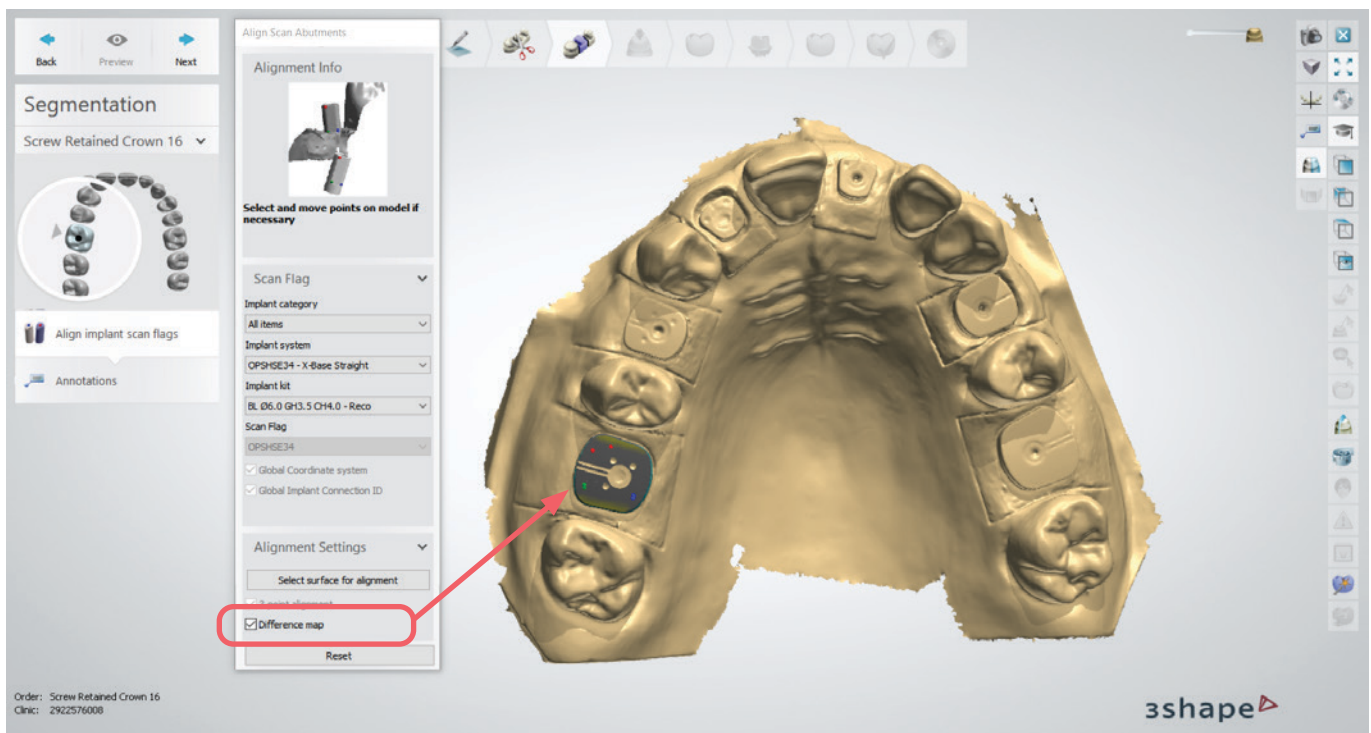


5. Legen Sie die Einschubrichtung fest.
6. Platzieren Sie den Modellzahn.
7. Legen Sie das Emergenzprofil fest, bitte formen Sie die Healfit® SH so weit wie möglich (manuell bearbeiten).
 - a. Dazu müssen Sie die Scankörper-Geometrie einblenden. Außerdem können Sie die digitale Abformung, das anatomische Vordesign und andere Schichten ausblenden, um eine bessere Sicht zu erhalten.

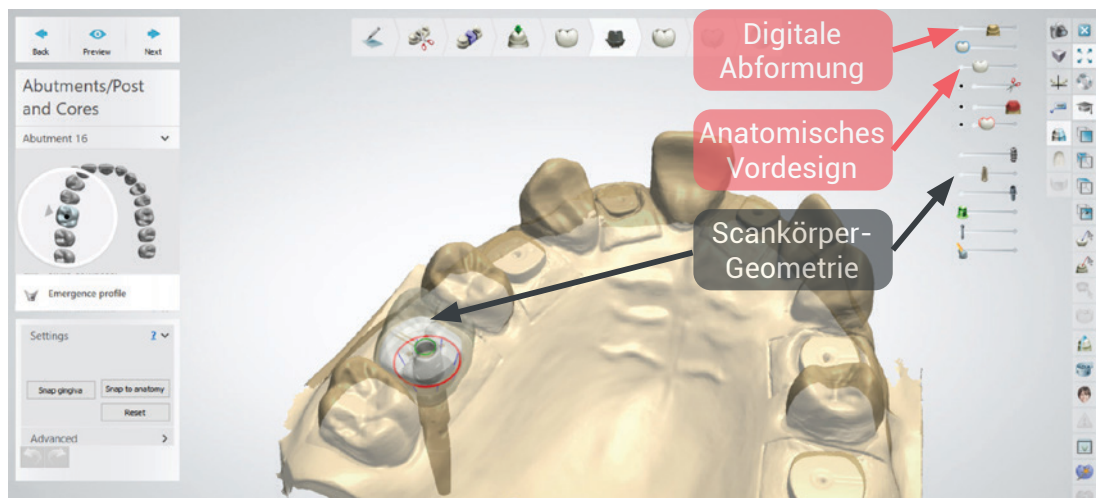

- b. Sobald der Scankörper angezeigt wird, können Sie so viele Punkte wie nötig setzen, um der Healfit® SH Form im Emergenzprofil zu folgen (Ansicht von oben, rote Punkte). Sie müssen auch den Gingivabereich ändern (Frontalansicht, grüne Punkte). Unten ist in Grau die Form des Scankörpers und das Emergenzprofil dargestellt.

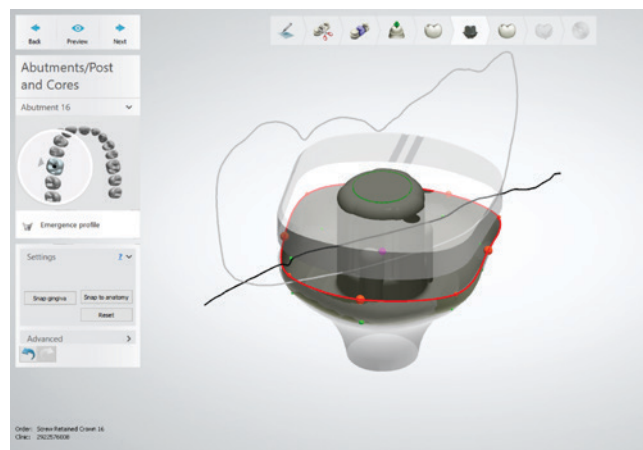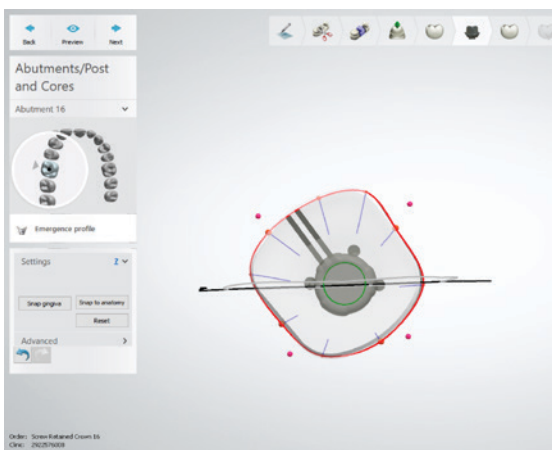

8. Im nächsten Modul (Anatomiedesign) können Sie die prothetische Versorgung mit dem Wachsmesser modellieren, um Oberflächen hinzuzufügen, zu löschen oder zu glätten. Zeigen Sie zur Fertigstellung der prothetischen Versorgung bitte stets transparent die Schicht des Scankörpers an, um zu kontrollieren, ob das Design zum Healfit® SH Profil passt.

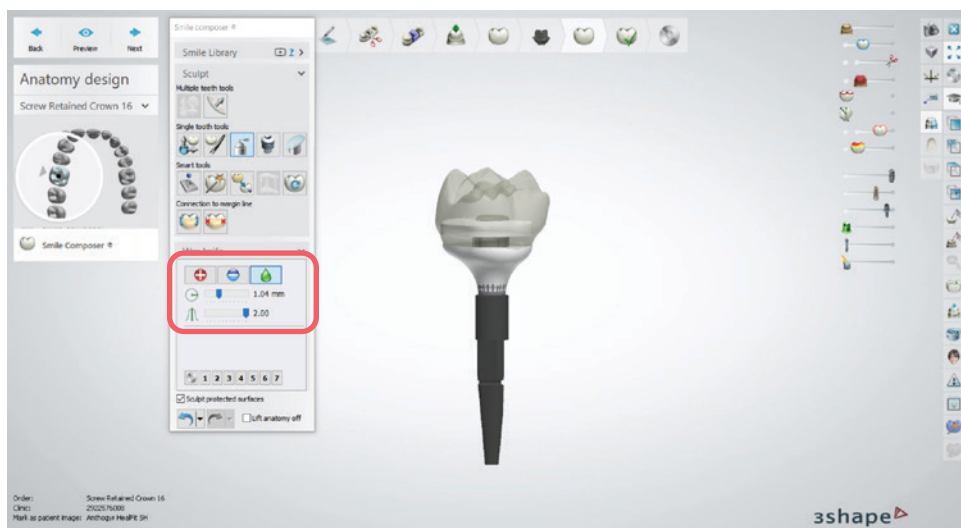


9. Schließen Sie das Design der prothetischen Versorgung wie gewohnt ab.

Option 2: Halbautomatisch (nur für die Version 2024)


Für die Version 3Shape 2024 steht neben dem manuellen Verfahren (wie bei den Vorgängerversionen) eine weitere Option zur Verfügung: das halbautomatische Verfahren.

Für diese Option müssen Sie die Option **Snap exit profile** (Am Austrittsprofil schneiden) aktivieren. Die Führungspunkte bewegen sich auf dem Gingivaprofil (rote und grüne Punkte in der Abbildung unten) und werden automatisch entsprechend der Scan-körper-Geometrie platziert. **Die Platzierung dieser Punkte kann bei Bedarf modifiziert werden**, um das Gingivaprofil in diesem Schritt anzupassen.

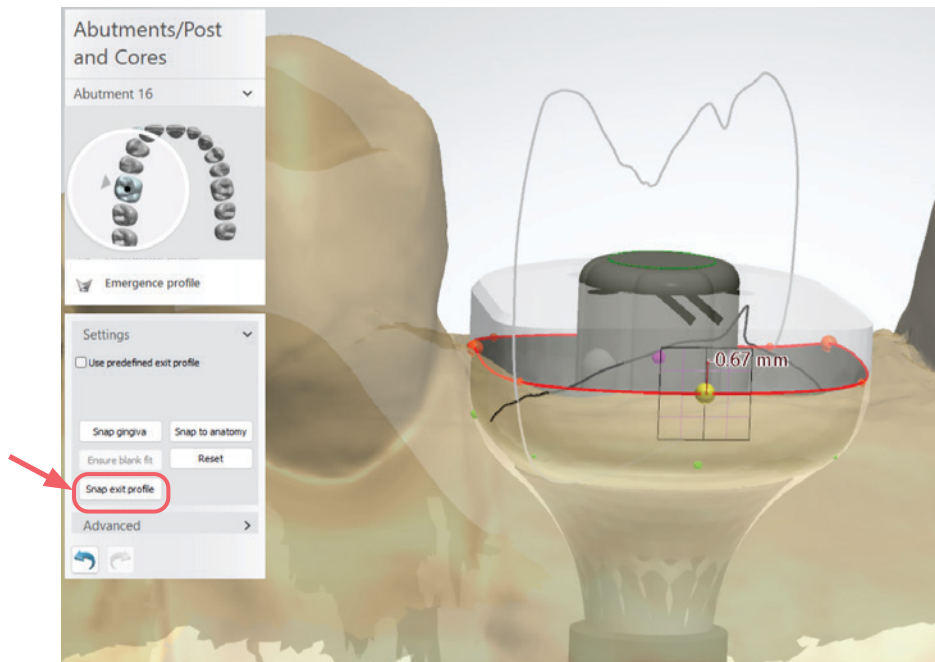


Wenn Sie das Gingivaprofil zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, können Sie dies im Schritt „Fertigstellen“ tun. Gehen Sie dazu zu:

(a) Sculpt Anatomy design (Anatomiedesign modellieren) > (b) Sculpt toolkit (Modellierungstoolkit) > (c) Wählen Sie zwischen den verschiedenen vorgeschlagenen Tools > (d) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sculpt protected surfaces** (Geschützte Flächen modellieren) > (e) Jetzt können Sie mit der Modifizierung des Gingivaprofils beginnen.

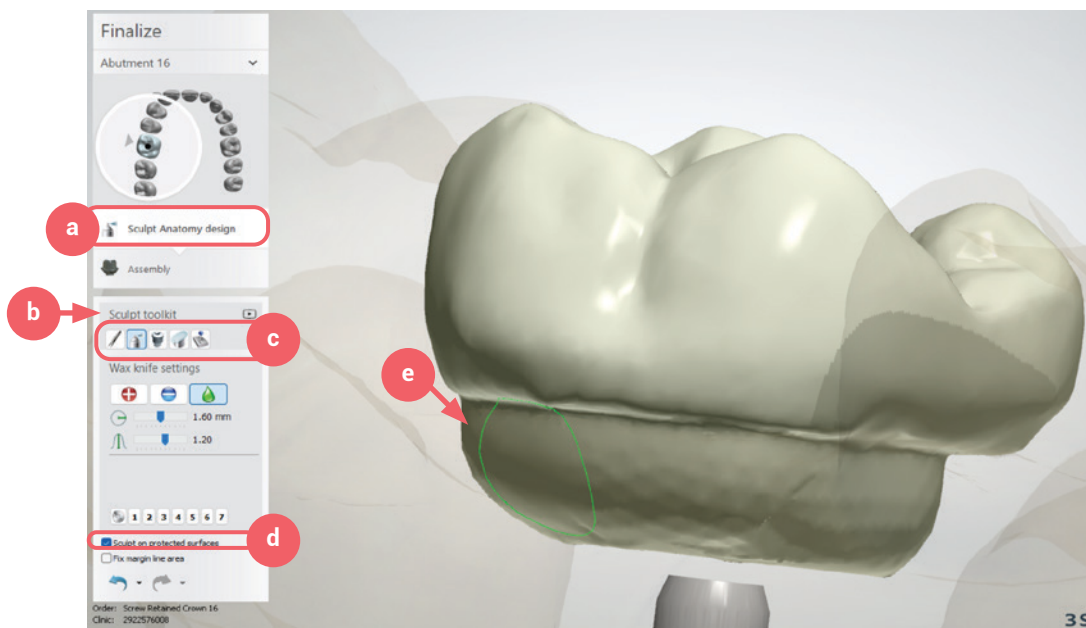


C. DENTAL WINGS / CARES

- Bitte füllen Sie das Auftragsformular wie gewohnt aus.
- Fügen Sie die Scandatei und dann die 3D-Datei der Healfit SH Form als Gingivadatai hinzu.

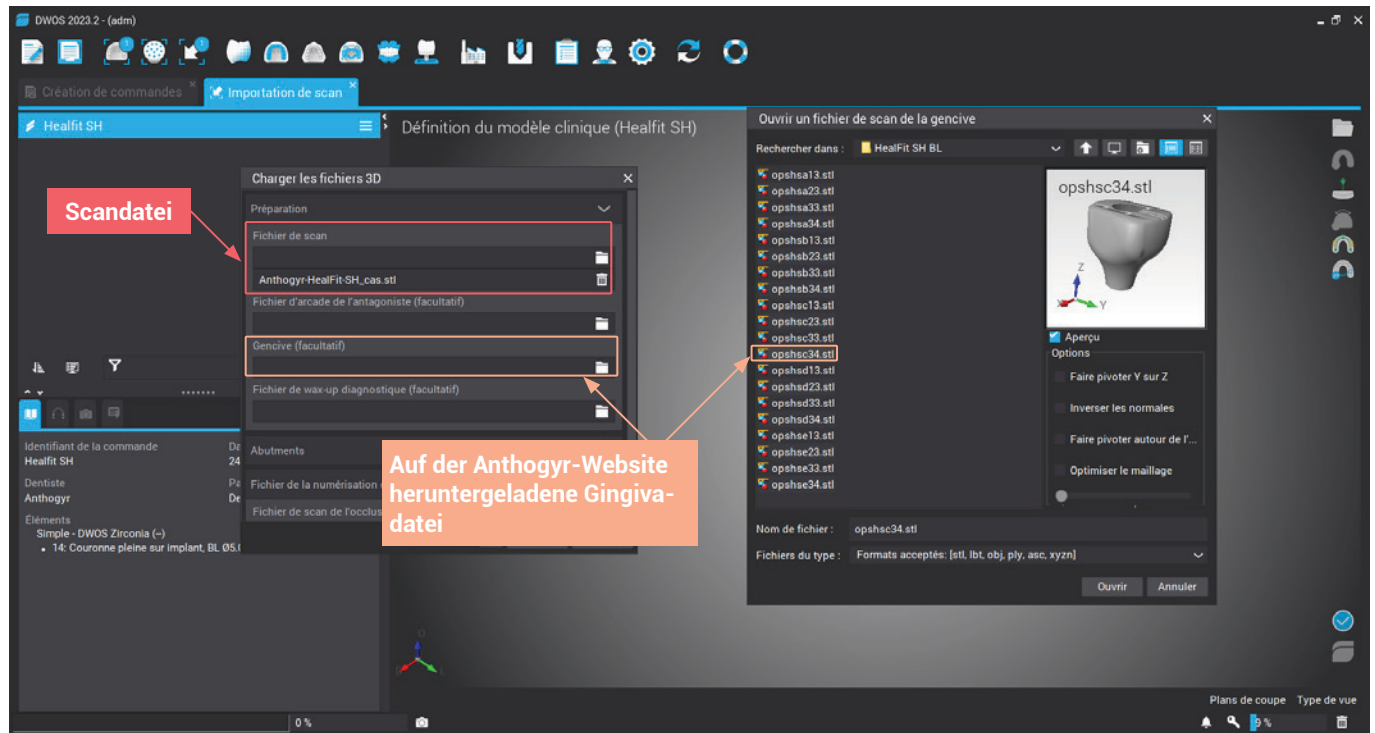


- Fahren Sie mit der Ausrichtung des Scankörpers fort und wählen Sie die Referenz der Healfit® SH, die im Mund des Patienten eingesetzt ist.

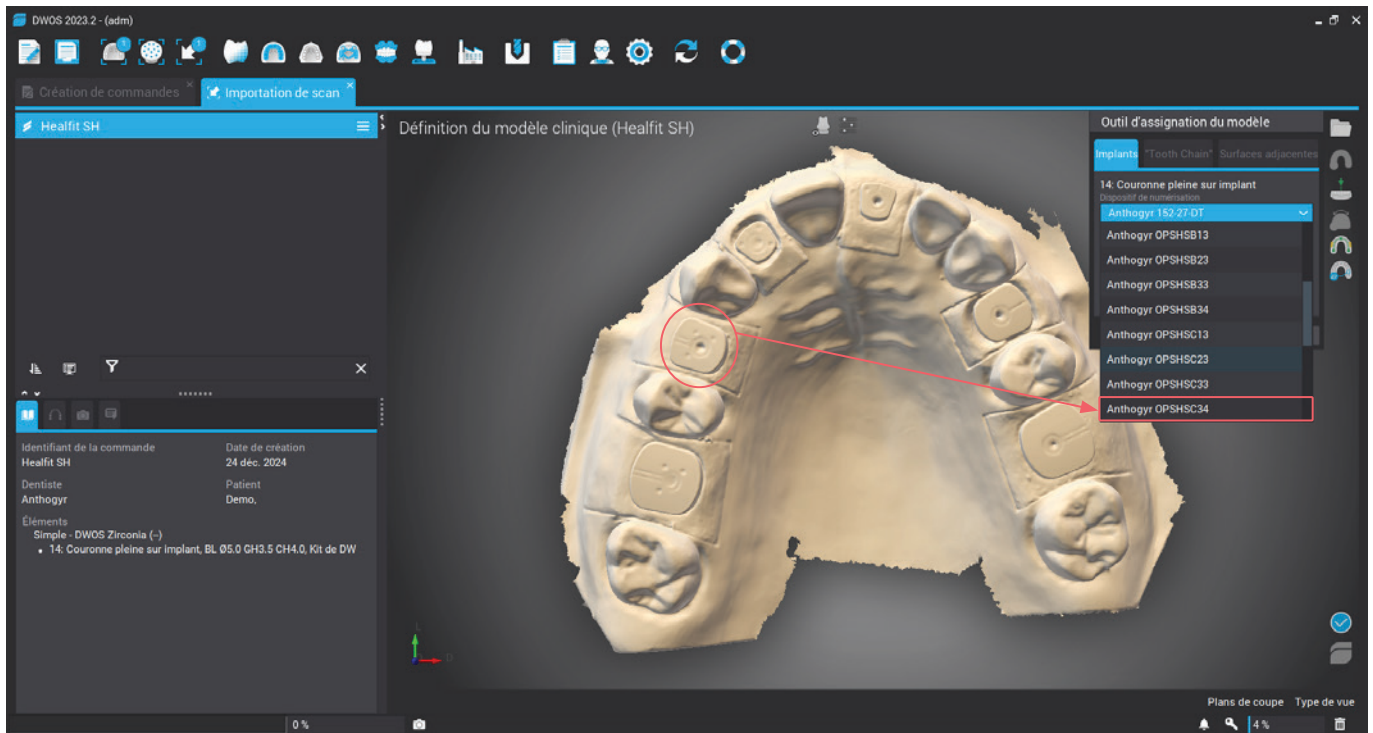

- Richten Sie anschließend die 3D-Datei (Gingivadatai) wie folgt mit der Scandatei aus. Dazu stehen zwei Optionen zur Verfügung:

Option 1: Automatisch


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gingivadatai. Wählen Sie im neuen Menü die Option „Reposition gingiva“ (Gingiva neu positionieren).

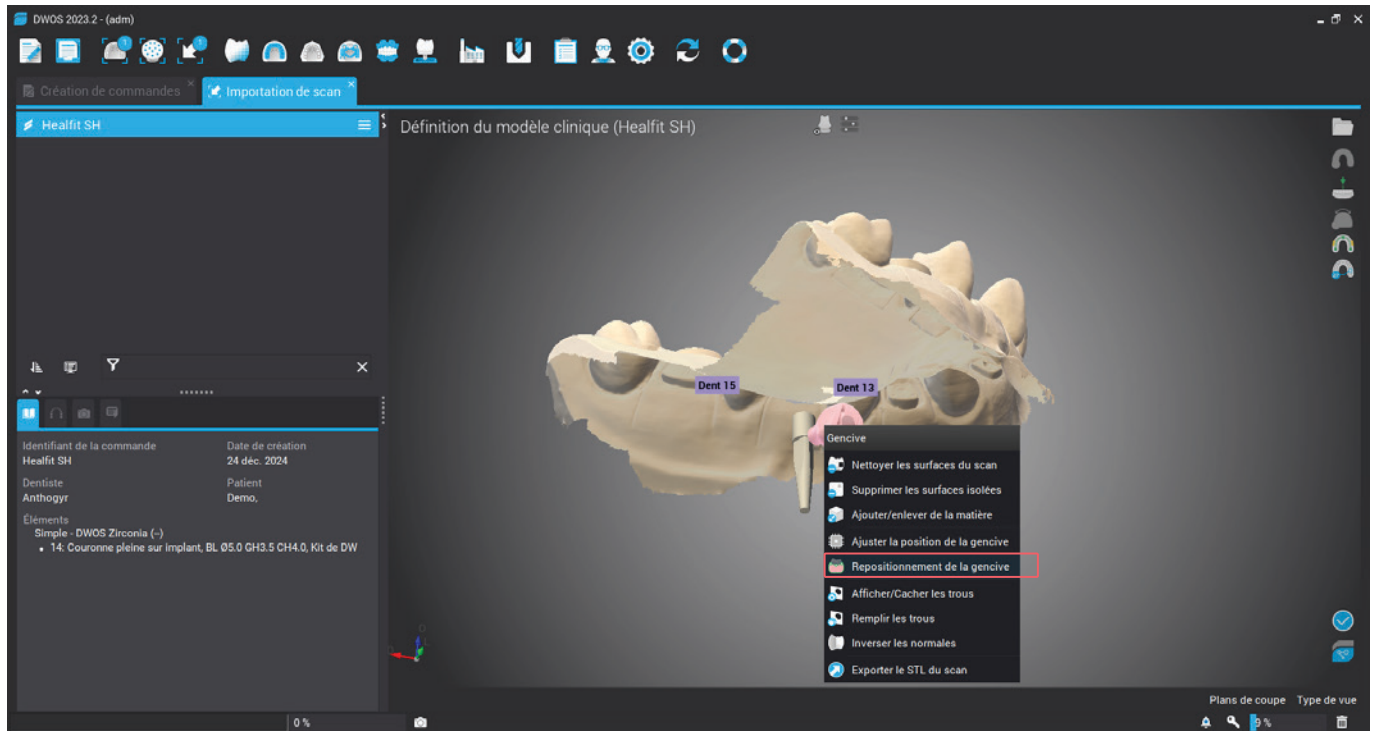

2. Führen Sie im neuen Fenster die Ausrichtung mit **3 Punkten durch** und klicken Sie dann auf „**Precise repositioning**“ (**Präzise Neupositionierung**).
3. Prüfen Sie, ob die Ausrichtung korrekt durchgeführt wurde.




4. Klicken Sie auf „OK“, wenn die Ausrichtung erfolgreich war. Wenn nicht, fahren Sie bitte mit Option 2 fort.

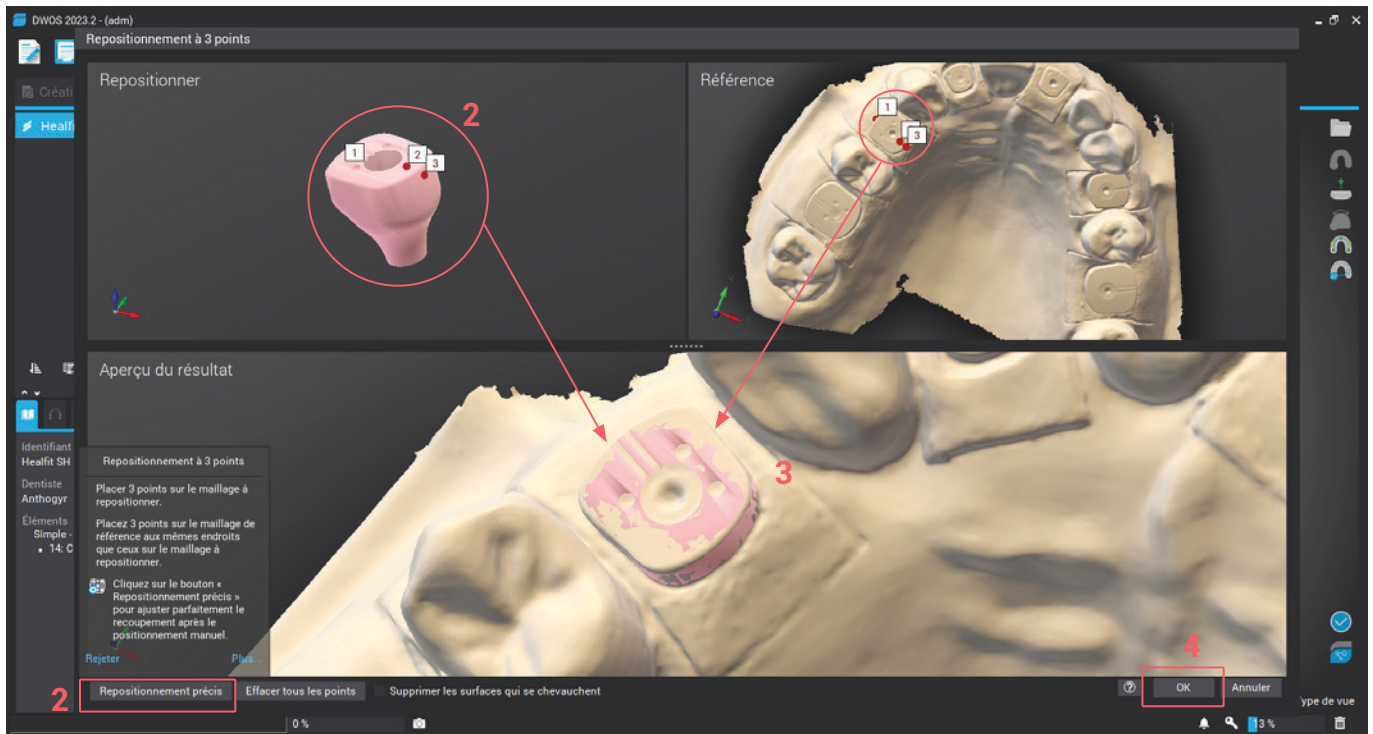


Option 2: Manuell


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gingivadatei. Wählen Sie im neuen Menü die Option „Reposition gingiva“ (Gingiva neu positionieren).

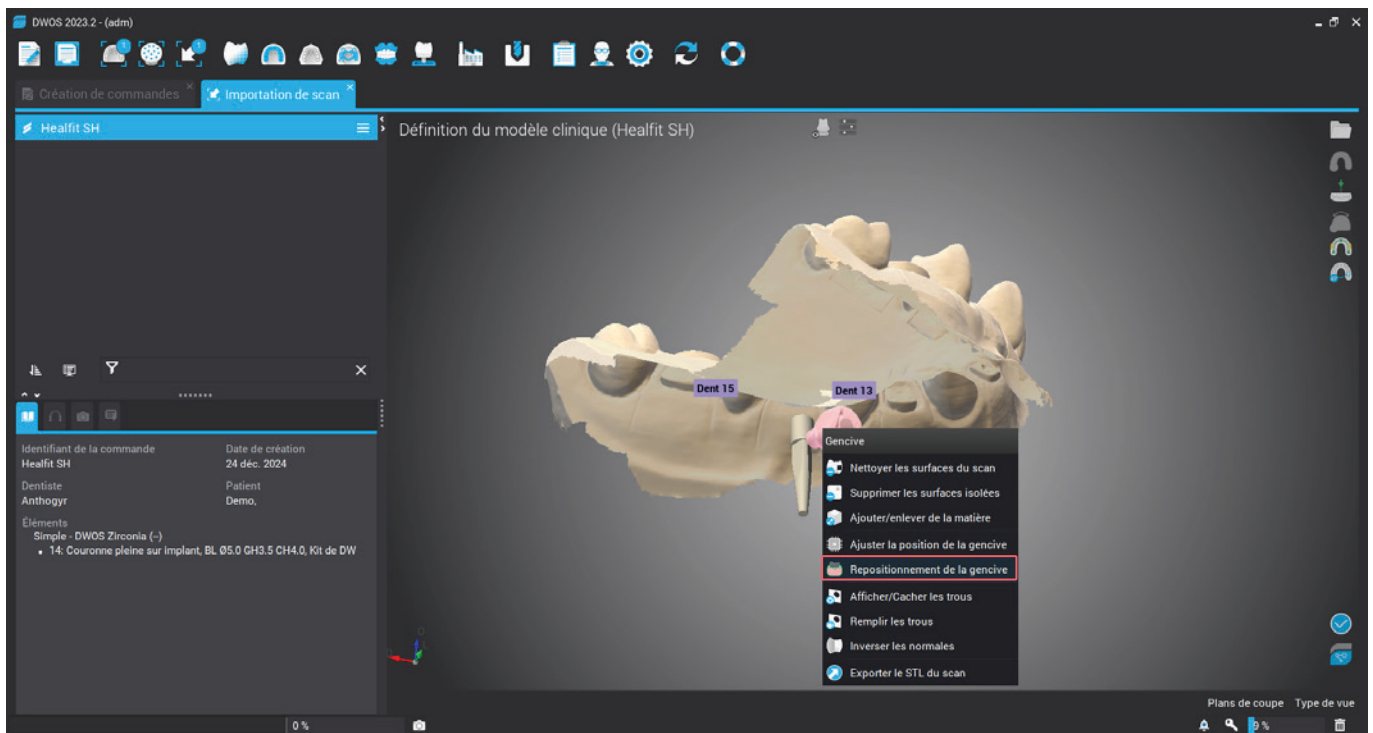


2. Führen Sie im neuen Fenster die Ausrichtung mit **3 Punkten** durch und klicken Sie dann auf „OK“.

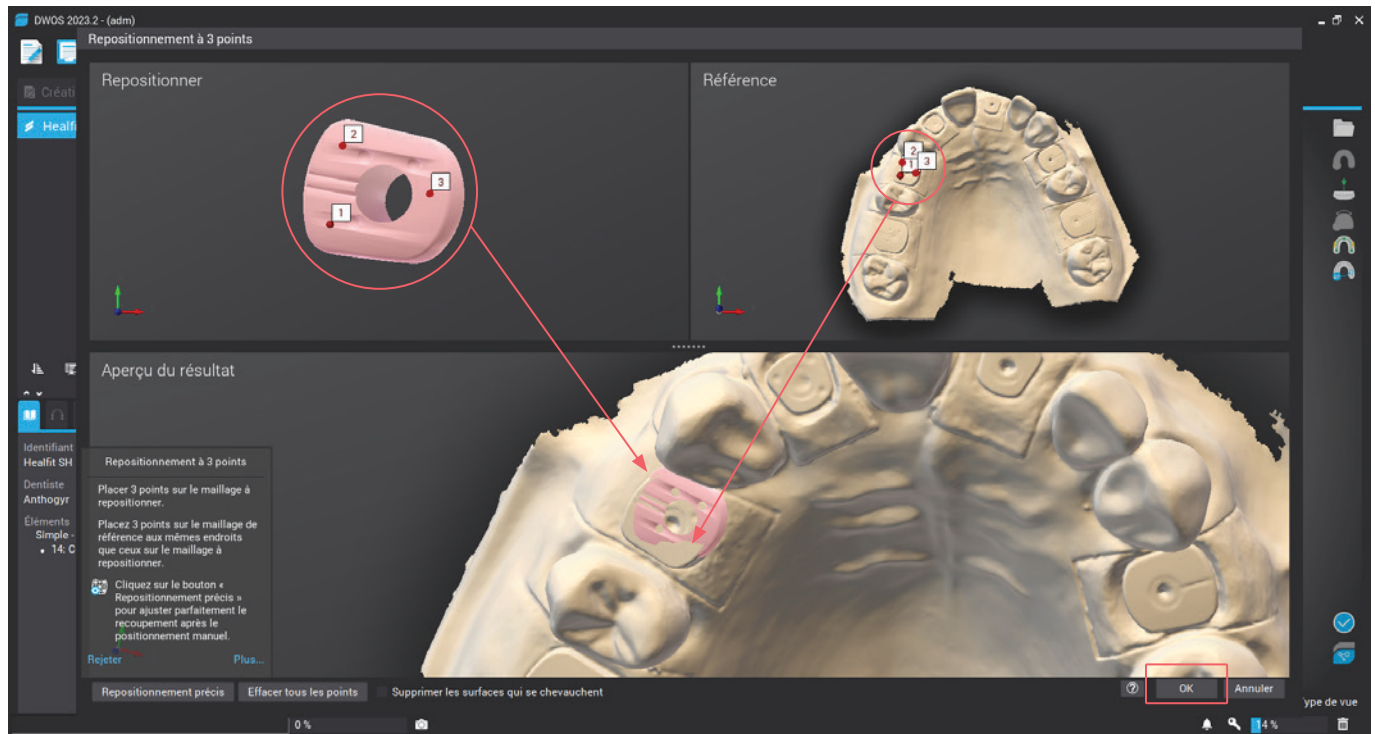


3. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste (auf die rosafarbene Datei > Gingivadatai) und wählen Sie die Option „Adjust gingiva position“ (Gingivaposition anpassen).

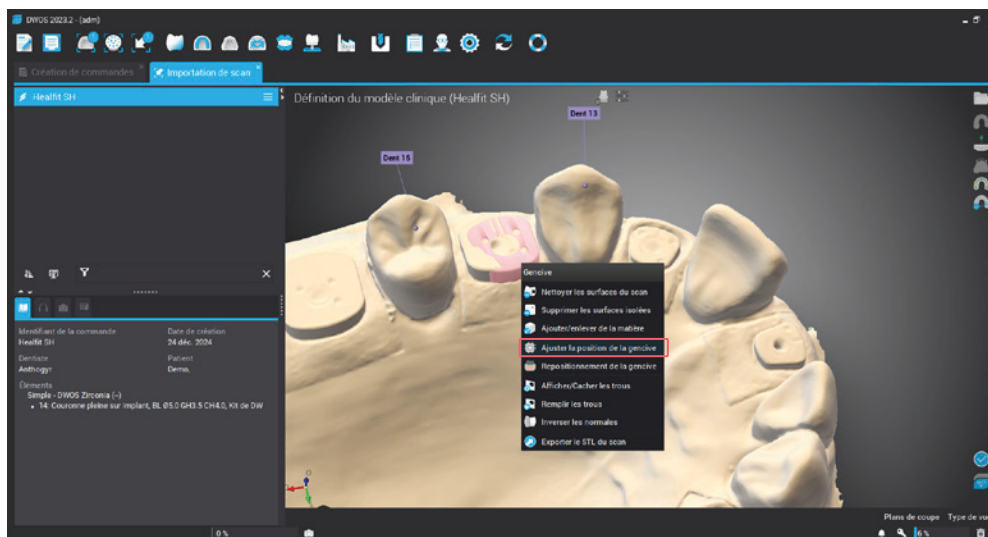


4. Sie können nun die angezeigten Punkte (rosa für die Position und gelb für die Rotation) oder die rechten Fenster (Pfeile) verwenden, um die Position/Rotation der Gingivadatai zu ändern. Bei Bedarf können Sie die Schrittweite ändern.

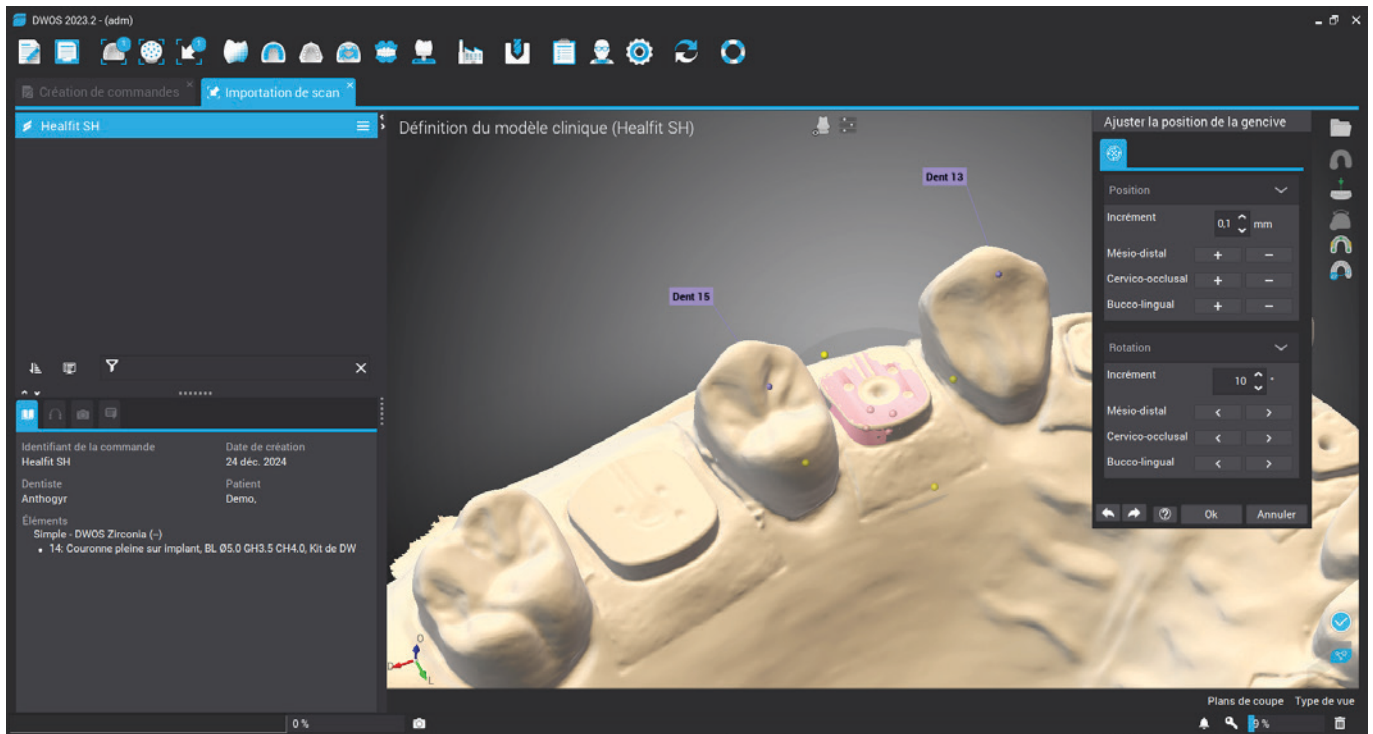


- Nach der Ausrichtung der Gingivadatai fahren Sie wie gewohnt mit der Gestaltung der prothetischen Versorgung fort. Zur Gestaltung des Gingivaprofils müssen Sie die Gingivadatai anzeigen, indem Sie darauf klicken. Sie können auch die Transparenz der Datai ändern.

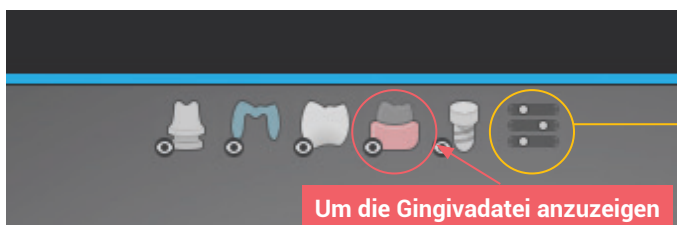



Um die Transparenz der Gingivadatai zu ändern


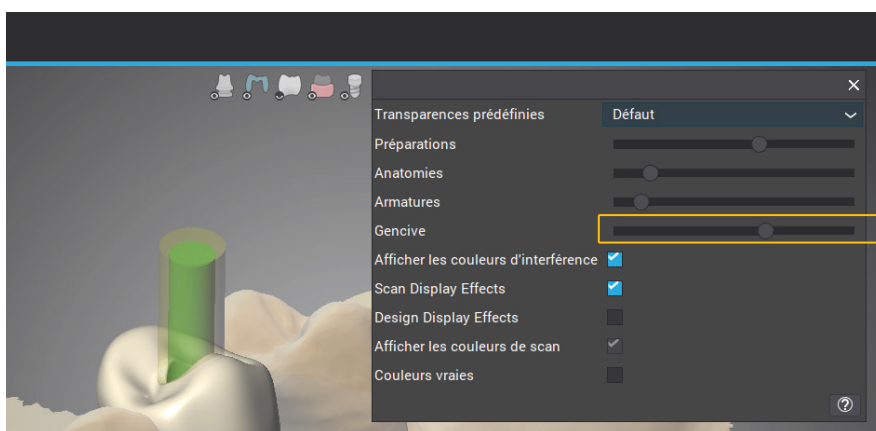


- Zur Modifizierung des Gingivaprofils klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei der prothetischen Versorgung. Je nach Präferenz können Sie verschiedene Optionen verwenden:

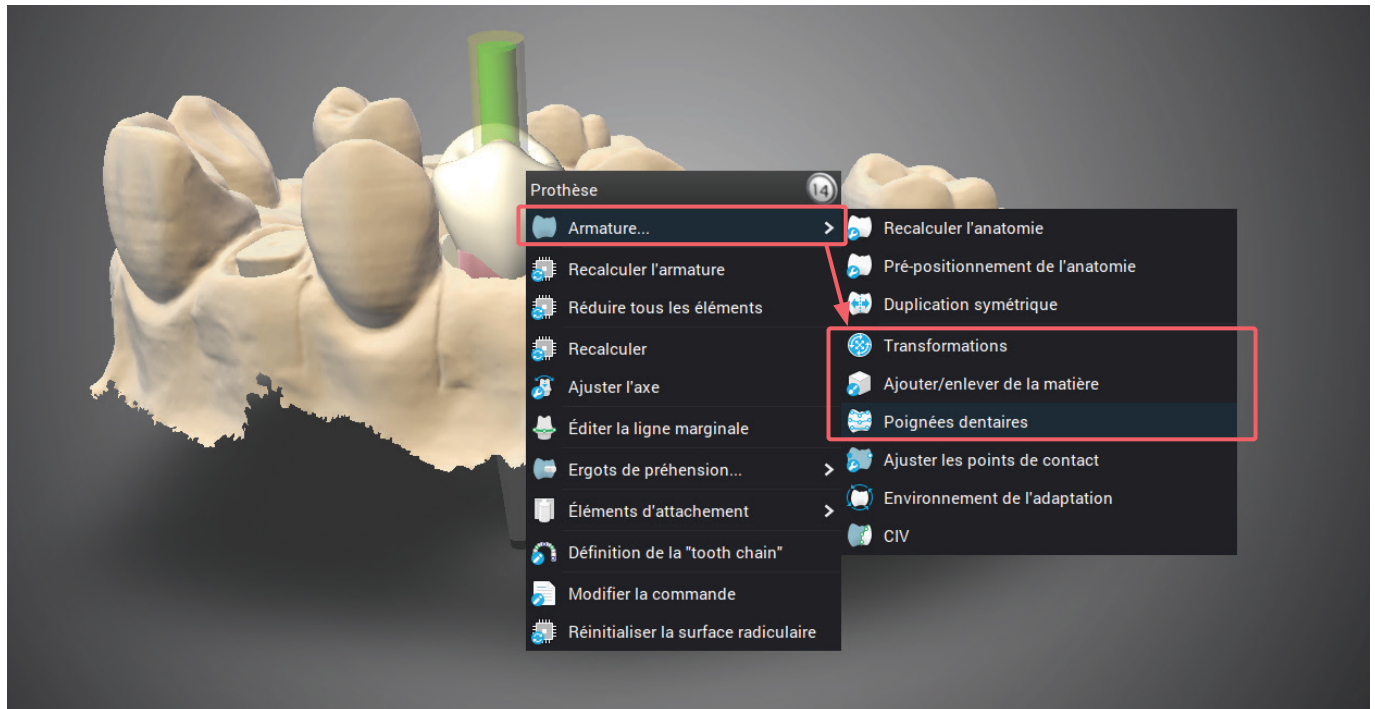

ARTIKELNUMMERN DER KOMPONENTEN

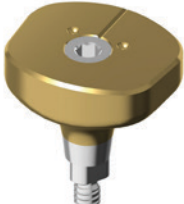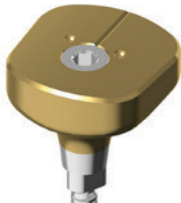Axiom [®] BL Healfit [®] SH				ARTIKEL-NR.
	Healfit[®] SH – Form A			
	Ti-6Al-4V ELI			
	Inkl. Healfit[®] Schraube M1.6			
	Healfit [®] SH	GH 1,5	KH 3,0	OPSHSA13
	Healfit [®] SH	GH 2,5	KH 3,0	OPSHSA23*
	Healfit[®] SH – Form B			
	Ti-6Al-4V ELI			
	Inkl. Healfit[®] Schraube M1.6			
	Healfit [®] SH	GH 1,5	KH 3,0	OPSHSB13
	Healfit [®] SH	GH 2,5	KH 3,0	OPSHSB23*
	Healfit[®] SH – Form C			
	Ti-6Al-4V ELI			
	Inkl. Healfit[®] Schraube M1.6			
	Healfit [®] SH	GH 1,5	KH 3,0	OPSHSC13
	Healfit [®] SH	GH 2,5	KH 3,0	OPSHSC23*
	Healfit[®] SH – Form D			
	Ti-6Al-4V ELI			
	Inkl. Healfit[®] Schraube M1.6			
	Healfit [®] SH	GH 1,5	KH 3,0	OPSHSD13
	Healfit [®] SH	GH 2,5	KH 3,0	OPSHSD23*
	Healfit[®] SH – Form E			
	Ti-6Al-4V ELI			
	Inkl. Healfit[®] Schraube M1.6			
	Healfit [®] SH	GH 1,5	KH 3,0	OPSHSE13
	Healfit [®] SH	GH 2,5	KH 3,0	OPSHSE23*
	Healfit [®] SH	GH 3,5	KH 3,0	OPSHSE33
	Healfit [®] SH	GH 3,5	KH 4,0	OPSHSE34

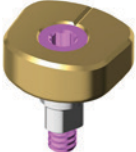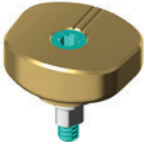Axiom® TL Healfit® SH				ARTIKEL-NR.
	Healfit® SH – Form A			
	Ti-6Al-4V ELI			
	Inkl. bereits montierter Healfit® Schraube M1.6			
	Healfit® SH	KH 2,5	Ø4,0 / N	TSHSA-N200*
	Healfit® SH	KH 4,0	Ø4,0 / N	TSHSA-N400
	Healfit® SH – Form B			
	Ti-6Al-4V ELI			
	Inkl. bereits montierter Healfit® Schraube M1.6			
	Healfit® SH	KH 2,5	Ø4,0 / N	TSHSB-N200*
	Healfit® SH	KH 4,0	Ø4,0 / N	TSHSB-N400
	Healfit® SH	KH 2,5	Ø4,8 / R	TSHSB-R200
	Healfit® SH	KH 4,0	Ø4,8 / R	TSHSB-R400
	Healfit® SH – Form C			
	Ti-6Al-4V ELI			
	Inkl. bereits montierter Healfit® Schraube M1.6			
	Healfit® SH	KH 2,5	Ø4,0 / N	TSHSC-N200*
	Healfit® SH	KH 4,0	Ø4,0 / N	TSHSC-N400
	Healfit® SH	KH 2,5	Ø4,8 / R	TSHSC-R200
	Healfit® SH	KH 4,0	Ø4,8 / R	TSHSC-R400
	Healfit® SH – Form D			
	Ti-6Al-4V ELI			
	Inkl. bereits montierter Healfit® Schraube M1.6			
	Healfit® SH	KH 2,5	Ø4,8 / R	TSHSD-R200
	Healfit® SH	KH 4,0	Ø4,8 / R	TSHSD-R400*
	Healfit® SH – Form E			
	Ti-6Al-4V ELI			
	Inkl. bereits montierter Healfit® Schraube M1.6			
	Healfit® SH	KH 2,5	Ø4,8 / R	TSHSE-R200
	Healfit® SH	KH 4,0	Ø4,8 / R	TSHSE-R400*

* Abgebildetes Produkt

Healfit® SH Instrument		ARTIKEL-NR.
	Healfit® SH Höhenmesser	OPJCSHS
	Ti-6Al-4V ELI	

NOTIZEN

NOTIZEN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTIZEN



2237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches - France
Tel. +33 (0)4 50 58 02 37
www.anthogyr.com
Email: contact@anthogyr.com
Validity Date: 2025-05
REF: HEALFIT-SH_NOT_DE
SAP code: 708005
Index: B

