


axiom[®]

MULTI LEVEL[®]

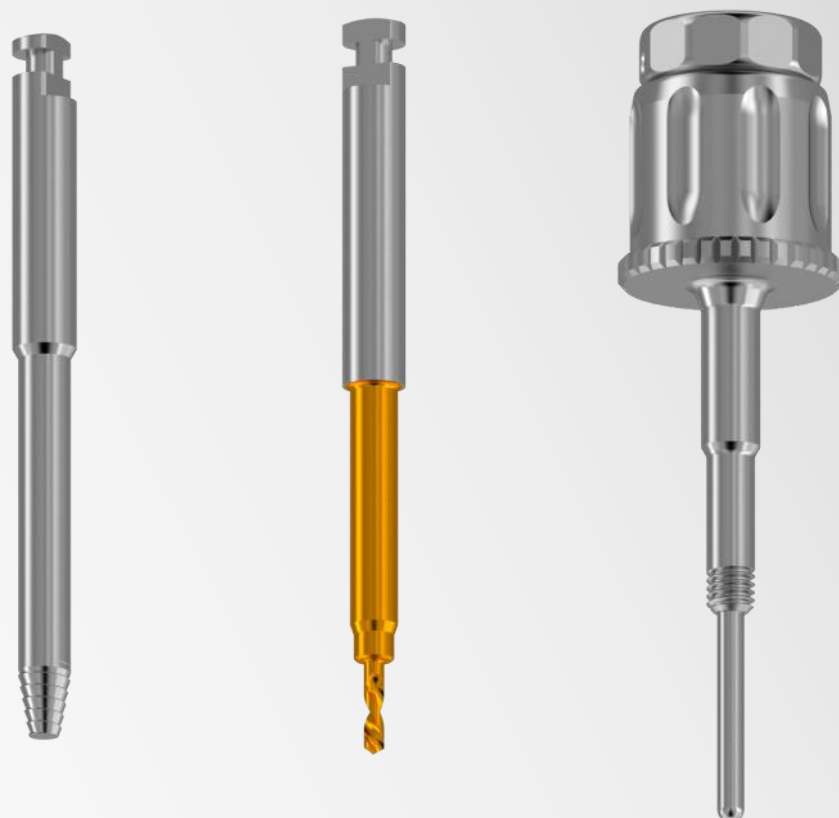

Service Set
axiom[®]BL—TL

Gracias por su confianza que ha depositado en nosotros al elegir trabajar con la solución de implantes Axiom® Multi Level®.

Anthogyr ofrece diversas soluciones de servicio para resolver problemas asociados a los sistemas de implantes Axiom® Bone Level et Axiom® Tissue Level.

Su éxito será el nuestro. Nuestra red comercial y nuestro equipo de expertos están a su entera disposición para proporcionarle cualquier información complementaria que usted pudiera necesitar.

Anthogyr



Esta instrucción de uso no es válida para los kits OPKITRET, INKITEXPR.

Deben usarse de acuerdo con las instrucciones de uso disponibles en el sitio ifu.anthogyr.com con el código de búsqueda: OPKITRET o INKITEXPR.

INSTRUCCIONES DISPONIBLES ONLINE

ifu.anthogyr.com

Puede encontrar las instrucciones de uso (guías y manuales) para los implantes Anthogyr y sus componentes protésicos en formato PDF en nuestra web ifu.anthogyr.com



¿CÓMO USAR ESTA WEB?

Este portal web contiene las instrucciones de uso de los productos Anthogyr.

Para encontrar las instrucciones de su producto, por favor siga estos pasos:

1- Introduzca el número de referencia de su producto, la descripción o el código GTIN (Global Trade Item Number) en el campo de búsqueda.

2- Inicie la búsqueda.

Puede ver las instrucciones para el producto que buscó en formato PDF en línea y/o imprimirlas si le es más cómodo.

3- Seleccione un idioma.

Nuestras instrucciones de uso están disponibles en varios idiomas. Para seleccionar un idioma, haga clic en el menú de idiomas.

Este sitio está optimizado para una resolución de pantalla de 1024 x 768 px para mostrar instrucciones en PC o Mac con las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer 11 o superior, Safari 7.0 o superior (sólo Mac), Chrome 43 o superior, Firefox 38.0 y superior, e iOS y Android.

ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES:

Las instrucciones de uso se actualizan regularmente y se identifican con el pictograma "Nuevo". Se recomienda disponer de la última actualización para minimizar los posibles riesgos en el paciente.

Por esta razón, le sugerimos que evite las copias de seguridad y le recomendamos que consulte siempre las instrucciones en el portal de Anthogyr.

Para acceder a instrucciones archivadas, haga clic en "Ver las antiguas versiones del documento".

También puede recibir copias impresas de las instrucciones sin coste adicional.

Para recibir copias en papel, rellene el formulario disponible en la pestaña "Contacto" o incluya una solicitud con su siguiente pedido.

Recuerde especificar el idioma deseado.

El documento se le entregará en un plazo de 5 días laborables.

Quedamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia que desee dejarnos en la pestaña "Contacto".

→ Avisos y recomendaciones

Las instrucciones contenidas en este documento describen las diferentes fases del procedimiento quirúrgico y de la restauración protésica a seguir para el sistema de implantes Axiom® Multi Level®. Algunos aspectos generales propios de la colocación de implantes se recuerdan a título informativo. No se trata en ningún caso de un documento exhaustivo sobre la práctica de implantes y prótesis, susceptible de ser utilizado por el lector para realizar algún tipo de reclamación.

FORMACIÓN:

Los componentes Axiom® Multi Level® sólo deben ser utilizados por profesionales que hayan sido formados previamente en la práctica de implantes y / o técnicas protéticas, y que estén equipados para este tipo de intervenciones con la infraestructura necesaria. Se requiere un conocimiento correcto de las técnicas quirúrgicas y protéticas para la utilización de este sistema. Anthogyr ofrece formaciones específicas para las diferentes técnicas.

La técnica quirúrgica y protésica del sistema Axiom® Multi Level® se realiza exclusivamente en combinación con los componentes e instrumentos originales, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Anthogyr declina toda responsabilidad en caso de colocación no conforme con el presente manual; en caso de uso de implantes, piezas protéticas o instrumentos ajenos al sistema.

La evaluación clínica del paciente y la elección del tratamiento son responsabilidad exclusiva del profesional. El diámetro y la longitud del implante deben ser determinados de antemano por el odontólogo, dependiendo de la situación clínica. Se recomienda informar a los pacientes de los riesgos potenciales asociados a los tratamientos con implantes: edemas, hematomas, hemorragia, complicaciones periodontales, daño nervioso transitorio o permanente, infecciones locales o sistémicas, inflamación, fracturas óseas, aflojamiento o fractura del implante, dehiscencia, problemas estéticos, aspiración o deglución de algún componente, traumatismo iatrogénico, etc.



MATERIAL:

El usuario del sistema es responsable del seguimiento y mantenimiento necesarios para la detección de eventuales complicaciones lo antes posible, así como para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de los productos. El seguimiento y el mantenimiento forman parte del tratamiento del especialista formado en la práctica de cirugía con implantes dentales.

Así mismo es el profesional el responsable de definir los diferentes ajustes de su equipo (velocidad de rotación de los instrumentos, caudal de irrigación, etc.) en función de cada caso clínico, y verificar el buen estado de cada uno antes de cada intervención.

El instrumental reutilizable se debe limpiar, descontaminar, secar y esterilizar antes de cada intervención, (incluso cuando se utilicen por primera vez), de acuerdo con los protocolos en vigor en los hospitales y clínicas. La organización del quirófano, la preparación del personal quirúrgico y del paciente (pre-medicación, anestesia, etc.) se realizarán según los protocolos en vigor y bajo la responsabilidad del implantólogo.

En ningún caso Anthogyr será considerado responsable de cualquier daño que derive de una manipulación o uso defectuoso.

Con el fin de evitar la deglución o aspiración de componentes pequeños, es recomendable, asegurarlos atándolos fuera de la boca con un hilo de sutura, o colocando una gasa en el interior de la boca, sujeta en todo momento por una pinza. Verificar siempre que se cambie un instrumento, el correcto funcionamiento en el contra-ángulo, o en la llave, aplicando una ligera tracción para asegurar que están correctamente fijados y comprobar el comportamiento de cada elemento en el desplazamiento hacia fuera de la cavidad bucal.

CONSERVACIÓN:

Hemos prestado una atención especial en la producción de nuestros productos, y garantizamos que se ha realizado un control exhaustivo de fabricación en todos los productos disponibles para la venta. Con el fin de garantizar su integridad, se recomienda conservarlos en su embalaje original a una temperatura ambiente entre 15 y 30 ° C, lejos de la humedad y de la luz directa del sol.

Proteger los embalajes del polvo y no almacenar en el mismo lugar que disolventes y pinturas que contengan solventes o sustancias químicas.

Los productos deben ser utilizados antes de la fecha de caducidad, indicada en la etiqueta de trazabilidad.

Si el embalaje está dañado, o si se presenta defecto aparente a la apertura del producto, es imperativo no utilizar el producto e informar a Anthogyr o al distribuidor, de la naturaleza del defecto, las referencias y los números de lote de los componentes en cuestión.

Las especificaciones técnicas contenidas en estas instrucciones se proporcionan sólo con fines indicativos y no pueden ser objeto de ninguna reclamación.

El sistema de implantes Axiom® Multi Level® no es apto para animales.

Los productos de un solo uso no deben ser reutilizados, ni esterilizados de nuevo (por riesgo de contaminación y riesgo de alteración de las superficies funcionales).

La reproducción o difusión de estas instrucciones de uso sólo puede hacerse con la previa autorización de la sociedad Anthogyr, la cual se reserva el derecho de modificar las características técnicas de sus productos y / o realizar cambios o mejoras en el sistema Axiom® Multi Level® sin previo aviso.


El sistema de implantes Axiom® Multi Level® no es compatible con otros sistemas de Anthogyr ni de la competencia.

En caso de duda, el usuario debe ponerse en contacto con la empresa Anthogyr.

La publicación de este manual anula y sustituye todas las versiones anteriores.

Explicación de los símbolos y pictogramas			
	Dispositivo esterilizado por irradiación		No reutilizar, producto de un solo uso
	Número de fabricación del producto		Proteger de la luz
	Número comercial del producto		No utilizar si el embalaje esta con desperfectos
	Fecha de fabricación del producto		Conservar en lugar seco
	Fecha de caducidad del producto		Límite de temperatura entre 15 y 30°C
	Atención: observar las instrucciones de utilización		Fabricante
	Dispositivo no estéril		Conformes con la Directiva comunitaria 93/42 CEE enmendada por la Directiva 2007/47/CEE
	Esterilización por autoclave fuera del embalaje		Torque de apriete
	No esterilizar por autoclave		Global Trade item Number
	Conforme a las normas vigentes en Rusia		La ley federal estadounidense limita la venta de este dispositivo a los dentistas autorizados para ello o conforme a su decisión.
	No reesterilizar		Consultar las precauciones de uso

CUADRO SINÓPTICO

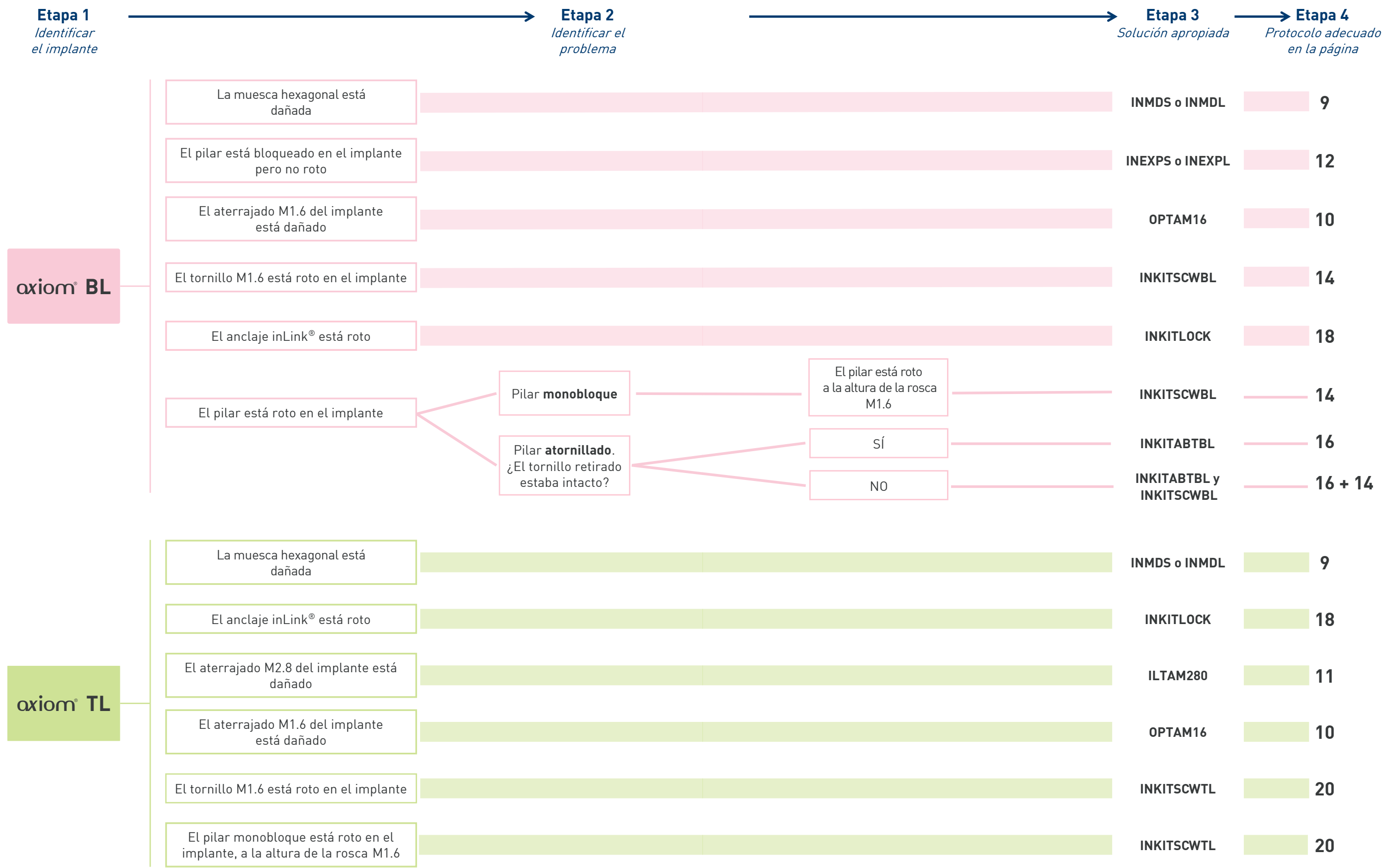


KITS de servicio

Las soluciones disponibles para Axiom® BL y TL dependen del análisis del caso clínico:


- Conocimiento preciso del problema: consulte el **CUADRO SINÓPTICO** para pedir la solución apropiada.
- Conocimiento del sistema del implante únicamente: pida el/los KIT(s) de servicio abajo indicado(s).

⚠ Estos KITS se entregan **sin esterilizar**, deben limpiarse y esterilizarse siguiendo las indicaciones del manual de limpieza y esterilización disponible en la página ifu.anthogyr.com (código de búsqueda: INEXPS, por ejemplo).

1. Este KIT se utiliza con implantes Axiom® BL

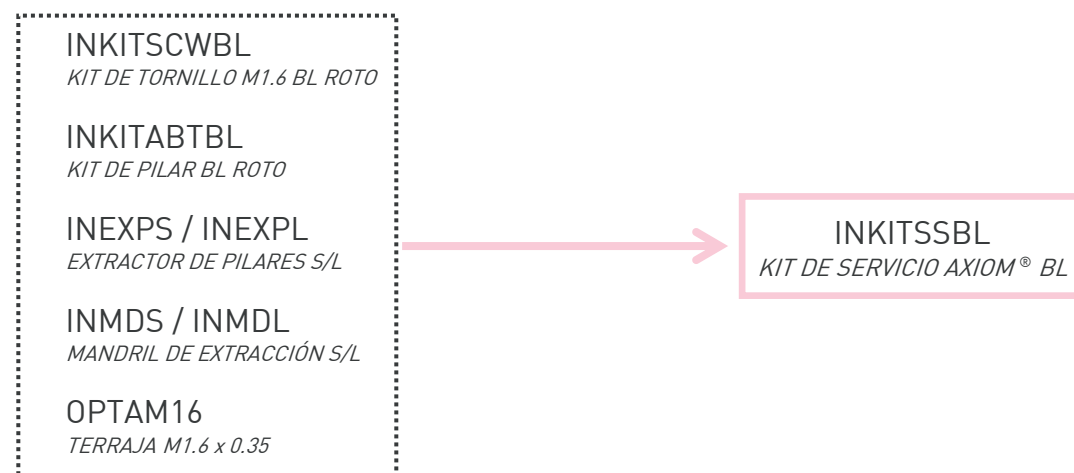


2. Este KIT se utiliza con implantes Axiom® TL

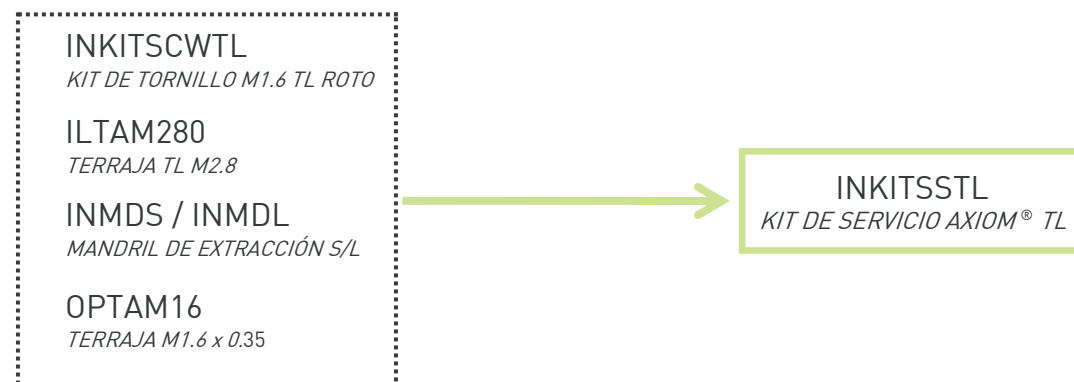

3. Este KIT se utiliza con una conexión inLink®



INMDS / INMDL - Mandril de extracción S / L

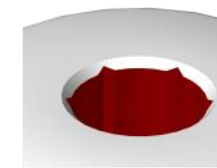

Indicación:

Retirar un tornillo / componente de la prótesis con la muesca hexagonal dañada.

Composición:



(1) A fin de obtener unos resultados clínicos óptimos, recomendamos limitar a 10 el número de usos de estos componentes.


Material necesario además del KIT:




Protocolo:

Etapas 1: Limpie y esterilice los instrumentos.
Limpie la muesca hexagonal.

Etapas 2: Utilice el mandril de extracción INMDS o INMDL con la llave manual INCM para enganchar la muesca hexagonal y extraer el tornillo; gire en sentido **antihorario** ejerciendo presión.

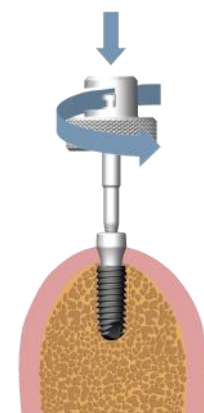

OPTAM16 - Terraja M1.6 x 0.35

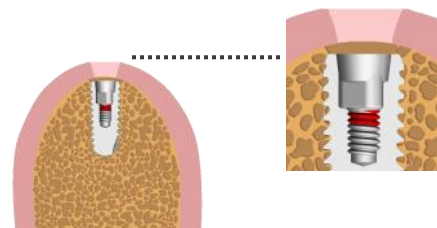

Indicación:

Ajustar el aterrajado M1.6 dañado de un implante Axiom® BL o TL.

Composición:




Terraja M1.6 x 0.35
OPTAM16⁽¹⁾

⁽¹⁾ A fin de obtener unos resultados clínicos óptimos, recomendamos limitar a 10 el número de usos de estos componentes.

Protocolo:


Etapas 1: Limpie y esterilice los instrumentos.
Limpie la conexión del implante.

Etapas 2: Con cuidado de mantenerse en el eje del implante, perforo progresivamente sin forzar. Después de cada media vuelta, afloje la terraja un cuarto de vuelta. Desenrosque la terraja regularmente para limpiarla.

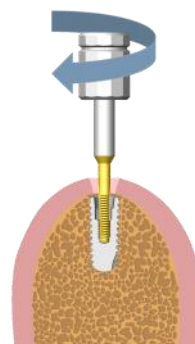

Etapas 3: Limpie minuciosamente la conexión del implante antes de colocar un componente protésico nuevo.

ILTAM280- Terraja TL M2.8

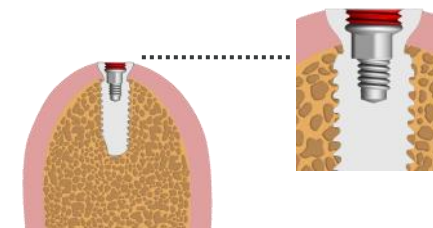

Indicación:

Ajustar el aterrajado M2.8 dañado de un implante Axiom® TL.

No puede utilizarse sobre un pilar inLink®. En caso de terraja M2.8 dañada sobre un pilar inLink®, sustituya el pilar.

Composición:




Terraja TL M2.8
ILTAM280⁽¹⁾

⁽¹⁾ A fin de obtener unos resultados clínicos óptimos, recomendamos limitar a 10 el número de usos de estos componentes.

Protocolo:


Etapas 1: Limpie y esterilice los instrumentos.
Limpie la conexión del implante.

Etapas 2: Con cuidado de mantenerse en el eje del implante, perforo progresivamente sin forzar. Después de cada media vuelta, afloje la terraja un cuarto de vuelta. Desenrosque la terraja regularmente para limpiarla.

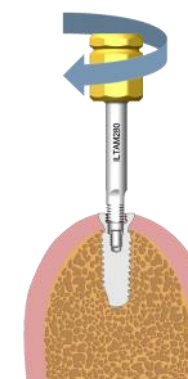

Etapas 3: Limpie minuciosamente la conexión del implante antes de colocar un componente protésico nuevo.

INEXPS / INEXPL - Extractor de pilares S / L

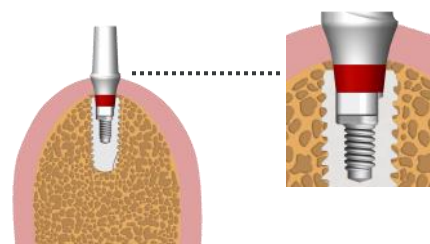

Indicación:

Retirar un pilar bloqueado en un implante Axiom® BL (si el pilar no está roto).

Si el pilar está roto, consulte el **CUADRO SINÓPTICO** para identificar el KIT de servicio necesario.

Composición:




Extractor de pilares S
INEXPS⁽¹⁾



Extractor de pilares L
INEXPL



⁽¹⁾ Instrumento incluido en el kit INMODOPP3.

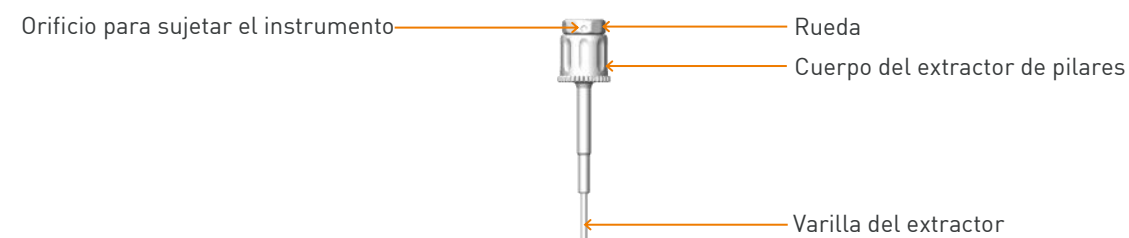


Protocolo:

Etapa 1: Limpie y esterilice el cuerpo y la varilla.


Etapa 2: Monte la varilla en el cuerpo del extractor dejando un espacio de unos 2 mm entre la cabeza y la rueda.

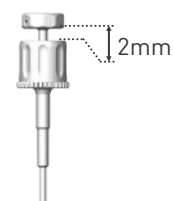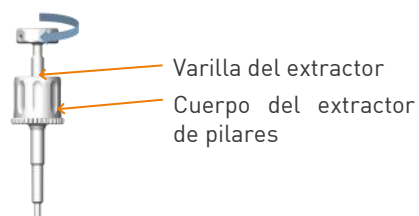


Etapa 3: Enrosque el instrumento con ayuda del cuerpo del extractor.

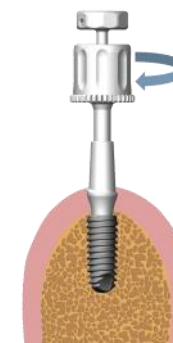

Etapa 4: Apriete la rueda hasta que quede apoyada sobre el cuerpo del extractor para poder retirar el pilar.

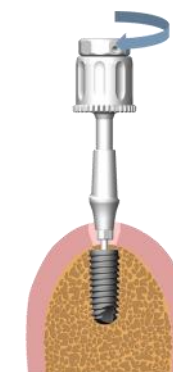


INKITSCWBL - KIT de tornillo M1.6 BL roto

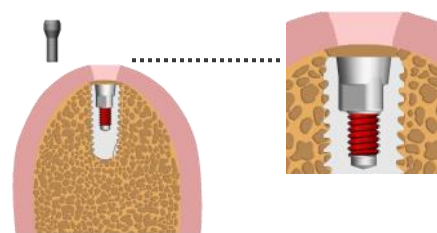

Indicación:

- Retirar un tornillo M1.6 roto (caso de un pilar atornillado) en un implante Axiom® BL.
- Retirar un pilar monobloque roto a la altura de la rosca M1.6 en un implante Axiom® BL.

Composición:

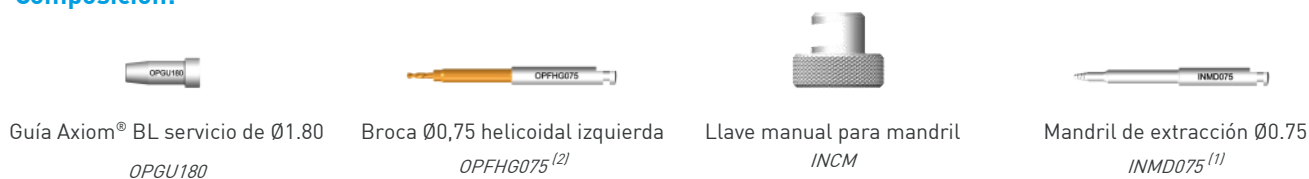

⁽¹⁾ A fin de obtener unos resultados clínicos óptimos, recomendamos limitar a 10 el número de usos de estos componentes.

⁽²⁾ Este componente es de **un solo uso**.

Material necesario además del KIT:




⁽³⁾ Estos instrumentos se entregan en el kit INMODOPS3.

Protocolo:


Etapa 1: Limpie y esterilice los instrumentos.
Limpie la conexión del implante.
Lubrique la conexión del implante con agua.

Etapa 2: Coloque la guía OPGU180 en el implante con una llave (ref. OPCV060, OPCV110, OPCV160), ejerciendo presión para bloquearla en el cono del implante. Retire la llave **manteniendo la guía en su posición**.

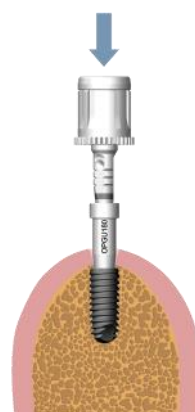

Etapa 3: Inserte la guía OPGU180 con un impactador.
Compruebe que la guía está firmemente fijada al implante.
Lubrique la perforación interna de la guía con agua.

Etapa 4: Con la guía en su posición, coloque la broca en la guía y perfore progresivamente (retirando las virutas poco a poco) con la broca OPFHG075 en sentido **antihorario** a una velocidad de 3000 rpm hasta llegar al tope. Si el tornillo no sale con la broca, pase a la etapa nº 4.

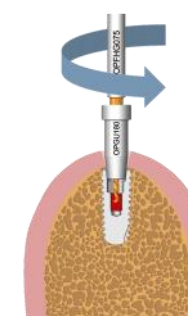


Etapa 5: Con la guía en su posición, utilice el mandril de extracción INMD075 con la llave INCM para enganchar el tornillo en la perforación de Ø0.75 previamente realizada; gire en sentido **antihorario** ejerciendo presión.



Etapa 6: Limpie minuciosamente la conexión del implante antes de colocar un componente protésico nuevo.

INKITABTBL - KIT de pilar BL roto

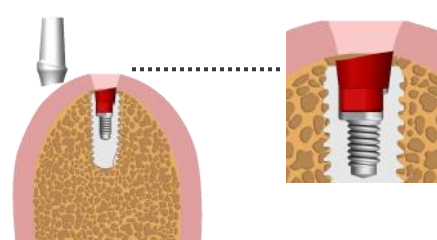

Indicación:

Retirar un pilar **atornillado** roto en un implante Axiom® BL (rotura del pilar a la altura del cuello del implante).

En caso de pilar monobloque roto en un implante Axiom® BL, utilice el KIT INKITSWBL (p. 14).


Composición:



Broca con tope para retoques 1.6 mm
OPFBR16⁽²⁾



Varilla de empuje + Extractor
INEXPRBL⁽¹⁾

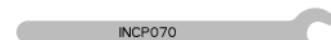


Llave plana inox. de 7 mm
INCP070

⁽¹⁾ A fin de obtener unos resultados clínicos óptimos, recomendamos limitar a 10 el número de usos de estos componentes.


 ⁽²⁾ Este componente es de un solo uso.

Protocolo:

Etapa 1: Limpie y esterilice los instrumentos.
Si el pilar está roto por encima de la parte superior del implante, nivele la superficie del pilar sin dañar el implante.
Si el pilar está roto por debajo de la parte superior del implante, no retoque el pilar.
Limpie la zona con agua y aire.

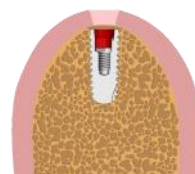


Etapa 2: En el eje del implante y con **irrigación**, perforo con la broca OPFBR16 en sentido horario a una velocidad de 3000 rpm hasta llegar al tope.

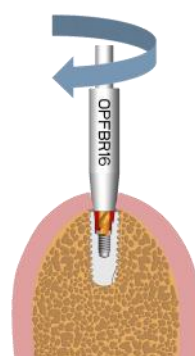


Etapa 3: Enrosque el extractor en el pilar ejerciendo presión. Si es necesario, finalice apretando el extractor con la llave INCP070.

Compruebe que el extractor está firmemente fijado al pilar roto.

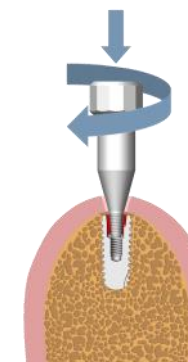


Etapa 4: Apriete la varilla de empuje hasta el tope para extraer el pilar unido al extractor. Si es necesario, finalice apretando el extractor con la llave INCP070.

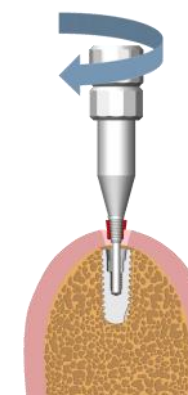

Etapa 5: Limpie minuciosamente la conexión del implante antes de colocar un componente protésico nuevo.
Si el tornillo M1.6 está roto en el implante, retírelo con el KIT INKITSWBL (p. 14).

INKITLOCK - KIT de anclaje roto

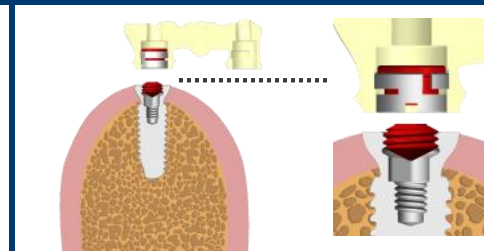

Indication :


Retirar un anclaje inLink® roto cuando:

- El anillo de fijación y la cabeza del anclaje están en la prótesis.
- La parte roscada del anclaje está en el implante Axiom® TL o el pilar inLink®.

Composition :



Llave inLink® 2 en 1
IL-TOOL2

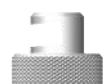

Llave manual para mandril
INCM



Mandril de extracción S
INMDS⁽¹⁾



Mandril de extracción L
INMDL⁽¹⁾

⁽¹⁾ A fin de obtener unos resultados clínicos óptimos, recomendamos limitar a 10 el número de usos de estos componentes.

Material necesario además del KIT:



Llave esférica
INBW100S⁽²⁾-INBW100L⁽²⁾


⁽²⁾ Estos instrumentos se entregan en el kit INMODOPP3.

Protocolo:

Etapas 1: Limpie y esterilice los instrumentos.


Retirar la parte roscada del anclaje:

Etapas 2: Utilice el mandril de extracción INMDS o INMDL con la llave manual INCM para enganchar la parte roscada del anclaje; gire en sentido **antihorario** ejerciendo presión.

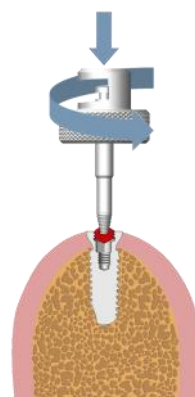

Retirar el anillo de fijación y la cabeza del anclaje de la prótesis:

Etapas 3: En la llave IL-TOOL2, retire el capuchón de la parte cónica marcada con "IN".

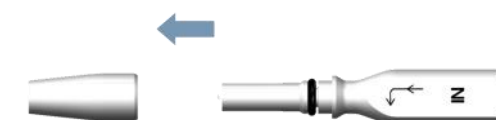


Etapas 4: Introduzca la llave esférica INBW100S en el acceso al tornillo de la prótesis hasta acoplarla a la cabeza del anclaje.




Etapas 5: De la vuelta a la prótesis de forma que la cabeza de la llave esférica quede situada contra el plano de trabajo para mantenerla acoplada a la cabeza del anclaje.


Sujete la prótesis con una mano y use la otra para acoplar la llave IL-TOOL2 en las 2 muescas del anillo de fijación.

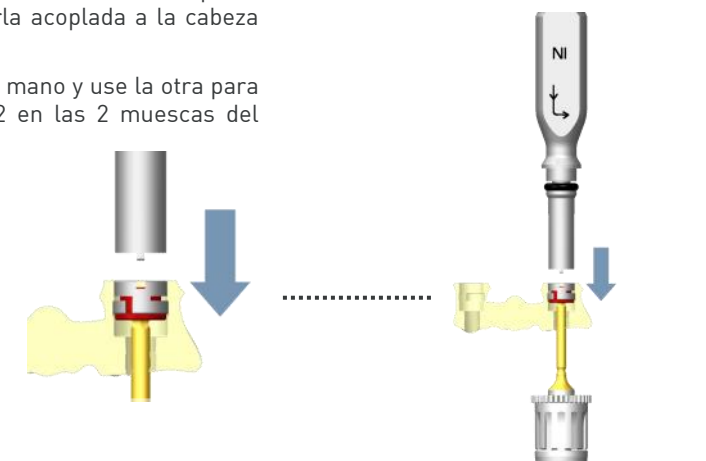

Etapas 6: Gire la llave IL-TOOL2 en sentido horario para retirar el anillo de fijación y la cabeza del anclaje de la prótesis.

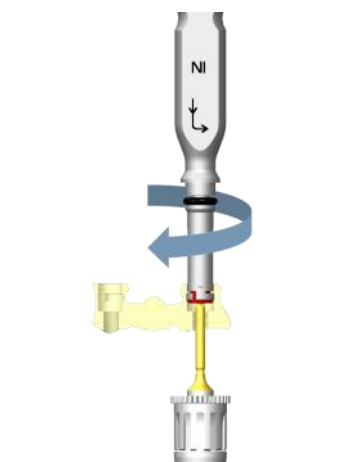

INKITSCWTL - KIT de tornillo M1.6 TL

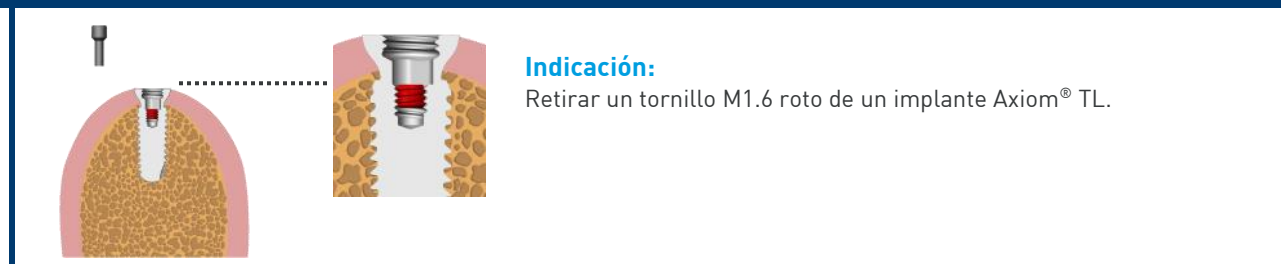

Indicación:
Retirar un tornillo M1.6 roto de un implante Axiom® TL.

Composición:



Guía Axiom® TL servicio de Ø1.80
TOPGU180



Broca Ø0.75 helicoidal izquierda
OPFHG075⁽²⁾



Llave manual para mandril
INCM



Mandril de extracción Ø0.75
INMD075⁽¹⁾

⁽¹⁾ A fin de obtener unos resultados clínicos óptimos, recomendamos limitar a 10 el número de usos de estos componentes.

 ⁽²⁾ Este componente es de **un solo uso**.

Material necesario además del KIT:




Llave inglesa corta
TIW100S⁽³⁾ - TIW100L⁽³⁾

⁽³⁾ Estos instrumentos se entregan en el kit INMODOPP3.


Protocolo:

Etapa 1: Limpie y esterilice los instrumentos.
Limpie la conexión del implante.
Lubrique la conexión del implante con agua.


Etapa 2: Enrosque la guía TOPGU180 en el implante con una llave TIW100S hasta el tope, con un torque manual <10N.cm. Retire la llave.
Lubrique la perforación interna de la guía con agua.

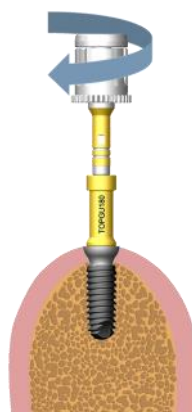

Etapa 3: Con la guía en su posición, coloque la broca en la guía y perforo progresivamente (retirando las virutas poco a poco) con la broca OPFHG075 en sentido **antihorario** a una velocidad de 3000 rpm hasta llegar al tope. Si el tornillo no sale con la broca, pase a la etapa nº4.


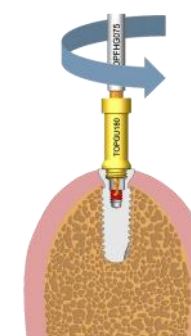


Etapa 4: Con la guía en su posición, utilice el mandril de extracción INMD075 con la llave INCM para enganchar el tornillo en la perforación de Ø0.75 previamente realizada; gire en sentido **antihorario** ejerciendo presión.



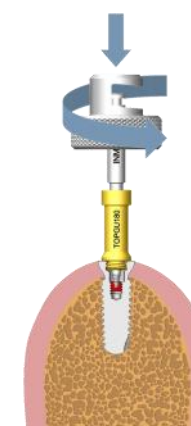



Etapa 5: Limpie minuciosamente la conexión del implante antes de colocar un componente protésico nuevo.

Referencias de los componentes

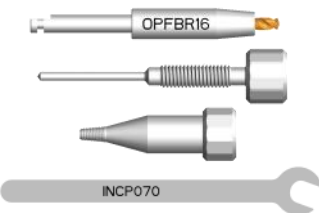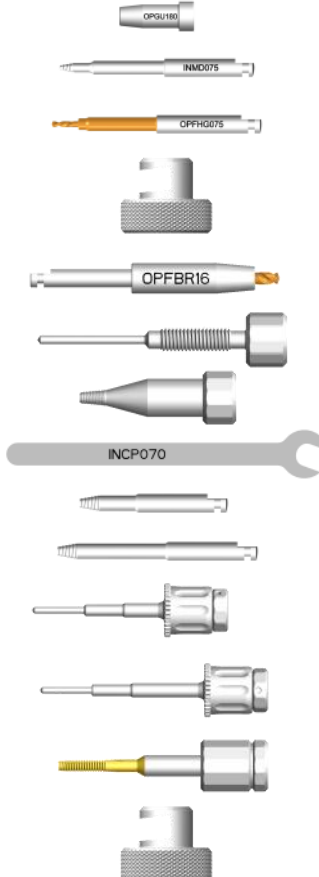
KIT AXIOM® BL		REFERENCIAS
	KIT de tornillo M1.6 BL roto Contiene: - 1 guía Axiom® BL Ø1.80 - 1 mandril de extracción para Ø0.75 - 1 broca Ø0.75 helicoidal izquierda - 1 llave manual para mandril	INKITSCWBL
	KIT de pilar BL roto Contiene: - 1 broca con tope para retoques de 1.6 mm - 1 varilla de empuje - 1 extractor - 1 llave plana inox. de inox	INKITABTBL
	KIT de servicio Axiom® BL Contiene: - los componentes del KIT INKITSCWBL - 1 guía Axiom® BL Ø1.80 - 1 broca Ø0.75 helicoidal izquierda - 1 mandril de extracción para Ø0.75 - 1 llave manual para mandril - los componentes del KIT INKITABTBL - 1 broca con tope para retoques de 1.6 mm - 1 varilla de empuje - 1 llave plana inox. de 7 mm - 1 extractor - 1 mandril de extracción S - 1 mandril de extracción L - 1 extractor de pilares S - 1 extractor de pilares L - 1 terraja M1.6 x 0.35 - 1 llave manual para mandril	INKITSSBL

KIT AXIOM® BL		REFERENCIAS
	KIT de anclaje roto Contiene: - 1 llave manual para mandril - 1 mandril de extracción S - 1 mandril de extracción L - 1 llave inLink® 2 en 1	INKITLOCK

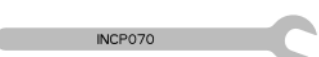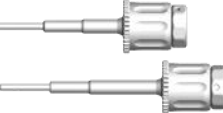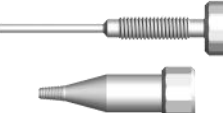COMPONENTES DE AXIOM® BL		REFERENCIAS
	Mandril de extracción para Ø0.75 Inox. grado médico Mandril de extracción para Ø0.75	INMD075
	Mandriles de extracción Inox. grado médico Mandril de extracción S Mandril de extracción L	INMDS INMDL
	Broca Ø0.75 helicoidal izquierda Inox. grado médico Broca Ø0.75 helicoidal izquierda	OPFH075
	Terraaja M1.6 x 0.35 Inox. grado médico Terraaja M1.6 x 0.35	OPTAM16
	Llave manual para mandril Inox. grado médico Llave manual para mandril	INCM
	Llave inLink® 2 en 1 Inox. grado médico Llave inLink® 2 en 1	IL-T00L2
	Llave plana inox. de 7 mm Inox. grado médico Llave plana inox. de 7 mm	INCP070
	Guía Axiom® BL Ø1.8 servicio Inox. grado médico Guía Axiom® BL Ø1.8 servicio	OPGU180
	Broca con tope para retoques de 1.6 mm Inox. grado médico Broca con tope para retoques de 1.6 mm	OPFBR16
	Extractor de pilares Inox. grado médico Extractor de pilares S Extractor de pilares L	INEXPS INEXPL
	Extractor para pilar BL roto Inox. grado médico Extractor para pilar BL roto	INEXPRBL

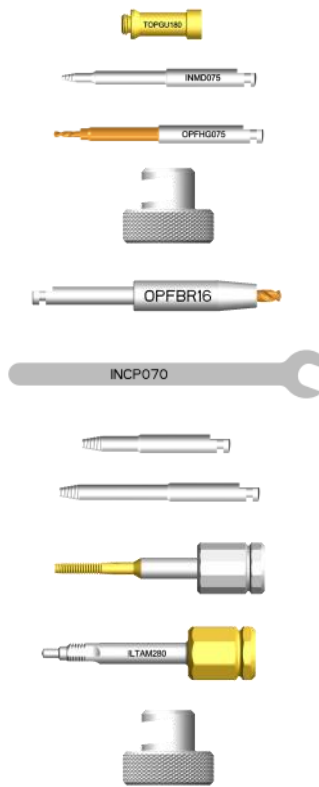KIT AXIOM® TL		REFERENCIAS
	KIT de tornillo M1.6 BL roto Contiene: - 1 guía Axiom® TL Ø1.80 - 1 mandril de extracción para Ø0.75 - 1 broca Ø0.75 helicoidal izquierda - 1 llave manual para mandril	INKITSCWTL
	KIT de servicio Axiom® TL Contiene: - los componentes del KIT INKITSCWTL - 1 guía Axiom® TL Ø1.80 - 1 broca Ø0.75 helicoidal izquierda - 1 mandril de extracción para Ø0.75 - 1 llave manual para mandril - 1 llave plana inox. de 7 mm - 1 mandril de extracción S - 1 mandril de extracción L - 1 terraja M1.6 x 0.35 - 1 terraja TL M2.8 - 1 llave manual para mandril	INKITSSTL

KIT AXIOM® TL		REFERENCIAS
	KIT de anclaje roto Contiene: - 1 llave manual para mandril - 1 mandril de extracción S - 1 mandril de extracción L - 1 llave inLink® 2 en 1	INKITLOCK

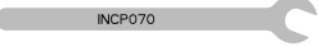COMPONENTES DE AXIOM® TL		REFERENCIAS
	Mandril de extracción para Ø0.75 Inox. grado médico Mandril de extracción para Ø0.75	INMD075
	Mandriles de extracción Inox. grado médico Mandril de extracción S Mandril de extracción L	INMDS INMDL
	Broca Ø0.75 helicoidal izquierda Inox. grado médico Broca Ø0.75 helicoidal izquierda	OPFHG075
	Terraja M1.6 x 0.35 Inox. grado médico Terraja M1.6 x 0.35	OPTAM16
	Terraja TL M2.8 Inox. grado médico Terraja TL M2.8	ILTAM280
	Llave manual para mandril Inox. grado médico Llave manual para mandril	INCM
	Llave inLink® 2 en 1 Inox. grado médico Llave inLink® 2 en 1	IL-T00L2
	Llave plana inox. de 7 mm Inox. grado médico Llave plana inox. de 7 mm	INCP070
	Guía Axiom® BL Ø1.8 servicio Inox. grado médico Guía Axiom® BL Ø1.8 servicio	TOPGU180

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 Anthogyr
2 237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches - France
Tél. +33 (0)4 50 58 02 37
Fax +33 (0)4 50 93 78 60
www.anthogyr.com

CE 0459