

CE 0459

 Anthogyr SAS

2 237, Av. André Lasquin
74700 Sallanches - France

Phone : +33(0)4 50 58 02 37

Fax : +33(0)4 50 93 78 60

www.anthogyr.com

Email : contact@anthogyr.com

Edition : 2019-09

REF. 063FLEXIBASE_NOT_ES

CE 0459

Aparato médico conforme a la directiva europea 93/42/CEE.



Atención: deben consultarse las instrucciones de uso; Peligro



No reutilizar



No estéril



Esterilizable en autoclave fuera del envase, a la temperatura indicada.



Referencia de catálogo



Código de lote



No utilizar si el embalaje está dañado.



Fabricante



Fecha de fabricación



Las leyes federales estadounidenses limitan la venta de este aparato a odontólogos autorizados o bajo prescripción facultativa.



Cumple las normas y los estándares de Rusia.



Par de apriete

Descripción

Las FlexiBase® indicadas en la tabla de abajo se utilizan para restauraciones protésicas personalizadas sobre implantes Axiom® TL, Axiom® BL y pilares Multi-Unit. El tornillo protésico definitivo se incluye con la FlexiBase®.

Para la gama Axiom® BL, las FlexiBase® son extraíbles.

Indicaciones

Restauraciones unitarias y múltiples atornilladas sobre implantes Axiom® TL, Axiom® BL y pilares Multi-Unit.

Contraindicaciones

Alergia al titanio Ti6Al4V-ELI.

Las FlexiBase® sobre pilares Multi-Unit no deben utilizarse si hay una divergencia de ejes superior a 40° entre 2 análogos de pilares, ya que existe el riesgo que no sea posible insertar la prótesis.

Advertencias y precauciones

Estos componentes deben colocarlos únicamente profesionales capacitados en implantología.

Los componentes protésicos deben sujetarse con un hilo guía para evitar su inhalación o deglución durante el uso intraoral.



Las FlexiBase® no deben retorcerse (ni en la parte gingival ni en la coronaria); riesgo de fragilización mecánica.

Únicamente puede realizarse un arenado de la parte coronaria con corindón (Al2O3) con una granulometría de 50µm a 125µm y bajo una presión de 2 a 4 bares.

Los tornillos OPTS160, MU140, TS160 y TS160P deben utilizarse únicamente para fijar la restauración protésica sobre el implante en la boca.

Si no se siguen los procedimientos descritos en estas instrucciones de uso, podrían producirse las complicaciones siguientes:

- Deterioro del implante, del componente protésico o de otros componentes.
- Aflojamiento del componente protésico o de otros componentes.

- Restauración final incorrecta.
- Trastorno de la función masticatoria del paciente.
- Rechazo del implante.

Limpieza y esterilización



Consulte las recomendaciones de los fabricantes de los materiales de restauración (supraestructura y adhesivo) con respecto a compatibilidad con los medios de esterilización.

Los componentes se entregan **SIN ESTERILIZAR**. Deben limpiarse y esterilizarse siguiendo las indicaciones del manual de limpieza y esterilización disponible en la página ifu.anthogyr.com [código de búsqueda: OPFLEX413, por ejemplo]. También puede solicitarlo a Anthogyr en la dirección arriba indicada.

Instrucciones de uso

➔ Realización de la supraestructura:

- por fresado CAD-CAM: la biblioteca de CAD asociada puede descargarse en el sitio www.anthogyr.com



Consulte las recomendaciones de los fabricantes de los materiales de restauración con respecto al espesor mínimo de la supraestructura en el caso de fresado de zirconio.

- mediante la técnica de colada: uso de la funda calcinable asociada (véase la tabla de abajo).

➔ Antes de aplicar el adhesivo, atornille la FlexiBase® sobre el análogo con ayuda del tornillo de laboratorio corto (ref. OPTS161 para Axiom® BL, ref. TS163 para Axiom® TL, ref. MU141-4 para Multi-Unit) o largo (ref. OPTS162 para Axiom® BL, ref. TS162 para Axiom® TL, ref. MUT101 y ref. MUT102 para Multi Unit).

➔ Selle la superestructura a la FlexiBase®.



Consulte las recomendaciones de los fabricantes de los materiales de sellado con respecto al procedimiento de aplicación.

Para cementar una superestructura de ZIRCONIO, Anthogyr recomienda el uso de los siguientes adhesivos: PANAVIA™ (F2.0 / V5 / Cement Plus) de KURARAY DENTAL o MULTILINK AUTOMIX de IVOCAR VIVADENT.

➔ Limpie y esterilice la restauración protésica y el tornillo protésico definitivo.

➔ Fije la restauración protésica sobre el implante / el pilar con el tornillo protésico definitivo incluido, con ayuda de una llave dinamométrica INCCD o TORQ CONTROL®. Las FlexiBases® deben fijarse con el par de apriete indicado en la tabla de abajo.

➔ Obture el acceso con un material de relleno tras proteger la cabeza del tornillo.

Seguridad, responsabilidad

Puesto que están fuera de nuestro control, el uso y la manipulación correctos de este producto son responsabilidad exclusiva del usuario.

Anthogyr declina toda responsabilidad en caso de problemas clínicos derivados del incumplimiento del protocolo anteriormente descrito.

Información para el paciente

El paciente debe aceptar un seguimiento médico regular y consultar a su médico en caso de alteración imprevista de la reconstrucción protésica. Debe indicarse al paciente que es necesaria una higiene bucal regular.

En Anthogyr le agradecemos su confianza y quedamos a su disposición para cualquier información complementaria.

		Referencia de FlexiBase®	Imagen	Tornillo protésico definitivo (incluido con la FlexiBase®)	Funda calcinable incluida
AXIOM® BL	UNITARIA	OPFLEX413		 <i>OPTS160</i> Par de apriete : 25 N.cm	OPFLEXC403
		OPFLEX423			
		OPFLEX433			
		OPFLEX513			OPFLEXC503
		OPFLEX523			
		OPFLEX533			
	MÚLTIPLE	MUNFLEX		 <i>MU140</i> Par de apriete : 15 N.cm	MUNFLEXC
		MUFLEX			MUFLEXC
AXIOM® TL	UNITARIA	TFLEX-N		 <i>TS160</i> Par de apriete : 25 N.cm	TFLEXC-N
		TFLEX-R			TFLEXC-R
	MÚLTIPLE	TFLEX-N-P		 <i>TS160P</i> Par de apriete : 25 N.cm	TFLEXC-N-P
		TFLEX-R-P			TFLEXC-R-P