

EXO SAFE



NL—Gebruik van periotomen

NL - Volledige extractiekit EXO SAFE

(REF. EXO_FULL)



- De kit bevat:
- 1 automatische impactor SAFE
 - 1 recht, convex en smal periotoom
 - 1 recht, convex en smal periotoom
 - 1 gehoeft convex periotoom, verticaal
 - 1 gehoeft convex periotoom, verticaal
 - 1 recht, convex en smal periotoom
 - 1 recht, convex en smal periotoom

De foto stemt overeen met de volledige kit Ref **EXOFULL**. Het protocol en de gebruiksaanwijzingen zijn eveneens van toepassing op de **EXOSET**-referentie.

INDICATIES

Periotomen laten toe de tand te fixeren door de desmodontale ruimten in de interproximale, linguale en distale vlakken te verbreden.
Deze SAFE impactor wordt eveneens gebruikt voor sinus-liften in de bovenkaak en/of botcondensatie met onze oplossing OSTEO SAFE (informatie beschikbaar op www.anthogyr.com)
Het gebruik van periotomen laat toe het perifere botweefsel zo veel mogelijk te bewaren.
De automatische botimpactor SAFE, gelinkt aan de periotomen, laat een atraumatische tandextractie toe.

PROTOCOL

- Bij voorkeur een snee maken in het tandvlees om een direct en nauwkeurig zicht te hebben op de alveolaire rand.
- Gebruik in eerste instantie het periotome rechts groot, convex (**PERIO02**) op mesiaal niveau, dan distaal, dan palatin of linguaal.
- Een lichte alternerende draaibeweging uitvoeren naarmate het mesje van het periotoom in het desmodontale ligament doordringt,
- De tand extraheren zodra de mobiliteit van de tand voldoende groot is
- Het fijne convexe periotoom (**PERIO01**) gebruiken wanneer er een gebroken apex is achtergebleven in het alveool.
- Vermijd om het periotoom in het vestibulair te plaatsen teneinde zoveel mogelijke de externe corticale substantie te be waren

GEBRUIKSPRINCIPE

De automatische impactor SAFE laat toe om schokken van een gecontroleerde intensiteit en met een gecontroleerde frequentie te genereren. In combinatie met periotomes kunnen hiermee tandextracties automatisch en beheerst worden uitgevoerd. de controle van het aantal micro-impacts gebeurt door de controle van de snelheid van motor.
Het Universele Chirurgische Instrument kan ook worden gebruikt wanneer u kiest voor de manuele optie, met, naargelang het geval, het geheel van de voorgestelde periotomen in de oplossing EXO SAFE.

DE VERSCHILLENDE MODELLEN



Periotoom Cx recht smal
(breedte : 2.1mm—dikte : 1.25mm)
Ref. **PERIO01**



Periotoom Cx gehoeft, verticaal
(breedte : 2.1mm—dikte : 0.8mm)
Ref. **PERIO03**



Periotoom Cx recht smal
(breedte : 2mm—dikte : 1.2mm)
Ref. **PERIO05**



Periotoom Cx recht en breed
(breedte : 2.6mm—dikte : 1mm)
Ref. **PERIO02**



Periotoom Cx gehoeft, horizontaal
(breedte : 2.1mm—dikte : 0.8mm)
Ref. **PERIO04**



Periotoom Cc recht gemiddeld
(breedte : 3mm—dikte : 1mm)
Ref. **PERIO06**

VERBINDING MET DE AUTOMATISCHE IMPACTOR SAFE

De aanwijzingen in de bijsluiter van de automatische impactor 1636920SAFE_NOT respecteren.

⚠ Geen koelsystemen plaatsen op implantologiemotoren of tandunits — Noch peristaltische pompen noch sprays (water & lucht).

SCHOONMAKEN-ONTSMETTEN-STERILISEREN

REINIGING EN ONDERHOUD

⚠ De medische hulpmiddelen worden NIET-STERIEL geleverd. Het is van groot belang om ze voor het eerste gebruik en na elk gebruik te reinigen, te desinfecteren en te steriliseren.

HANDMATIG

- Borstel elk onderdeel onder stromend water met een zachte borstel.
- Borstel elk onderdeel met een verdund reinigings- /ontsmettingsmiddel (Neodisher Mediclean 5 mL/L) gedurende minstens 3 minuten.
- Ten minste 1 minuut spoelen onder gedemineraliseerd water.
- Elk onderdeel drogen

AUTOMATISCH

- Alleen in een thermodesinfector die geschikt is voor de behandeling van dit type **medische hulpmiddelen** Volg de instructies van de fabrikant van het apparaat.
- De thermodesinfectorcyclus

	Temperatuur	Tijdsduur	Type reinigingsmiddel en concentratie (indien van toepassing)
Voorreiniging	Water: van koud tot maximaal 35°C	4 min.	Niet van toepassing
Wassen	Water 50 à 65 °C	5 min.	Néodisher Mediclean Dental (2mL/L)
Wassen	Water 50 à 65 °C	3 min.	Neodisher Z Dental (2mL/L)
Spoeling	Water: van koud tot maximaal 43°C	2 min.	Niet van toepassing
Thermische ontsmetting	Water 95°C	10 min.	Niet van toepassing
Drogen	Water 95°C	10 min.	Niet van toepassing .

STERILISATIE

OPGELET! Smeer de Safe impactor goed in voor de sterilisatie (zie handleiding medische hulpmiddelen).

- Steriliseer alleen instrumenten die gereinigd, gesmeerd (indien nodig) en getest (indien nodig) zijn.
- Wij raden het gebruik van de autoclaaf met voorvacuüm (klasse B) sterk aan.
- Doe alle medische hulpmiddelen in de steriliseercassette en plaats deze in een sterilisatiezak conform de geldende normen en aangepast aan de grootte.
- Houd rekening met de ruimte tussen de zakken en overbelast de autoclaaf niet.

- Alle **medische hulpmiddelen** en bijbehorende accessoires (behalve de accessoires met het logo ⓧ die voor eenmalig gebruik zijn) kunnen bij een temperatuur van 132°C gesteriliseerd worden gedurende 3 minuten (sterilisatietijd).
- De droogtijd is 10 minuten Controleren of het apparaat volledig droog is aan het eind van de cyclus

VERBAND TUSSEN DE BINNENKOMENDE ROTATIESNELHEID (MOTOR) EN DE FREQUENTIE VAN DE SCHOKKEN BIJ HET BUITENGAAN

Ratio 1:1	Automatische impactor SAFE
<i>Tr/min</i>	<i>Slagen/min</i>
2 000	20
5 000	50
10 000	100
MAX → 15 000	150

REFERENTIE VAN HERASSORTIMENTERING

Beschrijving	Réf.	Beschrijving	Réf..
Periotoom Cx recht, smal	PERIO01	Volledige set 6 periotomen	EXO_SET
Periotoom Cx recht en breed	PERIO02	Volledige extractiekit	EXO_FULL
Periotoom Cx gehoekt, verticaal	PERIO03	Universeel Chirurgisch Instrument	INUSI
Periotoom Cx gehoekt, horizontaal	PERIO04		
Periotoom Cx recht smal	PERIO05		
Periotoom Cc recht, gemiddeld	PERIO06		

 Lees voor alle bijkomende informatie, de aanvullende bijsluiters 1636920SAFE_NOT en 063INUSI_NOT zorgvuldig door.

