

axiom®



Limpeza e esterilização
GUIA DO UTILIZADOR

ÍNDICE

1. Introdução	3
A. RECOMENDAÇÕES E AVISOS	3
B. SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS	4
C. PROCESSO DE LIMPEZA	5
2. Preparação e desmontagem	6
A. KIT DE STOPS DE BROCA	6
B. MICRO CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO	6
C. CHAVE DE PRESSÃO	7
D. EXTRATOR	7
E. CHAVE DE CATRACA REVERSÍVEL	7
F. KITS	8
G. KITS PARA CIRURGIA GUIADA INTEGRAL	9
3. Limpeza	10
A. LIMPEZA MANUAL	10
B. LIMPEZA AUTOMÁTICA	12
4. Esterilização	14
A. PREPARAÇÃO E MONTAGEM	14
B. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE	14
5. Anexos	15
A. REFERÊNCIAS	15
B. QUALIDADE DA ÁGUA	15
C. PRODUTOS E DETERGENTES	15
D. PROTOCOLO DO DISPOSITIVO POR REFERÊNCIA	16

1. Introdução

A. RECOMENDAÇÕES E AVISOS

Os protocolos de limpeza e esterilização apenas podem ser efetuados por profissionais devidamente formados e protegidos, em conformidade com a regulamentação aplicável. Para evitar riscos de infeção ou ferimentos, é obrigatório utilizar equipamento de proteção adequado (máscara, luvas e óculos de proteção).

Os protocolos de limpeza e esterilização têm de ser adaptados ao risco de infeção. O utilizador ou a equipa médica têm de garantir que o protocolo implementado cumpre o objetivo de esterilidade. O protocolo tem de permitir a eliminação de todos os resíduos químicos e orgânicos no dispositivo tratado (garantir, nomeadamente, que os produtos utilizados são devidamente enxaguados).

Para não deteriorar ou danificar os componentes, é obrigatório utilizar apenas produtos de limpeza e de descontaminação compatíveis com as diferentes combinações de materiais tratados.

As soluções de detergentes devem possuir um pH neutro ou ser pouco alcalinas.

Os protocolos de limpeza e de esterilização apresentados neste manual foram aprovados pela Anthogyr. Os protocolos anteriores a este documento estão desatualizados e devem ser substituídos pelos apresentados neste manual.

Outros protocolos ou detergentes podem ser equivalentes aos propostos neste manual, mas têm de ser aprovados pelo utilizador.

Em caso de conflito com as recomendações nacionais, estas prevalecem sobre os protocolos sugeridos pela Anthogyr.

ADVERTÊNCIA!

Os produtos reutilizáveis (instrumentos e kits) devem ser obrigatoriamente limpos e esterilizados antes da primeira utilização e após cada intervenção.

Os produtos de utilização única fornecidos não estéreis têm de ser limpos e esterilizados antes da colocação na boca.

Os produtos fornecidos esterilizados (esterilização por radiação gama) não devem ser novamente esterilizados. Tenha cuidado com as partes esterilizadas no interior das embalagens ou blisters/cápsulas ao desembalar e colocar esse conteúdo em áreas esterilizadas. Preste atenção à data de validade do produto.

Para a limpeza, os kits devem ser totalmente desmontados e depois montados novamente com os instrumentos antes da esterilização. As caixas de esterilização não se desmontam.

A utilização de soda cáustica ou de hipoclorito de sódio (lixívia) nas ligas de alumínio é formalmente proibida uma vez que há um risco significativo de corrosão.


A utilização de peróxido de hidrogénio (H₂O₂) é formalmente proibida em todos os materiais uma vez que há um risco de reação química.

Não utilize substâncias suscetíveis de fixar proteínas (álcool, aldeídos, etc.).

B. SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS

Símbolo	Descrição do símbolo	Origem do símbolo
	Fabricante	NF EN ISO 15223-1
	Data de fabrico	NF EN ISO 15223-1
	Referência em catálogo	NF EN ISO 15223-1
	Código de lote	NF EN ISO 15223-1
	Número de série	NF EN ISO 15223-1
	Consultar as instruções de utilização ou as instruções de utilização em formato eletrónico	NF EN ISO 15223-1
	Dispositivo médico	NF EN ISO 15223-1
	Marca CE - conformidade com a regulamentação atual	Diretiva 93/42/CEE MDR (UE) 2017/745
	A lei federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo por ou sob ordem de um médico dentista	21 CFR 801.109(b)(1)
	Data do prazo de validade	NF EN ISO 15223-1
	Sistema de barreira estéril simples	NF EN ISO 15223-1
	Sistema de barreira estéril simples com embalagem protetora no interior	NF EN ISO 15223-1
	Esterilizado por radiação	NF EN ISO 15223-1
	Não reesterilizar	NF EN ISO 15223-1
	Não estéril	NF EN ISO 15223-1
	Esterilizável num aparelho de esterilização por vapor (autoclave) à temperatura especificada	ISO 7000 - 2868
	Não esterilizável num aparelho de esterilização por vapor (autoclave) à temperatura especificada	Anthogyr
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de utilização	NF EN ISO 15223-1
	Manter ao abrigo da luz solar	NF EN ISO 15223-1
	Não reutilizar	NF EN ISO 15223-1
	Atenção	NF EN ISO 15223-1
	Contém substâncias nocivas	NF EN ISO 15223-1
	Torque de aparafusamento	Anthogyr

C. PROCESSO DE LIMPEZA

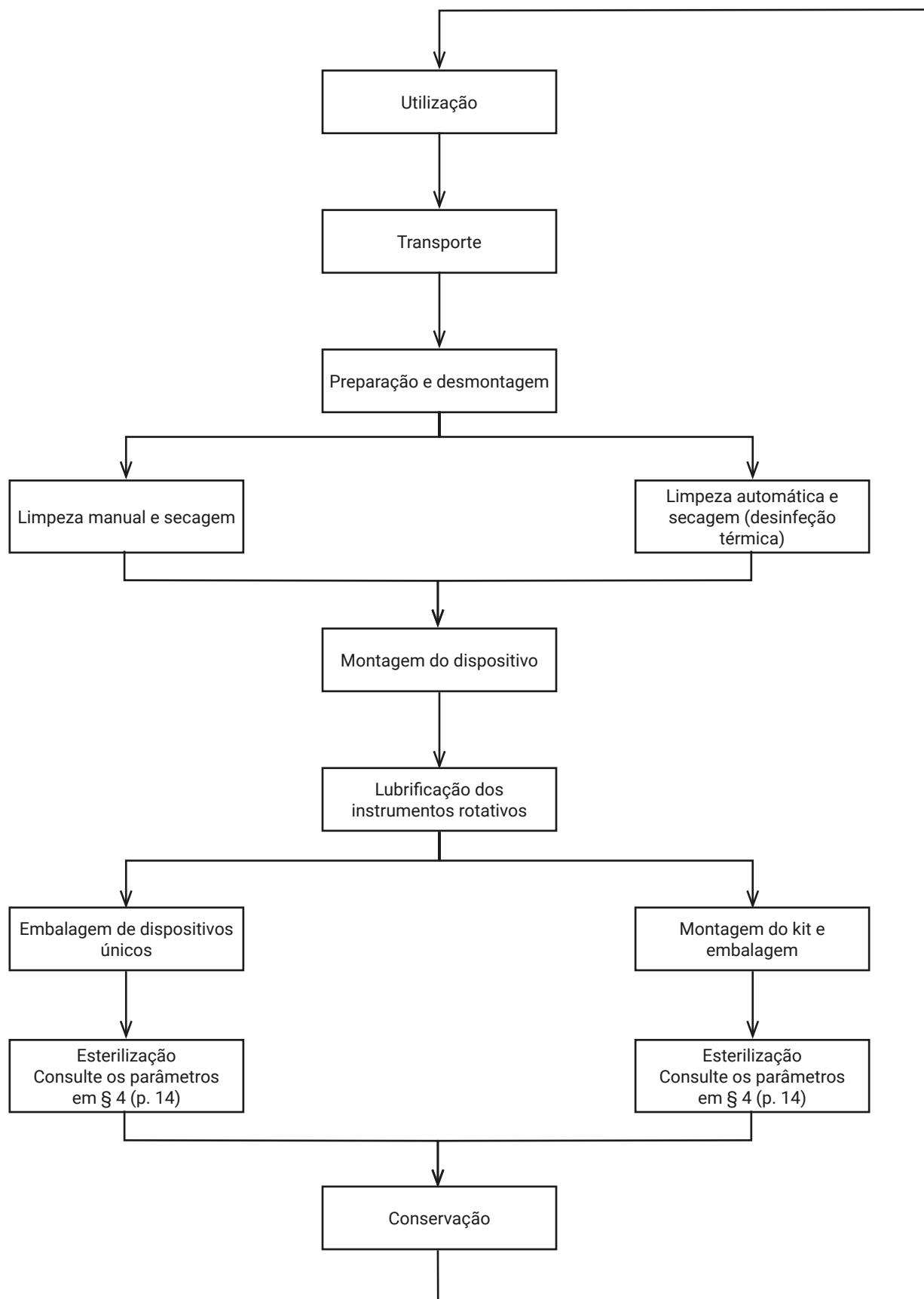

2. Preparação e desmontagem

Nas diferentes etapas do processo, é importante garantir que os instrumentos de corte não entrem em contacto uns com os outros uma vez que o desempenho do corte poderia ser afetado.

Após a utilização, é importante minimizar o tempo de espera antes da limpeza. Deve ser obrigatoriamente inferior a duas horas.

 Para a desmontagem dos produtos Anthogyr, consulte as instruções relativas a cada instrumento.

Têm de ser completamente desmontados antes da limpeza.

Retire as ferramentas (brocas, formadora de rosca, etc.) dos instrumentos rotativos (contra-ângulos, etc.).

A. KIT DE STOPS DE BROCA

- Retire a tampa e os stops de broca antes de realizar a limpeza.



B. MICRO CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO



A micro caixa de esterilização apenas permite a limpeza e esterilização das brocas countersink, do sistema MG e dos auxiliares de cirurgia para osso denso:

- A limpeza tem de ser realizada com a **tampa aberta**. A seguir, a esterilização do tabuleiro é realizada com a tampa fechada.
- Para garantir a limpeza/esterilização eficaz dos auxiliares, podem ser tratadas, **no máximo, 8 peças** em simultâneo na caixa, que deve estar numa superfície plana durante o processo de limpeza.

C. CHAVE DE PRESSÃO

DESMONTAGEM


- Desaparafuse a cabeça (1) da estrutura principal (2).
- Remova a cabeça do eixo (3) da chave, assim como a mola (4), que se desloca livremente na haste.

ADVERTÊNCIA!

O botão (5) e o eixo da chave não são desmontáveis.

VOLTAR A MONTAR

- Para voltar a montar, repita as operações anteriores pela ordem inversa.

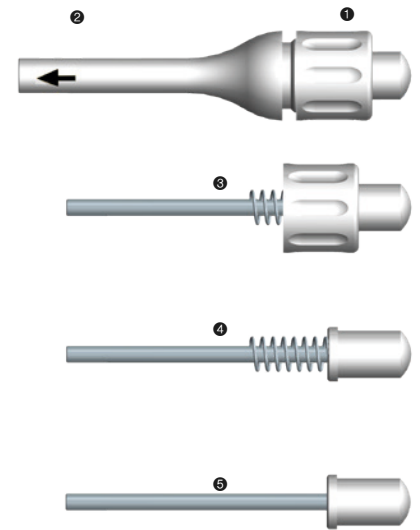


D. EXTRATOR

DESMONTAGEM

- Desaparafuse a cabeça (1) da estrutura principal (2).

VOLTAR A MONTAR

- Para voltar a montar, repita as operações anteriores pela ordem inversa.

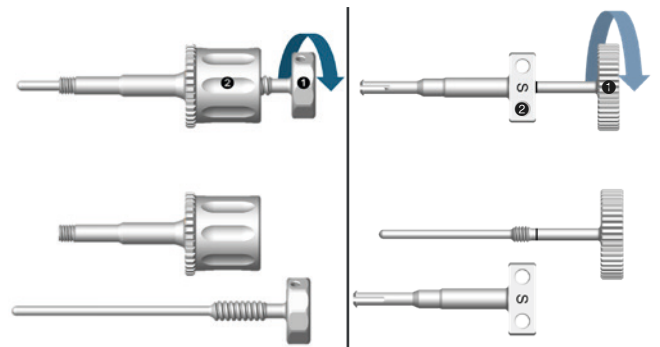

E. CHAVE DE CATRACA REVERSÍVEL


DESMONTAGEM

- Desaparafuse a cabeça (1) e retire da estrutura principal (2).
- Retire o conjunto «catraca (3) + haste (4)» da estrutura, ao empurrar levemente a roda traseira da haste (4) e a catraca (3) uma contra a outra e ao girar em simultâneo a catraca (3) com ¼ de volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desbloquear a baioneta.

VOLTAR A MONTAR

- Repita a operação de desmontagem acima pela ordem inversa. Insira o conjunto «haste (4) + mola (5)» por trás da estrutura (2). Encaixe a mola (6) à volta da haste (4) pela frente da estrutura (2). Monte a catraca (3) ao empurrá-la contra a haste (4) e ao rodar ¼ de volta no sentido dos ponteiros do relógio para bloquear a baioneta.

- Aparafuse a cabeça (1) à estrutura (2).

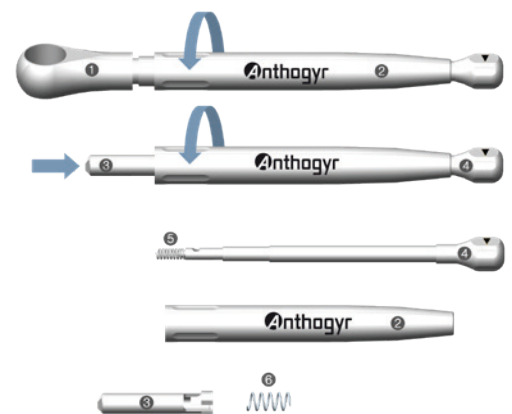


F. KITS

- Abra as tampas.


- Desprenda as cavilhas de inserção colocadas na parte de trás do kit.



- Retire as inserções $\frac{1}{4}$ e $\frac{3}{4}$ do bloco principal do kit.

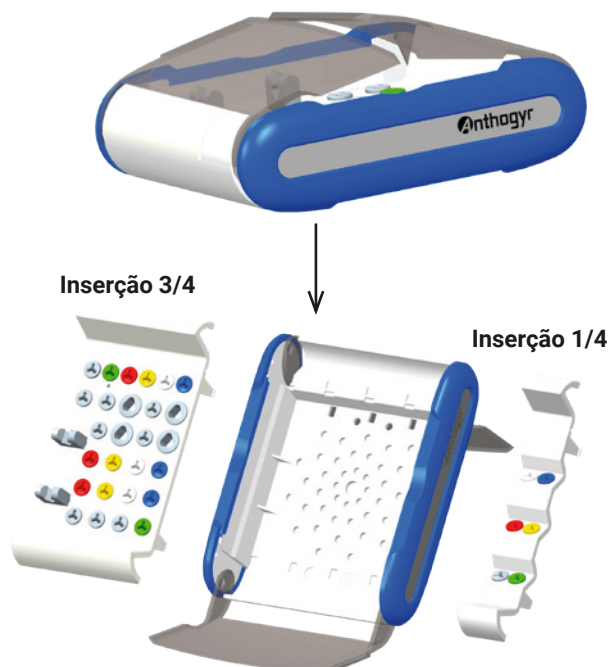

- Afaste com cuidado os elementos laterais do bloco principal.
- Retire as pontas rotativas das capas transparentes.
- Retire as capas.

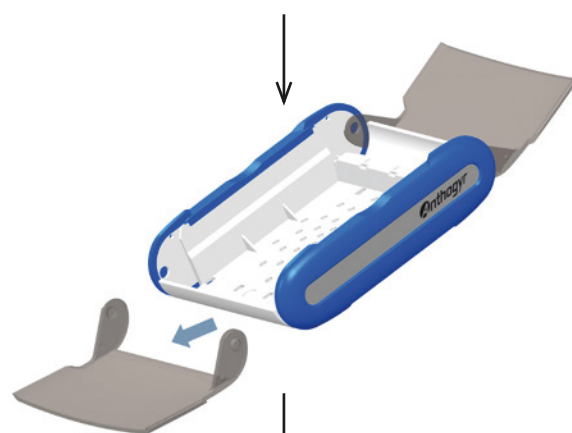

- Retire as capas laterais do bloco principal.
- Desprenda as capas laterais da parte lateral do kit.
- Retire as pontas das capas laterais à volta das placas de aço inoxidável.
- Desprenda as placas das capas de silicone.




Para a montagem, repita o mesmo processo pela ordem inversa.

G. KITS PARA CIRURGIA GUIADA INTEGRAL

➤ Remova a tampa.

➤ Remova os instrumentos.

➤ Remova o suporte de instrumentos branco.

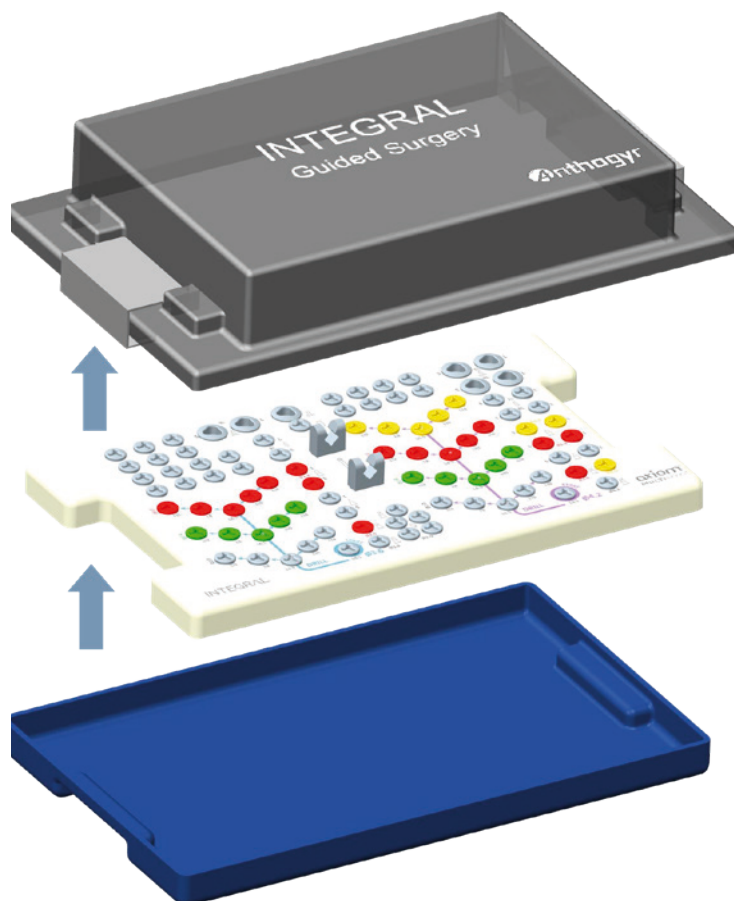

Para a montagem, repita o mesmo processo pela ordem inversa.

3. Limpeza

A Anthogyr aprovou dois métodos de limpeza:

- Limpeza manual
- Limpeza automática com desinfecção térmica

Os pormenores do protocolo de limpeza para cada referência encontram-se na secção D. Se o dispositivo pesquisado não for referido neste apêndice, consulte as respetivas instruções de utilização para saber quais os procedimentos de limpeza específicos a seguir.

ADVERTÊNCIA!

Os seguintes dispositivos não devem ser limpos com desinfecção térmica:

- Dispositivos que contenham peças em alumínio (Torq Control®, Safe Relax®, Safe Lock®)
- copings CoCr

A. LIMPEZA MANUAL

PROTOCOLO N.º 1

LIMPEZA

- Escove meticulosamente todas as superfícies com uma escova macia (por exemplo, de nylon) sob água corrente à temperatura ambiente (20 ± 5 °C) durante, pelo menos, 1 minuto;
- utilize uma escova macia de nylon adaptada para cada orifício cego ou aberto, pelo menos uma vez;
- mergulhe completamente numa solução de detergente enzimático durante 5 minutos, a uma concentração de 8 ml/l;
- lave cada orifício cego ou aberto com solução de detergente, pelo menos uma vez;
- enquanto estiver submerso, escove meticulosamente todas as superfícies com uma escova macia (por exemplo, de nylon) durante, pelo menos, 1 minuto;
- utilize uma escova macia de nylon adaptada em cada orifício cego ou aberto durante 20 segundos;
- durante o tempo que estiverem submersos, desloque os dispositivos com 3 movimentos para trás e para a frente.

ENXAGUAMENTO E SECAGEM

- Enxague sob água corrente à temperatura ambiente durante, pelo menos, 1 minuto;
- durante o enxaguamento, escove meticulosamente todas as superfícies com uma escova macia (por exemplo, de nylon) durante, pelo menos, 30 segundos;
- lave cada orifício cego ou aberto com água corrente, pelo menos uma vez;
- enxague com água ultrapura à temperatura ambiente durante, pelo menos, 1 minuto;
- com cuidado, seque imediatamente com um pano suave que não largue pelos.

PROTOCOLO N.º 2

- Desmonte completamente a bandeja antes de limpar.

LIMPEZA

- Escove meticulosamente todas as superfícies com uma escova macia (por exemplo, de nylon) sob água corrente à temperatura ambiente (20 ± 5 °C) durante, pelo menos, 1 minuto, usando uma escova de nylon adaptada nas áreas de difícil acesso;
- mergulhe completamente numa solução de detergente enzimático durante 3 minutos a uma concentração de 8 ml/l;
- enquanto estiver submersa, escove meticulosamente todas as superfícies com uma escova macia (por exemplo, de nylon) durante, pelo menos, 1 minuto, usando uma escova de nylon adaptada nas áreas de difícil acesso;
- durante o tempo que estiverem submersa, desloque os dispositivos com 3 movimentos para trás e para a frente.

ENXAGUAMENTO E SECAGEM

- Enxague com água purificada durante, pelo menos, 1 minuto;
- durante o enxaguamento, escove meticulosamente todas as superfícies com uma escova macia (por exemplo, de nylon) durante, pelo menos, 30 segundos;
- com cuidado, seque imediatamente com um pano suave que não largue pelos.

PROTOCOLO N.º 3

LIMPEZA

- Escove meticulosamente todas as superfícies com uma escova macia (por exemplo, de nylon) sob água corrente à temperatura ambiente ($20 \pm 5^\circ\text{C}$) durante, pelo menos, 1 minuto;
- escove o interior do dispositivo com uma escova adaptada sob água corrente à temperatura ambiente durante, pelo menos, 30 segundos;
- mergulhe completamente numa solução de detergente enzimático durante 3 minutos a uma concentração de 8 ml/l;
- enquanto estiver submerso, escove meticulosamente todas as superfícies com uma escova macia (por exemplo, de nylon) durante, pelo menos, 1 minuto;
- enquanto estiver submerso, escove o interior do dispositivo com uma escova adaptada durante, pelo menos, 30 segundos;
- durante o tempo que estiverem submersos, desloque os dispositivos com 3 movimentos para trás e para a frente.

ENXAGUAMENTO E SECAGEM

- Enxague com água purificada durante, pelo menos, 1 minuto;
- durante o enxaguamento, escove meticulosamente todas as superfícies com uma escova macia (por exemplo, de nylon) durante, pelo menos, 30 segundos;
- durante o enxaguamento, escove o interior do dispositivo com uma escova adaptada durante, pelo menos, 30 segundos;
- com cuidado, seque imediatamente com um pano suave que não largue pelos.

PROTOCOLO N.º 4

- Se for o caso, desmonte totalmente a bandeja antes da limpeza.

LIMPEZA

- Escove meticulosamente todas as superfícies com uma escova macia (por exemplo, de nylon) sob água corrente à temperatura ambiente durante, pelo menos, 1 minuto, usando uma escova de nylon adaptada nas áreas de difícil acesso;
- mergulhe completamente numa solução de detergente enzimático durante 3 minutos a uma concentração de 8 ml/l;
- enquanto estiver submersa, escove meticulosamente todas as superfícies com uma escova macia (por exemplo, de nylon) durante, pelo menos, 1 minuto, usando uma escova de nylon adaptada nas áreas de difícil acesso;
- durante o tempo que estiverem submersos, desloque os dispositivos com 3 movimentos para trás e para a frente.

ENXAGUAMENTO E SECAGEM

- Enxague com água purificada durante, pelo menos, 1 minuto;
- durante o enxaguamento, escove meticulosamente todas as superfícies com uma escova macia (por exemplo, de nylon) durante, pelo menos, 30 segundos, usando uma escova de nylon adaptada nas áreas de difícil acesso;
- com cuidado, seque imediatamente com um pano suave que não largue pelos.

Os produtos e detergentes utilizados pela Anthogyr estão indicados no Anexo C.

B. LIMPEZA AUTOMÁTICA

A limpeza automática tem de ser realizada com um aparelho de lavagem e desinfecção térmica adequado, em conformidade com a norma ISO 15883-1 e de acordo com o seguinte programa. Este pode variar de acordo com o tipo de máquina utilizada; consulte as instruções do fabricante.

PROTOCOLO N.º 5

PRÉ-LIMPEZA MANUAL

- Mergulhe os artigos de teste numa solução de detergente enzimático a 8 ml/l durante, pelo menos, 5 minutos à temperatura ambiente (20 ± 5 °C);
- enquanto estiver submerso, escove todas as superfícies durante, pelo menos, 30 segundos com uma escova macia de nylon;
- para cada orifício cego ou aberto, use uma escova macia em nylon adaptada durante 30 segundos.

LIMPEZA AUTOMÁTICA

Ciclo	Tempo mínimo	Temperatura mínima	Tipo de detergente / água
Pré-limpeza	2 min	a frio (<45 °C)	Água corrente
Lavagem com detergente	5 min	a quente (50-60 °C)	Detergente enzimático
Neutralização	1 min	a frio (<45 °C)	Neutralizador
Enxaguamento	1 min	a frio (<45 °C)	Água corrente
Enxaguamento térmico	5 min	a quente (90 °C)	Água ultrapura
Secagem	10 min	a quente (60 °C)	Não se aplica

PROTOCOLO N.º 6

- Se for o caso, desmonte totalmente a bandeja antes da limpeza.

PRÉ-LIMPEZA MANUAL

- Mergulhe os artigos de teste numa solução de detergente enzimático a 8 ml/l durante, pelo menos, 5 minutos à temperatura ambiente (20 ± 5 °C);
- enquanto estiverem submersos, escove todas as superfícies durante, pelo menos, 30 segundos, usando uma escova macia de nylon.

LIMPEZA AUTOMÁTICA

Ciclo	Tempo mínimo	Temperatura mínima	Tipo de detergente / água
Pré-limpeza	2 min	a frio (<45 °C)	Água corrente
Lavagem com detergente	5 min	a quente (50-60 °C)	Detergente enzimático
Neutralização	1 min	a frio (<45 °C)	Neutralizador
Enxaguamento	1 min	a frio (<45 °C)	Água corrente
Enxaguamento térmico	5 min	a quente (90 °C)	Água ultrapura
Secagem	10 min	a quente (60 °C)	Não se aplica

PROTOCOLO N.º 7**LIMPEZA AUTOMÁTICA**

Ciclo	Tempo mínimo	Temperatura mínima	Tipo de detergente / água
Pré-limpeza	2 min	a frio (<45 °C)	Água corrente
Lavagem com detergente	5 min	a quente (50-60 °C)	Detergente enzimático
Neutralização	1 min	a frio (<45 °C)	Neutralizador
Enxaguamento	1 min	a frio (<45 °C)	Água corrente
Enxaguamento térmico	5 min	a quente (90 °C)	Água ultrapura
Secagem	10 min	a quente (60 °C)	Não se aplica

PROTOCOLO N.º 8

- Se for o caso, desmonte totalmente a bandeja antes da limpeza.

PRÉ-LIMPEZA MANUAL

- Mergulhe os artigos de teste numa solução de detergente enzimático a 8 ml/l durante, pelo menos, 5 minutos à temperatura ambiente (20 ± 5 °C);
- enquanto estiverem submersos, escove todas as superfícies durante, pelo menos, 30 segundos com uma escova macia de nylon.

LIMPEZA AUTOMÁTICA

Ciclo	Tempo mínimo	Temperatura mínima	Tipo de detergente / água
Pré-limpeza	4 min	a frio (<45 °C)	Água corrente
Lavagem com detergente	5 min	a quente (50-60 °C)	Detergente enzimático
Neutralização	3 min	a frio (< 50-60 °C)	Neutralizador
Enxaguamento	2 min	a quente (40 °C)	Água corrente
Enxaguamento térmico	2 min	a quente (40 °C)	Água ultrapura
Secagem	10 min	a quente (140 °C)	Não se aplica

Os produtos e detergentes utilizados pela Anthogyr estão indicados no Anexo C.

4. Esterilização

A. PREPARAÇÃO E MONTAGEM

Os kits, recipientes, caixas e instrumentos devem ser montados (de acordo com as instruções fornecidas com cada dispositivo) antes da esterilização.

Coloque o próprio dispositivo ou o kit num saco de esterilização selado em conformidade com a norma ISO 11607-1 e adequado à esterilização em autoclave.

Para a esterilização de um kit de stops de broca, assegure-se de que o kit está bloqueado antes de o colocar no saco de esterilização. A Anthogyr recomenda que o kit seja colocado na horizontal no autoclave (com a tampa virada para cima) para evitar que os stops de broca saiam.

Siga as recomendações e instruções de utilização e manutenção do fabricante do autoclave.

B. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE

A Anthogyr recomenda a esterilização em autoclave de classe B, de acordo com a norma NF EN 13060 para todos os dispositivos com o logótipo .

Os dispositivos não devem ser esterilizados sem terem sido limpos primeiro.

O aparelho de esterilização tem de ser aprovado e estar em conformidade com as normas aplicáveis. As recomendações e instruções de utilização do fabricante devem ser respeitadas.

➤ Realize um ciclo de esterilização de acordo com os seguintes parâmetros:

País	Parâmetros de esterilização	Tempo mínimo de secagem
União Europeia	Calor húmido (autoclave) Pré-vácuo 134 °C (0 °C/+2 °C) durante 3 minutos	10 minutos 45 minutos para o kit de cirurgia guiada INTEGRAL
França	Calor húmido (autoclave) Pré-vácuo 134 °C (0 °C/+2 °C) durante 18 minutos	10 minutos 45 minutos para o kit de cirurgia guiada INTEGRAL
Outros*	Calor húmido (autoclave) Pré-vácuo mínimo de 132 °C durante, pelo menos, 4 minutos	10 minutos 30 minutos para o kit de cirurgia guiada INTEGRAL

Para os componentes protéticos X-Base que se apresentam não estéreis com um material de coping n!ce PMMA:

País	Parâmetros de esterilização	Tempo mínimo de secagem
Todos os países	Calor húmido (autoclave) Deslocamento por gravidade 121 °C durante 30 minutos	30 minutos

➤ Deixe arrefecer à temperatura ambiente durante cerca de 10 minutos.

➤ Indique a data de esterilização e a data de validade na embalagem, de acordo com os dados do fabricante da embalagem (máximo 1 mês).

* Este ciclo não é aplicável aos tipos de referência OPBxxxxx (brocas com stop) e INKTOPDSxx (kits de brocas com stop). Para estas referências, consulte o ciclo da União Europeia.

5. Anexos

A. REFERÊNCIAS

AAMI TIR12: Designing, Testing, And Labeling Medical Devices Intended For Processing By Health Care Facilities: A Guide For Device Manufacturers.

AAMI TIR30: A Compendium Of Processes, Materials, Test Methods, And Acceptance Criteria For Cleaning Reusable Medical Devices.

ANSI/AAMI ST98:2022: Cleaning Validation Of Health Care Products - Requirements For Development And Validation Of A Cleaning Process For Medical Devices.

ISO 15883-1: Washer-desinfectors - Part 1: General requirements, terms and definitions and tests.

ISO 11607-1: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems.

ISO 17664 series: Processing of health care products.

ISO 17665-1: Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices.

NF EN 13060 series: Small steam sterilizers.

B. QUALIDADE DA ÁGUA

A água utilizada para limpeza, diluição de detergentes e enxaguamento deve ser controlada. É recomendada a utilização de água purificada (Ultra Pure Water ou Highly Purified Water) de acordo com as especificações da farmacopeia local.

Exemplo:

Propriedades	Valores-limite da Farmacopeia Europeia (Eur.Ph)
Condutividade	< 1,3 µS/cm a 25 °C
Bactérias	< 10 CFU/100 ml
Endotoxinas	< 0,25 EU/ml

C. PRODUTOS E DETERGENTES

A Anthogyr utilizou os seguintes produtos e detergentes para a aprovação dos diferentes protocolos. No entanto, poderão ser utilizados outros produtos e detergentes de acordo com a disponibilidade local. A aprovação destes produtos é da responsabilidade do utilizador.

LIMPEZA MANUAL E PRÉ-LIMPEZA MANUAL

Cidezyme (ASP) com uma concentração de 8 ml/l.

LIMPEZA AUTOMÁTICA

Detergente enzimático: neodisher Mediclean Dental (Dr. Weigert) com uma concentração de 2 ml/l.

Neutralizador: neodisher Z Dental (Dr. Weigert) com uma concentração de 1 ml/l.

D. PROTOCOLO DO DISPOSITIVO POR REFERÊNCIA

Limpeza manual	PROTOCOLO 1		
Limpeza automática	PROTOCOLO 5		
Referência	Designação	Referência	Designação
AAT00L	Captador de parafusos de acesso angulado	OPB3006L	Stop de broca longo Ø3,0 para implante com 6,5 mm de comprimento
AAT00L-4	Pinça de parafusos de acesso angulado (x4)	OPB3008C	Stop de broca curto Ø3,0 para implante com 8 mm de comprimento
AAT00L-M	Pinça de parafusos metálica de acesso angulado	GMVG36L	Mandril guiado Axiom® BL para casquilhos Ø3,6 - longo (L)
INCHECV	Chave hexagonal curta	GTP34G42S	Bisturi circular guiado de Ø3,4 para casquilhos G4,2
INCHELV	Chave hexagonal longa	GFI20L8G42	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø4,2 - L 8,0 mm
INCHEXLV	Chave hexagonal XL	GFI20L12G36	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø3,6 - L 12,0 mm
INCPM	Chave de mandril	GFI20L10G42	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø4,2 - L 10,0 mm
INEXM	Extensão de mandril	GMVG42S	Mandril guiado Axiom® BL para casquilhos Ø4,2 - curto (S)
INFB20	Broca esférica Ø2,0	GTIMG42S	Mandril guiado Axiom® TL para casquilhos Ø4,2 - curto (S)
INGFA	Guia de perfuração angulada	GCVG36S	Chave guiada Axiom® BL para casquilhos Ø3,6 - curta (S)
INGPPA	Guia de perfuração de paralelismo	GCVG36L	Chave guiada Axiom® BL para casquilhos Ø3,6 - longa (L)
INMHECV	Mandril hexagonal curto	GFI20L12G42	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø4,2 - L 12,0 mm
INMHELV	Mandril hexagonal longo	GTA34G36L	Macho de rosca de osso guiado de Ø3,4 para casquilhos Ø3,6 - longo (L)
INMHEXLV	Mandril hexagonal XL	GFI20L14G42	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø4,2 - L 14,0 mm
INPIL	Axiom® BL Chave manual de parafusos de implante (com chave de parafusos) - Longa	GTA34G42S	Macho de rosca de osso guiado de Ø3,4 para casquilhos Ø4,2 - curto (S)
INPIM	Axiom® BL Chave manual de parafusos de implante (com chave de parafusos) - Curta	GTA40G42L	Macho de rosca de osso guiado de Ø4,0 para casquilhos Ø4,2 - longo (L)
MUM100	Mandril para pilares Multi-Unit retos	GMVG36S	Mandril guiado Axiom® BL para casquilhos Ø3,6 - curto (S)
MUM100L	Mandril longo para pilar Multi-Unit reto	GBAG42S	Fresa de osso guiada de G4,2
MUW100	Chave para pilar Multi-Unit reto	GTP40G42S	Bisturi circular guiado de Ø4,0 para casquilhos G4,2
MUWS	Transportador MU Curto	GTIWG42S	Chave guiada Axiom® TL para casquilhos Ø4,2 - curta (S)
OPB3006C	Stop de broca curto Ø3,0 para implante com 6,5 mm de comprimento	GTIMG42L	Mandril guiado Axiom® TL para casquilhos Ø4,2 - longo (L)
GPDG50L	Fresa de ponta guiada G5,0 - larga (L)	GTP34G50S	Bisturi circular guiado de Ø3,4 para casquilhos G5,0

Limpeza manual	PROTOCOLO 1		
Limpeza automática	PROTOCOLO 5		
Referência	Designação	Referência	Designação
OPB3008L	Stop de broca longo Ø3,0 para implante com 8 mm de comprimento	GTP40G50S	Bisturi circular guiado de Ø4,0 para casquilhos G5,0
OPB3010C	Stop de broca curto Ø3,0 para implante com 10 mm de comprimento	GFI20L4G50	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø5,0 - L 4,5 mm
OPB3010L	Stop de broca longo Ø3,0 para implante com 10 mm de comprimento	GFI20L8G50	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø5,0 - L 8,0 mm
OPB3012L	Stop de broca longo Ø3,0 para implante com 12 mm de comprimento	GFI20L12G50	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø5,0 - L 12,0 mm
OPB3014L	Stop de broca longo Ø3,0 para implante com 14 mm de comprimento	GBAG36S	Fresa de osso guiada de G3,6
OPB3016L	Stop de broca longo Ø3,0 para implante com 16 mm de comprimento	GPDG36S	Fresa de ponta guiada G3,6 - corta (S)
OPB3018L	Stop de broca longo Ø3,0 para implante com 18 mm de comprimento	GPDG36L	Fresa de ponta guiada G3,6 - larga (L)
OPB3606C	Stop de broca curto Ø3,6 para implante com 6,5 mm de comprimento	GTP34G36S	Bisturi circular guiado de Ø3,4 para casquilhos G3,6
OPB3606L	Stop de broca longo Ø3,6 para implante com 6,5 mm de comprimento	GFI20L4G36	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø3,6 - L 4,5 mm
OPB3608C	Stop de broca curto Ø3,6 para implante com 8 mm de comprimento	GFI20L10G36	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø3,6 - L 10,0 mm
OPB3608L	Stop de broca longo Ø3,6 para implante com 8 mm de comprimento	GFI20L6G36	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø3,6 - L 6,5 mm
OPB3610C	Stop de broca curto Ø3,6 para implante com 10 mm de comprimento	GFI20L4G42	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø4,2 - L 4,5 mm
OPB3610L	Stop de broca longo Ø3,6 para implante com 10 mm de comprimento	GFI20L6G42	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø4,2 - L 6,5 mm
OPB3612L	Stop de broca longo Ø3,6 para implante com 12 mm de comprimento	GTA34G42L	Macho de rosca de osso guiado de Ø3,4 para casquilhos Ø4,2 - longo (L)
OPB3614L	Stop de broca longo Ø3,6 para implante com 14 mm de comprimento	GMVG42L	Mandril guiado Axiom® BL para casquilhos Ø4,2 - longo (L)
OPB3616L	Stop de broca longo Ø3,6 para implante com 16 mm de comprimento	GTIWG42L	Chave guiada Axiom® TL para casquilhos Ø4,2 - longa (L)
OPB3618L	Stop de broca longo Ø3,6 para implante com 18 mm de comprimento	GFI20L6G50	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø5,0 - L 6,5 mm
OPB4206C	Stop de broca curto Ø4,2 para implante com 6,5 mm de comprimento	GCVG42S	Chave guiada Axiom® BL para casquilhos Ø4,2 - curta (S)
OPB4206L	Stop de broca longo Ø4,2 para implante com 6,5 mm de comprimento	GCVG42L	Chave guiada Axiom® BL para casquilhos Ø4,2 - longa (L)
OPB4208C	Stop de broca curto Ø4,2 para implante com 8 mm de comprimento	GBAG50S	Fresa de osso guiada de G5,0
OPB4208L	Stop de broca longo Ø4,2 para implante com 8 mm de comprimento	GPDG50S	Fresa de ponta guiada G5,0 - corta (S)
OPB4210C	Stop de broca curto Ø4,2 para implante com 10 mm de comprimento	GFI20L14G50	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø5,0 - L 14,0 mm
OPB4210L	Stop de broca longo Ø4,2 para implante com 10 mm de comprimento	GTA34G50S	Macho de rosca de osso guiado de Ø3,4 para casquilhos Ø5,0 - curto (S)

Limpeza manual	PROTOCOLO 1		
Limpeza automática	PROTOCOLO 5		
Referência	Designação	Referência	Designação
OPB4212L	Stop de broca longo Ø4,2 para implante com 12 mm de comprimento	GTA34G50L	Macho de rosca de osso guiado de Ø3,4 para casquilhos Ø5,0 - longo (L)
OPB4214L	Stop de broca longo Ø4,2 para implante com 14 mm de comprimento	GTA40G50L	Macho de rosca de osso guiado de Ø4,0 para casquilhos Ø5,0 - longo (L)
OPB4806C	Stop de broca curto Ø4,8 para implante com 6,5 mm de comprimento	GTA40G50S	Macho de rosca de osso guiado de Ø4,0 para casquilhos Ø5,0 - curto (S)
OPB4806L	Stop de broca longo Ø4,8 para implante com 6,5 mm de comprimento	GCVG50S	Chave guiada Axiom® BL para casquilhos Ø5,0 - curta (S)
OPB4808C	Stop de broca curto Ø4,8 para implante com 8 mm de comprimento	GMVG50L	Mandril guiado Axiom® BL para casquilhos Ø5,0 - longo (L)
OPB4808L	Stop de broca longo Ø4,8 para implante com 8 mm de comprimento	GCVG50L	Chave guiada Axiom® BL para casquilhos Ø5,0 - longa (L)
OPB4810C	Stop de broca curto Ø4,8 para implante com 10 mm de comprimento	GTIMG50S	Mandril guiado Axiom® TL para casquilhos Ø5,0 - curto (S)
OPB4810L	Stop de broca longo Ø4,8 para implante com 10 mm de comprimento	GTIWG50S	Chave guiada Axiom® TL para casquilhos Ø5,0 - curta (S)
OPB4812L	Stop de broca longo Ø4,8 para implante com 12 mm de comprimento	GTA46G50S	Macho de rosca de osso guiado de Ø4,6 para casquilhos Ø5,0 - curto (S)
OPB4814L	Stop de broca longo Ø4,8 para implante com 14 mm de comprimento	GTA46G50L	Macho de rosca de osso guiado de Ø4,6 para casquilhos Ø5,0 - longo (L)
OPCF100	Axiom® 2,8 Chave de garra roscada	GMVG50S	Mandril guiado Axiom® BL para casquilhos Ø5,0 - curto (S)
OPCL150	CHAVE MANUAL LOCATOR®	GTIMG50L	Mandril guiado Axiom® TL para casquilhos Ø5,0 - longo (L)
OPCL3E1	CHAVE LOCATOR® 3 EM 1	GTIWG50L	Chave guiada Axiom® TL para casquilhos Ø5,0 - longa (L)
OPCS100	Chave cirúrgica manual	GTA40G42S	Macho de rosca de osso guiado de Ø4,0 para casquilhos Ø4,2 - curto (S)
OPCV060	Chave manual curta - 18 mm	GCBG36L	Broca cônica cortical de G2,4 para casquilhos G3,6 - longa (L)
OPCV110	Chave manual média - 24 mm	GCBG42L	Broca cônica cortical de G2,4 para casquilhos G4,2 - longa (L)
OPCV160	Chave manual longa - 30 mm	GFI20L10G50	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø5,0 - L 10,0 mm
OPFE24L	Broca escalonada Ø2,0/ 2,4 - Longa	INBM100L-3	Mandril esférico longo (x3)
OPFE24S	Broca escalonada Ø2,0/ 2,4 - Curta	INBM100S-3	Mandril esférico curto (x3)
OPFE30L	Broca escalonada Ø2,4/ 3,0 - Longa	INBM100XL-3	Mandril esférico XL (x3)
OPFE30S	Broca escalonada Ø2,4/ 3,0 - Curta	INBW100L-3	Chave esférica longa (x3)
OPFE36L	Broca escalonada Ø3,0/ 3,6 - Longa	INBW100S-3	Chave esférica curta (x3)
OPFE36S	Broca escalonada Ø3,0/ 3,6 - Curta	INBW100XL-3	Chave esférica XL (x3)
OPFE42L	Broca escalonada Ø3,6/ 4,2 - Longa	ILLABSTARTKIT	inLink® / Axiom® Multi-Level Kit de laboratório
OPFE42S	Broca escalonada Ø3,6/ 4,2 - Curta	OPAF001	Pilar de prova ANG. 15° ALT. 0,75
OPFE48L	Broca escalonada Ø4,2/ 4,8 - Longa	OPAF002	Pilar de prova ANG. 23° ALT. 0,75
OPFE48S	Broca escalonada Ø4,2/ 4,8 - Curta	OPAF00-7	Pilar de prova ANG. 7° ALT. 0

Limpeza manual	PROTOCOLO 1		
Limpeza automática	PROTOCOLO 5		
Referência	Designação	Referência	Designação
OPFEL-6	Embalagem de 6 brocas longas	OPAF011	Pilar de prova ANG. 15° ALT. 1,5
OPFES-6	Embalagem de 6 brocas curtas	OPAF012	Pilar de prova ANG. 23° ALT. 1,5
OPFESL-12	Embalagem de 12 brocas C/L	OPAF01-7	Pilar de prova ANG. 7° ALT. 1,5
OPFI20250	Broca inicial helicoidal Ø2,0 x 25,0	OPAF021	Pilar de prova ANG. 15° ALT. 2,5
OPFI20L	Broca inicial Ø2,0 - Longa	OPAF022	Pilar de prova ANG. 23° ALT. 2,5
OPFI20S	Broca inicial Ø2,0 - Curta	OPAF02-7	Pilar de prova ANG. 7° ALT. 2,5
OPJC001	Axiom® Medidor de profundidade de função dupla	OPAF031	Pilar de prova ANG. 15° ALT. 3,5
OPJCSHS	Medidor de altura Healfit SH	OPAF032	Pilar de prova ANG. 23° ALT. 3,5
OPJD020	Medidor de profundidade Ø2,0	OPAF03-7	Pilar de prova ANG. 7° ALT. 3,5
OPJD024	Medidor de profundidade Ø2,4	OPAF041	Pilar de prova ANG. 15° ALT. 4,5
OPJD026	Medidor de profundidade Axiom® 2,8 Ø2,6	OPAF042	Pilar de prova ANG. 23° ALT. 4,5
OPJD028	Medidor de profundidade Axiom® 2,8 Ø2,0	OPAF04-7	Pilar de prova ANG. 7° ALT. 4,5
OPJD030	Medidor de profundidade Ø3	OPSF006	Pilar de prova reto H0,75 H6
OPJD036	Medidor de profundidade Ø3,6	OPSF016	Pilar de prova reto H1,5 H6
OPJD042	Medidor de profundidade Ø4,2	OPSF026	Pilar de prova reto H2,5 H6
OPJD048	Medidor de profundidade Ø4,8	OPSF036	Pilar de prova reto H3,5 H6
OPML230	MANDRIL LOCATOR®	OPSF046	Pilar de prova reto H4,5 H6
OPMV180	Mandril de implante Axiom® curto (23 mm)	OPAF210	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 0° ALT. 1
OPMV215	Mandril de implante Axiom® médio (27 mm)	OPAF211	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 7° ALT. 1,0
OPMV250	Mandril de implante longo Axiom® (32 mm)	OPAF212	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 15° ALT. 1,0
OPPO15150	Broca de ponteiro Ø1,5	OPAF213	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 23° ALT. 1,0
OPR20	Escareador de Lindemann Ø2,0	OPAF220	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 0° ALT. 2,5
OPTA34L	Dispositivo de rosca para implante Ø3,4 - Longo	OPAF221	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 7° ALT. 2,5
OPTA-4	Embalagem de 4 dispositivos de rosca	OPAF222	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 15° ALT. 2,5
OPTA40L	Dispositivo de rosca para implante Ø4,0 - Longo	OPAF223	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 23° ALT. 2,5
OPTA46L	Dispositivo de rosca para implante Ø4,6 - Longo	OPAF240	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 0° ALT. 4,0
OPTA52L	Dispositivo de rosca para implante Ø5,2 - Longo	OPAF241	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 7° ALT. 4,0
PXTA40L	Dispositivo de rosca Axiom® PX Ø4,0 para osso denso - longo	OPAF242	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 15° ALT. 4,0
PXTA46L	Dispositivo de rosca Axiom® PX Ø4,6 para osso denso - longo	OPAF243	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 23° ALT. 4,0

Limpeza manual	PROTOCOLO 1		
Limpeza automática	PROTOCOLO 5		
Referência	Designação	Referência	Designação
PXTA34L	Dispositivo de rosca Axiom® PX Ø3,4 para osso denso - longo	OPAF250	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 0° ALT. 5,5
PXTA52L	Dispositivo de rosca Axiom® PX Ø5,2 para osso denso - longo	OPAF251	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 7° ALT. 5,5
PXFE38S	Broca escalonada Axiom® Ø3,6 / 3,8 - curta	OPAF252	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 15° ALT. 5,5
PXTAL-4	Embalagem de 4 dispositivos de rosca Axiom® PX para osso denso : Ø3,4 - Ø4,0 - Ø4,6 - Ø5,2	OPAF253	Axiom® 2,8 Pilar de prova ANG. 23° ALT. 5,5
OPR8	Anel Ø8	INCP070	CHAVE INGLESA PLANA 7MM EM AÇO INOXIDÁVEL
OPR10	Anel Ø10	INEXPL	Dispositivo de desmontagem & garra longo para pilar Axiom® REG/PX
OPFFP	Pino para broca fresagem Axiom® BL	INEXPR	CONJUNTO DE EXTRATOR DE PILARES AXIOM
OPFF45	Broca fresagem Axiom® BL Ø4,5 con pino	INEXPS	Dispositivo de desmontagem & garra curto para pilar Axiom® REG/PX
OPFF53	Broca fresagem Axiom® BL Ø5,3 con pino	INKITEXPR	KIT DE EXTRAÇÃO DE PILARES FRATURADOS
OPFF66	Broca fresagem Axiom® BL Ø6,6 con pino	INMDL	Mandril de extração de parafusos L
INGUIDE	Kit de pré-posicionamento implantar Axiom® MG	INMDS	Mandril de extração de parafusos S
PXFE32S	Broca escalonada Axiom® Ø3,0 / 3,2 - curta	OPEXT125	REMOVEDOR DE PARAFUSOS M1.6
OPFF-3	Embalagem de 3 brocas fresagem Axiom® BL con pinos : Ø4,5 - Ø5,3 - Ø6,6	OPFBR16	STOP DE BROCA DE REPROCESSAMENTO 1,6 MM
PXFE44S	Broca escalonada Axiom® Ø4,2 / 4,4 - curta	OPGU125	GUIA DE PERFURAÇÃO AXIOM REG/PX
PXFE50S	Broca escalonada Axiom® Ø4,8 / 5,0 - curta	OPKITRET	KIT DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS FRATURADOS
PXFES-4	Pack de 4 brocas escalonadas Axiom® - curtas	OPTABRM2	Macho de rosca manual de reprocessamento M2
OPPO15	Broca piloto Ø1,5 para kit de pré-posicionamento implantar Axiom® MG	OPTAM16	MACHO DE ROSCA M1.6 x 0,35
OPCV028	Axiom® 2,8 Chave manual	INEXPRBL	EXTRATOR DE PILARES FRATURADOS BL
OPFE26250	Broca helicoidal Axiom® 2,8 - Ø2,6	OPGU180	GUIA DE REPARAÇÃO AXIOM BL Ø1,80
OPMV028	Axiom® 2,8 Mandril de implante	INMD075	MANDRIL DE DESAPARAFUSAMENTO Ø0,75
OPTA28250	Axiom® 2,8 Promotor de rosca para implante	INCM	CHAVE DE SUPORTE DO MANDRIL
OPFP20	Pino de fixação Ø2,0	TOPGU180	GUIA DE REPARAÇÃO AXIOM TL Ø1,80
OPFPD20	Broca de pino Ø2,0	ILTAM280	MACHO DE ROSCA TL M2.8
OPGDM-20S	Broca guiada FIRST DRILL - Ø2,0 - Curta	HEAN004	ANÁLOGO DE MANUSEAMENTO

Limpeza manual	PROTOCOLO 1		
Limpeza automática	PROTOCOLO 5		
Referência	Designação	Referência	Designação
INSETIGM	Pack de brocas para cirurgia guiada FIRST DRILL - Pack parcial	INEXPHK	Chave de contra-torque para ferramenta de extração de arpão
OPGDM-20L	Broca guiada FIRST DRILL - Ø2,0 - Longa	INEXPHL	Ferramenta de extração de arpão para pilares Axiom BL&TL L
OPGPDM	Broca de ponteiro guiada com stop	INEXPHS	EXTRATOR DE PILARES COM REBARBA S
OPGDM-20XL	Broca guiada FIRST DRILL - Ø2,0 - Extra-longa	INEXPHSL-KIT	Conjunto de extração de arpão para pilares Axiom BL&TL S&L
OPGPDMS	Broca de ponteiro guiada sem stop Ø2,0 - Curta	10420	Acoplamento esterilizável em aço inox - forma Y (fornecido com 2 tubos silicone)
INSETIGMF	Pack de brocas para cirurgia guiada FIRST DRILL - Pack completo	10436	Tampas de proteção para fibra ótica ou LED
OPGPDMXL	Broca de ponteiro guiada sem stop Ø2,0 - Extra-longa	2044	Grampo para tubo de irrigação
OPMVTOST	Mandril de implante trilobado	6458	Regra
PROTHSET-ML	Conjunto protét. inicial: Mandris longos	HERETOUCHE	IMPLANTE DE CONJUNTO APERFEIÇOADO HE
PROTHSET-MS	Conjunto protét. inicial: Mandris curtos	HETI001	PILAR DE PROVA HE 00° ALT1,0
PROTHSET-WL	Conjunto protét. inicial: Chaves longas	HETI002	PILAR DE PROVA HE 00° ALT2,0
TIM100L	Axiom® TL Implante / inLink® Mandril de pilar - Longo	HETI003	PILAR DE PROVA HE 00° ALT3,0
TIM100S	Axiom® TL Implante / inLink® Mandril de pilar - Curto	HETI004	PILAR DE PROVA HE 15° ALT1,0
TIW100L	Axiom® TL / inLink® Chave de pilar, longa	HETI005	PILAR DE PROVA HE 15° ALT2,0
INBM100L	Mandril esférico longo	HETI006	PILAR DE PROVA HE 25° ALT1,0
INBM100S	Mandril esférico curto	HETI007	PILAR DE PROVA HE 25° ALT2,0
INBW100L	Chave esférica comprida	INCHIP	CHAVE PARA PRÓTESE PARAFUSADA
INBW100S	Chave esférica curta	INCOECI	CHAVE OCTOGONAL STD/IMPL
KITUPOPP3	Kit de atualização para Axiom® Multi Level® Kit protético	INCOELI	CHAVE OCTOGONAL COMPRIDA/IMPL
KITUPOPS3	Kit de atualização para Axiom® Multi Level® Kit cirúrgico	INCOERI	CHAVE OCTOGONAL CURTA/IMPL
PROTHSET-WS	Conjunto protét. inicial: Chaves curtas	INCOIO	Chave octogonal
TIW100S	Axiom® TL / inLink® Chave de pilar, longa	INFA30120	BROCA HELICOIDAL Ø3,0 x 12
TOPFF24N	Broca fresagem Axiom® TL N Ø2,4	INFA30200	BROCA HELICOIDAL Ø3,0 x 20
TOPFF30R	Broca fresagem Axiom® TL R Ø3,0	INFA32120	BROCA HELICOIDAL Ø3,25 x 12
TOPFF36R	Broca fresagem Axiom® TL R Ø3,6	INFA32200	BROCA HELICOIDAL Ø3,25 x 20
TOPFF42R	Broca fresagem Axiom® TL R Ø4,2	INFA35120	BROCA HELICOIDAL Ø3,5 x 12
TOPFF-7	Embalagem de 7 brocas fresagem Axiom® TL N/R : Ø2,4 - Ø3,0 - Ø3,6 - Ø4,2	INFA35200	BROCA HELICOIDAL Ø3,5 x 20
TOPFF24R	Broca fresagem Axiom® TL R Ø2,4	INFA40120	BROCA HELICOIDAL Ø4,0 x 12
TOPFF36N	Broca fresagem Axiom® TL N Ø3,6	INFA40200	BROCA HELICOIDAL Ø4,0 x 20
TOPFF30N	Broca fresagem Axiom® TL N Ø3,0	INFA45120	BROCA HELICOIDAL Ø4,5 x 12

Limpeza manual	PROTOCOLO 1		
Limpeza automática	PROTOCOLO 5		
Referência	Designação	Referência	Designação
INDG035	Bisturi circular - Ø3,5	INFA45200	BROCA HELICOIDAL Ø4,5 x 20
KITINB	Kit de stops para brocas - Mini Implante	INFEHE4130	BROCA DE FRESAGEM Ø4,10 - Ø3,00
INFH20170	Broca helicoidal Ø2,0 X 17	INFEHE4132	BROCA DE FRESAGEM Ø4,1 - Ø3,25
INJPAPF150200	Calibrador de profundidade e paralelismo - Ø1,5/Ø2,0	INFEHE4135	BROCA DE FRESAGEM Ø4,1 - Ø3,50
INFH15170	Broca helicoidal Ø1,5 X 17	INFEHE5040	BROCA DE FRESAGEM Ø5,0 - Ø4,00
INB2004	Stop para broca - Mini Implante - Ø2,0 - Perfuração 4 mm	INFH20080	BROCA HELICOIDAL Ø2,0 x 8,0
INB2010	Stop para broca - Mini Implante - Ø2,0 - Perfuração 10 mm	INFH20100	BROCA HELICOIDAL Ø2,0 x 10
INB2012	Stop para broca - Mini Implante - Ø2,0 - Perfuração 12 mm	INFH20115	BROCA HELICOIDAL Ø2,0 x 11,5
INB2014	Stop para broca - Mini Implante - Ø2,0 - Perfuração 14 mm	INFH20130	BROCA HELICOIDAL Ø2,0 x 13
INBM100XL	Mandril esférico XL	INFH20150	BROCA HELICOIDAL Ø2,0 x 15
INBW100XL	Chave esférica XL	INJPA	INDICADOR PARALELISMO Ø2,0/Ø3
PS502107	Micro caixa para armazenamento e esterilização de instrumentos cirúrgicos - vazia	INJPFG	INDICADOR PROFUNDIDADE GRADUAD
OPFE54S	Broca escalonada Ø4,8/ 5,4 - Curta	INMHICP	MANDRIL HEXA CURTO/PARAF PRÓT
OPFE60S	Broca escalonada Ø5,4/ 6,0 - Curta	INMHILP	MANDRIL HEXA COMPR/PARAF PRÓT
OPJD054	Medidor de profundidade Ø5,4 mm	INMOECI	MANDRIL OCTOGONAL STD/IMPL
OPJD060	Medidor de profundidade Ø6,0 mm	INMOELI	MANDRIL OCTOGONAL COMP/IMPL
OPB5406C	Stop de broca curto Ø5,4 para implante com 6,5 mm de comprimento	INMOERI	OI MANDRIL TRANSP. IMPLANTE S
OPB5408C	Stop de broca curto Ø5,4 para implante com 8 mm de comprimento	INMOICO	Mandril octogonal curto/O'Ring
OPB5410C	Stop de broca curto Ø5,4 para implante com 10 mm de comprimento	INMOILO	Mandril octogonal longo/O'Ring
OPB6006C	Stop de broca curto Ø6 para implante com 6,5 mm de comprimento	INTA35150	FORMAD. ROSCA ANTHOFIT Ø3,5x15
OPB6008C	Stop de broca curto Ø6 para implante com 8 mm de comprimento	INTA37150	FORMAD ROSCA ANTHOFIT Ø3,75x15
OPB6010C	Stop de broca curto Ø6 para implante com 10 mm de comprimento	INTA40150	FORMAD. ROSCA ANTHOFIT Ø4,0x15
GFE24L6G36	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø3,6 - L 6,5 mm	INTA50130	FORMAD. ROSCA ANTHOFIT Ø5,0x13
GFE30L6G36	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø3,6 - L 6,5 mm	OIRETOUCHE	IMPLANTE DE KIT APERFEIÇOADO OI
GFE30L8G36	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø3,6 - L 8,0 mm	11410	Mandril para módulo de calibração para motor Implanteo®
GFE30L10G36	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø3,6 - L 10,0 mm	ATD082	Chave de fenda para ponta aramada
GFE24L6G42	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø4,2 - L 6,5 mm	OPCP160	CHAVE PILAR CÔNICO

Limpeza manual	PROTOCOLO 1		
Limpeza automática	PROTOCOLO 5		
Referência	Designação	Referência	Designação
GFE24L14G42	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø4,2 - L 14,0 mm	OPMP250	MANDRIL PILAR CÔNICO
GFE30L10G42	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø4,2 - L 10,0 mm	6940	ADAPTADOR DE GANCHO
GFE24L8G36	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø3,6 - L 8,0 mm	12430	Bico de pulverização para ref 12400X e 12400XLED
GFE30L12G36	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø3,6 - L 12,0 mm	OPIP100	Ponta de pilar 0° e 7°
GFE24L8G42	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø4,2 - L 8,0 mm	OPIP200	Ponta de pilar 15° e 23°
GFE24L12G42	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø4,2 - L 12,0 mm	OPIP400	Ponta de impacto protética definitiva
GFE30L8G42	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø4,2 - L 8,0 mm	2791_T	3 ESCAREADORES MOOSER
GFE24L10G36	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø3,6 - L 10,0 mm	2792_T	3 ESCAREADORES MOOSER
GFE24L10G42	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø4,2 - L 10,0 mm	2891_T	3 ESCAREADORES CÔNICOS DE CILINDRO AMARELO
GFE30L12G42	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø4,2 - L 12,0 mm	2892_T	3 ESCAREADORES CÔNICOS DE CILINDRO VERMELHO
GFE30L14G42	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø4,2 - L 14,0 mm	2893_T	3 ESCAREADORES CÔNICOS DE CILINDRO AZUL
GFE36L8G42	Broca guiada Ø3,0/3,6 para casquilhos Ø4,2 - L 8,0 mm	2894_T	3 ESCAREADORES CÔNICOS DE CILINDRO VERDE
GFE36L6G42	Broca guiada Ø3,0/3,6 para casquilhos Ø4,2 - L 6,5 mm	2895_T	3 ESCAREADORES CÔNICOS DE CILINDRO PRETO
GFE36L10G42	Broca guiada Ø3,0/3,6 para casquilhos Ø4,2 - L 10,0 mm	5480_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES
GFE36L12G42	Broca guiada Ø3,0/3,6 para casquilhos Ø4,2 - L 12,0 mm	5481_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES
GFE30L6G42	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø4,2 - L 6,5 mm	5482_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES
GFE24L12G36	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø3,6 - L 12,0 mm	5483_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES
GFE30L14G36	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø3,6 - L 14,0 mm	5485_T	TUBO DE 3 PORTAS
GFE24L14G36	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø3,6 - L 14,0 mm	5520_T	SACO DE 3 RETIFICADORES DE RAÍZES
GFE36L14G42	Broca guiada Ø3,0/3,6 para casquilhos Ø4,2 - L 14,0 mm	5521_T	SACO DE 3 RETIFICADORES DE RAÍZES
GFE24L8G50	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø5,0 - L 8,0 mm	5522_T	TUBO DE 3 RETIFICADORES DE RAÍZES
GFE30L8G50	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø5,0 - L 8,0 mm	5523_T	TUBO DE 3 RETIFICADORES DE RAÍZES
GFE42L8G50	Broca guiada Ø3,6/4,2 para casquilhos Ø5,0 - L 8,0 mm	5600_T	TUBO DE 3 RETIFICADORES DE RAÍZES

Limpeza manual	PROTOCOLO 1		
Limpeza automática	PROTOCOLO 5		
Referência	Designação	Referência	Designação
GFE42L10G50	Broca guiada Ø3,6/4,2 para casquilhos Ø5,0 - L 10,0 mm	5601_T	TUBO DE 3 RETIFICADORES DE RAÍZES
GFE42L12G50	Broca guiada Ø3,6/4,2 para casquilhos Ø5,0 - L 12,0 mm	5602_T	TUBO DE 3 RETIFICADORES DE RAÍZES
GFE24L6G50	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø5,0 - L 6,5 mm	5603_T	TUBO DE 3 RETIFICADORES DE RAÍZES
GFE24L14G50	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø5,0 - L 14,0 mm	5604	TUBO DE 4 RETIFICADORES DE RAÍZES
GFE30L6G50	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø5,0 - L 6,5 mm	5608_Q	50 STOPS PARA ESCAREADOR
GFE30L10G50	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø5,0 - L 10,0 mm	5609_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES
GFE30L12G50	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø5,0 - L 12,0 mm	5610_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES LONGOS
GFE30L14G50	Broca guiada Ø2,4/3,0 para casquilhos Ø5,0 - L 14,0 mm	5611_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES
GFE36L10G50	Broca guiada Ø3,0/3,6 para casquilhos Ø5,0 - L 10,0 mm	5612_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES LONGOS
GFE36L12G50	Broca guiada Ø3,0/3,6 para casquilhos Ø5,0 - L 12,0 mm	5613_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES
GFE24L10G50	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø5,0 - L 10,0 mm	5614_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES LONGOS
GFE24L12G50	Broca guiada Ø2,0/2,4 para casquilhos Ø5,0 - L 12,0 mm	5615_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES
GFE36L6G50	Broca guiada Ø3,0/3,6 para casquilhos Ø5,0 - L 6,5 mm	5616_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES LONGOS
GFE36L8G50	Broca guiada Ø3,0/3,6 para casquilhos Ø5,0 - L 8,0 mm	5617_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES
GFE36L14G50	Broca guiada Ø3,0/3,6 para casquilhos Ø5,0 - L 14,0 mm	5618_T	TUBO DE 3 ESCAREADORES
GFE42L6G50	Broca guiada Ø3,6/4,2 para casquilhos Ø5,0 - L 6,5 mm	5475	CHAVE PARA PILAR TVS 1
GFE42L14G50	Broca guiada Ø3,6/4,2 para casquilhos Ø5,0 - L 14,0 mm	5476	CHAVE PARA PILAR TVS 2
OPFP20-ET	PINO DE FIXAÇÃO Ø2,0	5477	CHAVE PARA PILAR TVS 3
TIMTOST	MANDRIL IMPLANTE TL OSTEÓTOMO	5478	CHAVE PARA PILAR TVS 4
GTP46G50S	Bisturi circular guiado de Ø4,6 para casquilhos G5,0	5490	CHAVE PARA PILAR RVS 1
GPDG42S	Fresa de punta guiada G4,2 - corta (S)	5491	CHAVE PARA PILAR RVS 2
GCBG50S	Broca cônica cortical de G2,4 para casquilhos G5,0 - curta (S)	5492	CHAVE PARA PILAR RVS 3
GCBG50L	Broca cônica cortical de G2,4 para casquilhos G5,0 - longa (L)	5493	CHAVE PARA PILAR RVS 4
GPDG42L	Fresa de punta guiada G4,2 - larga (L)	XP411	Suporte do micromotor Xpert Unit®
GCBG36S	Broca cônica cortical de G2,4 para casquilhos G3,6 - curta (S)	XP412	Clipes de fixação da linha de irrigação (x10) para Xpert Unit®

Limpeza manual	PROTOCOLO 1		
Limpeza automática	PROTOCOLO 5		
Referência	Designação	Referência	Designação
GCBG42S	Broca cônica cortical de G2,4 para casquilhos G4,2 - curta (S)	XP415	Potência para motor Xpert Unit
GFI20L8G36	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø3,6 - L 8,0 mm	10430	Agulha aplicação interna spray Mont Blanc®
GFI20L14G36	Broca inicial guiada de Ø2,0 para casquilhos Ø3,6 - L 14,0 mm	AATool-ET	PINÇA PARA PARAFUSOS AA
GTA34G36S	Macho de rosca de osso guiado de Ø3,4 para casquilhos Ø3,6 - curto (S)	OPFI15S	BROCA CURTA Ø1,5
OPFI15L	BROCA LONGA Ø1,5		

Limpeza manual	PROTOCOLO 1 para instrumentos; PROTOCOLO 2 para bandejas
Limpeza automática	PROTOCOLO 5 para instrumentos; PROTOCOLO 6 para bandejas
Referência	Designação
INMODOPP	KIT PROTÉTICO AXIOM
INMODOPS2	KIT CIRÚRGICO AXIOM
INMODCP	Kit cirúrgico Axiom® para osso denso - completo
INMODOP28	Axiom® 2,8 Kit cirúrgico - completo
INMODIGM	Kit para cirurgia guiada FIRST DRILL - Completo
INMODOPP3	Axiom® Multi Level® Kit protético - completo
INMODOPS3	Axiom® Multi Level® Kit cirúrgico - completo
INMODMIO	Kit Quirúrgico - Mini Implante - Completo
INMODOPS3L	Kit cirúrgico Axiom® Multi Level® incluindo grandes diâmetros
INMODHES	MÓDULO HE STRAIGHT
INMODPRH	MÓDULO PRÓTESE

Limpeza manual	PROTOCOLO 2
Limpeza automática	PROTOCOLO 6
Referência	Designação
INMODHESV	MÓDULO HE STRAIGHT VAZIO
INMODOPPV	KIT PROTÉTICO AXIOM VAZIO
INMODOPS2V	KIT CIRÚRGICO AXIOM VAZIO
INMODOPSAKV	Kit adicional Axiom®
INMODCPV	Kit cirúrgico Axiom® para osso denso - vazio
INMODOP28V	KIT CIRÚRGICO AXIOM Ø2,8 VAZIO
INMODIGMV	Kit para cirurgia guiada FIRST DRILL - Vazio
INMODOPP3V	Axiom® Multi Level® Kit protético - vazio
INMODOPS3V	Axiom® Multi Level® Kit cirúrgico - vazio
INMODMIOV	Kit Quirúrgico - Mini Implante - Vazio
INMODOPS3LV	Kit cirúrgico Axiom® Multi Level® incluindo grandes diâmetros - vazio

Limpeza manual	PROTOCOLO 3		
Limpeza automática	PROTOCOLO 7		
Referência	Designação	Referência	Designação
OPBASE-S45	AXIOM - S TIBASE L	ILGC110-R	inLink® R - Pilar provisório 10° guia
OPFLEX403	FLEXIBASE AXIOM Ø4 HC 3,5	ILGC115-R	inLink® R - Pilar provisório 15° guia
OPFLEX503	FLEXIBASE AXIOM Ø5 HC 3,5	ILGC110-N	inLink® N - Pilar provisório 10° guia
OPFLEX413-ET	FLEXIBASE BL Ø4 HC 3,5 H1,5	ILGC115-N	inLink® N - Pilar provisório 15° guia
MUFLEX-ET	FLEXIBASE MU Ø4,8	TC100-N-P	Pilar provisional Axiom® TL - N - Ø4,0 - no indexado
AX15227B42-ET	AXIN BASE AXIOM BL Ø4 H2,5	TC100-R-P	Pilar provisional Axiom® TL - R - Ø4,8 - no indexado
OPFLEX423-ET	FLEXIBASE BL Ø4 HC 3,5 H2,5	OPAT311	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø3,4 - 15° - AG 1,5
OPFLEX433-ET	FLEXIBASE BL Ø4 HC 3,5 H3,5	OPAT31-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø3,4 - 7° - AG 1,5
OPFLEX523-ET	FLEXIBASE BL Ø5 HC 3,5 H2,5	OPAT321	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø3,4 - 15° - AG 2,5
OPTS160-ET	PARAFUSO PROTÉT. M1,6 TIT BLK	OPAT32-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø3,4 - 7° - AG 2,5
MU140Z-ET	PARAFUSO DEFINITIVO TI M1,4 MU	OPAT331	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø3,4 - 15° - AG 3,5
OPFLEX513-ET	FLEXIBASE BL Ø5 HC 3,5 H1,5	OPAT33-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø3,4 - 7° - AG 3,5
OPFLEX533-ET	FLEXIBASE BL Ø5 HC 3,5 H3,5	OPAT341	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø3,4 - 15° - AG 4,5
MUNFLEX-ET	FLEXIBASE MUN Ø4,0	OPAT34-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø3,4 - 7° - AG 4,5
MUAA140-ET	PARAFUSO PROTÉTICO M1,4 AA	OPAT400	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 0° - AG 0,75
AX15227B41-ET	AXIN BASE AXIOM BL Ø4 H1,5	OPAT401	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 15° - AG 0,75
MUAA141-ET	PARAFUSO PROTÉTICO M1,4 AA TI	OPAT402	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 23° - AG 0,75
MU140-ET	PARAFUSO M1,4 MU BT	OPAT40-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 7° - AG 0,75
AX15227B51-ET	AXIN BASE AXIOM BL Ø5 H1,5	OPAT410	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 0° - AG 1,5
AX15227B52-ET	AXIN BASE AXIOM BL Ø5 H2,5	OPAT411	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 15° - AG 1,5
AX152-27S2-ET	PARAFUSO AXIN BLK AXIOM BL H2	OPAT412	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 23° - AG 1,5
TFLEX-N-ET	FLEXIBASE TL N HC 3,5	OPAT41-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 7° - AG 1,5
TFLEX-R-ET	FLEXIBASE TL N HC 3,5	OPAT420	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 0° - AG 2,5
TFLEX-N-P-ET	FLEXIBASE TL N PLUR.	OPAT421	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 15° - AG 2,5
TFLEX-R-P-ET	FLEXIBASE TL R PLUR.	OPAT422	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 23° - AG 2,5

Limpeza manual	PROTOCOLO 3		
Limpeza automática	PROTOCOLO 7		
Referência	Designação	Referência	Designação
AX156-02B-ET	AXIN BASE AXIOM TL R	OPAT42-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 7° - AG 2,5
TS160-ET	PARAFUSO M1,6 AXIOM TL BLK	OPAT430	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 0° - AG 3,5
AX156-0X-S-ET	PARAFUSO AXIN M1,6 BLK AXIOMTL	OPAT431	Pilar estético de titânio Axiom® BL Ø4,0 - 15° - AG 3,5
TS160P-ET	PARAFUSO AXIOM TL BARRA BLK	OPAT432	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 23° - AG 3,5
AX156-01B-ET	AXIN BASE AXIOM TL N	OPAT43-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 7° - AG 3,5
AX152-27S1-ET	PARAFUSO AXIN BLK AXIOM BL H1	OPAT440	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 0° - AG 4,5
151-03-DT-MU	Transfer de impressão digital Axiom® BL Multi-Unit R - Ø4,8	OPAT441	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 15° - AG 4,5
151-04-DT-MUN	Transfer de impressão digital Axiom® BL Multi-Unit N - Ø4,0	OPAT442	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 23° - AG 4,5
156-01-DT	Transfer de impressão digital Axiom® TL N - Ø4,0 - unitário	OPAT44-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø4,0 - 7° - AG 4,5
156-01-DT-IL	Transfer de impressão digital de pilar Axiom® TL / inLink® N - Ø4,0 - Plural	OPAT500	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 0° - AG 0,75
156-02-DT	Transfer de impressão digital Axiom® TL R - Ø4,8 - unitário	OPAT501	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 15° - AG 0,75
152-27-DT	Transfer de impressão digital Axiom® BL - restauração unitária	OPAT502	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 23° - AG 0,75
156-02-DT-IL	Transfer de impressão digital de pilar Axiom® TL / inLink® R - Ø4,8 - Plural	OPAT50-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 7° - AG 0,75
MUNT100	Transfer de impressão de captação Multi-Unit Narrow N - Ø4,0	OPAT510	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 0° - AG 1,5
MUNT100-4	Transfer de impressão de captação Multi-Unit Narrow N - Ø4,0 (x4)	OPAT511	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 15° - AG 1,5
MUNT200	Transfer de impressão pop-in Multi-Unit Narrow N - Ø4,0	OPAT512	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 23° - AG 1,5
MUNT200-4	Transfer de impressão pop-in Multi-Unit Narrow N - Ø4,0 (x4)	OPAT51-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 7° - AG 1,5
MUT100	Transfer de impressão de captação Multi-Unit R - Ø4,8	OPAT520	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 0° - AG 2,5
MUT100-4	Transfer de impressão de captação Multi-Unit R - Ø4,8 (x4)	OPAT521	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 15° - AG 2,5
MUT200	Transfer de impressão pop-in Multi-Unit R - Ø4,8	OPAT522	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 7° - AG 3,5
MUT200-4	Transfer de impressão pop-in Multi-Unit R - Ø4,8 (x4)	OPAT52-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 7° - AG 2,5
OPPI100	Transfer de impressão pop-in Axiom® BL REG/PX - longo	OPAT530	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 0° - AG 3,5
OPPI100-4	Transfer de impressão pop-in Axiom® BL REG/PX - longo (x4)	OPAT531	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 15° - AG 3,5

Limpeza manual	PROTOCOLO 3		
Limpeza automática	PROTOCOLO 7		
Referência	Designação	Referência	Designação
OPPI100S	Transfer de impressão pop-in Axiom® BL REG/PX - curto	OPAT532	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 23° - AG 3,5
OPPI100S-4	Transfer de impressão pop-in Axiom® BL REG/PX - curto (x4)	OPAT53-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 7° - AG 3,5
OPPU100	Pilar de moldagem de captação pick-up Axiom® BL - curto	OPAT540	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 0° - AG 4,5
OPPU100-4	Pilar de moldagem de captação pick-up Axiom® BL - curto (x4)	OPAT541	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 15° - AG 4,5
OPPU100L	Pilar de moldagem de captação pick-up Axiom® BL - longo	OPAT542	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 23° - AG 4,5
OPPU100L-4	Pilar de moldagem de captação pick-up Axiom® BL - longo (x4)	OPAT54-7	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø5,0 - 7° - AG 4,5
OPPU101	Axiom® Parafuso curto de molde	OPAT610	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø6,0 - 0° - AG 1,5
OPPU102	Axiom® Parafuso pick-up comprido	OPAT611	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø6,0 - 15° - AG 1,5
OPPU102L	Axiom® parafuso pick-up XL	OPAT620	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø6,0 - 0° - AG 2,5
OPROFIL410	Anel de moldagem Ø4,0 AG 1,5 (x4)	OPAT621	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø6,0 - 15° - AG 2,5
OPROFIL420	Anel de moldagem Ø4,0 AG 2,5/1,5 (x4)	OPAT630	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø6,0 - 0° - AG 3,5
OPROFIL430	Anel de moldagem Ø4,0 AG 3,5 (x4)	OPAT631	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø6,0 - 15° - AG 3,5
OPROFIL510	Anel de moldagem Ø5,0 AG 1,5 (x4)	OPAT640	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø6,0 - 0° - AG 4,5
OPROFIL520	Anel de moldagem Ø5,0 AG 2,5/1,5 (x4)	OPAT641	Pilar estético em titânio Axiom® BL Ø6,0 - 15° - AG 4,5
OPROFIL530	Anel de moldagem Ø5,0 AG 3,5 (x4)	OPPC304	Tampa de proteção pilar standard em titânio Ø3,4 AC 4,0
OPTT100	Transfer de impressão de pilar standard Axiom® BL	OPPC306	Tampa de proteção pilar standard em titânio Ø3,4 AC 6,0
OPTT100-5	Transfer de impressão de pilar standard Axiom® BL (x5)	OPPC404	Tampa de proteção pilar standard em titânio Ø4,0 AC 4,0
OPPI028	Transfer de impressão pop-in Axiom® 2,8	OPPC406	Tampa de proteção pilar standard em titânio Ø4,0 AC 6,0
OPTT028	Axiom® 2,8 Transfer de impressão de pilar	OPPC504	Tampa de proteção pilar standard em titânio Ø5,0 AC 4,0
ILT100-N	Pilar de moldagem de captação inLink® N - Ø4,0 não indexado	OPPC506	Tampa de proteção pilar standard em titânio Ø5,0 AC 6,0
ILT100-N-4	Pilar de moldagem de captação inLink® N - Ø4,0 não indexado (x4)	OPPC604	Tampa de proteção pilar standard em titânio Ø6,0 AC 4,0
ILT100-R	Pilar de moldagem de captação inLink® R - Ø4,8 não indexado	OPPC606	Tampa de proteção pilar standard em titânio Ø6,0 AC 6,0
ILT100-R-4	Pilar de moldagem de captação inLink® R - Ø4,8 não indexado (x4)	OPTS160	Parafuso protético M1,6 BLACK

Limpeza manual	PROTOCOLO 3		
Limpeza automática	PROTOCOLO 7		
Referência	Designação	Referência	Designação
TT200-N	Transfer de impressão pop-in indexado Axiom® TL N - Ø4,0	OPPC028	Tampa de proteção Axiom® 2,8
TT200-R	Transfer de impressão pop-in indexado Axiom® TL R - Ø4,8	TS160	Parafuso M1,6 Axiom® TL BLACK
TT300-R	Transfer de impressão de captação pick-up indexado Axiom® TL R - Ø4,8	TAT400-N	Pilar estético de titânio Axiom® TL N Ø4,0 - 0°
TT300-N	Transfer de impressão de captação pick-up indexado Axiom® TL N - Ø4,0	TAT407-N	Pilar estético de titânio Axiom® TL N Ø4,0 - 7°
TT200L-R	Transfer de impressão pop-in indexado Axiom® TL R - Ø4,8 - longo	TAT415-N	Pilar estético de titânio Axiom® TL N Ø4,0 - 15°
TT200L-N	Transfer de impressão de captação pop-in indexado Axiom® TL N - Ø4,0 - longo	TAT423-N	Pilar estético de titânio Axiom® TL N Ø4,0 - 23°
ILT200-N	COIFA IMPR POP-IN INLINK N	TAT500-N	Pilar estético de titânio Axiom® TL N Ø5,0 - 0°
ILT200-N-4	Transfer de impressão pop-in não indexado InLink® N - Ø4,0 (x4)	TAT500-R	Pilar estético de titânio Axiom® TL R Ø5,0 - 0°
ILT200-R	COIFA IMPR POP-IN INLINK R	TAT507-N	Pilar estético de titânio Axiom® TL N Ø5,0 - 7°
ILT200-R-4	Transfer de impressão pop-in não indexado InLink® R - Ø4,8 (x4)	TAT507-R	Pilar estético de titânio Axiom® TL R Ø5,0 - 7°
OPFLEX413	FlexiBase® Axiom® BL Ø4 HC 3,5 H1,5	TAT515-N	Pilar estético de titânio Axiom® TL N Ø5,0 - 15°
OPFLEX423	FlexiBase® Axiom® BL Ø4 HC 3,5 H2,5	TAT515-R	Pilar estético de titânio Axiom® TL R Ø5,0 - 15°
OPFLEX513	FlexiBase® Axiom® BL Ø5 HC 3,5 H1,5	TAT523-N	Pilar estético de titânio Axiom® TL N Ø5,0 - 23°
OPFLEX523	FlexiBase® Axiom® BL Ø5 HC 3,5 H2,5	TAT523-R	Pilar estético de titânio Axiom® TL R Ø5,0 - 23°
OPFLEX533	FlexiBase® Axiom® BL Ø5 HC 3,5 H3,5	TAT600-R	Pilar estético de titânio Axiom® TL R Ø6,0 - 0°
OPFLEX433	FlexiBase® Axiom® BL Ø4 HC 3,5 H3,5	TAT615-R	Pilar estético de titânio Axiom® TL R Ø6,0 - 15°
TFLEX-N	FlexiBase® Axiom® TL N HC 3,5	OPFHD125	BROCA DE CENTRAGEM
TFLEX-R	FlexiBase® Axiom® TL N HC 3,5	OPFHG125	BROCA HELICOIDAL Ø1.25 ESQUERDA
TFLEX-R-P	Flexibase® Ti-base Axiom® TL R - Ø4,8 - plural	OPFHG075	BROCA HELICOIDAL Ø0,75 ESQUERDA
TFLEX-N-P	Flexibase® Ti-base Axiom® TL N - Ø4,0 - plural	OPBASE-C502-L	Ti-base Axiom® BL compatível com CEREC® - Ø5,0 - AG 2,5
OPFPSL20-5	Casquilho para pinos Ø2,0 (x5)	OPBASE-C501-L	Ti-base Axiom® BL compatível com CEREC® - Ø5,0 - AG 1,5
OPGS20-4	Casquilho guia Ø2,0 (x4)	OPBASE-C503-L	Ti-base Axiom® BL compatível com CEREC® - Ø5,0 - AG 3,5
OPFPSL20-3	Casquilho para pinos Ø2,0 (x3)	AXIN152-27-S2	Parafuso definitivo M1,6 AxIN® Axiom® BL BLACK H2
OPGS20	Casquilho guia Ø2,0	AXIN152-27-S1	Parafuso definitivo AxIN® M1,6 Axiom® BL BLACK H1

Limpeza manual	PROTOCOLO 3		
Limpeza automática	PROTOCOLO 7		
Referência	Designação	Referência	Designação
OPGS20-10	Casquilho guia Ø2,0 (x10)	AXIN-PCC-48	Proteção com grampo AxIN® Ø4,8
OPFPSL20-ET	CASQUILHOS PARA PINOS Ø2,0	AXIN-PCC-40	Proteção com grampo AxIN® Ø4,0
OPGS20-ET	CASQUILHO GUIA Ø2,0	AXIN-PCC-50	Proteção com grampo AxIN® Ø5,0
OPGS36-10	Casquilho guia Ø3,6 (x10)	MUNFLEX	Flexibase® Ti-base Axiom® BL MU N - Ø4,0
OPGS42	Casquilho guia Ø4,2	MUFLEX	Flexibase® Ti-base Axiom® BL MU R - Ø4,8
OPGS36	Casquilho guia Ø3,6	AXIN152-27B41	AxIN® Base Axiom® BL Ø4,0 - A 1,5
OPGS36-4	Casquilho guia Ø3,6 (x4)	AXIN152-27B42	AxIN® Base Axiom® BL Ø4,0 - A 2,5
OPGS50	Casquilho guia Ø5,0	AXIN152-27B51	AxIN® Base Axiom® BL Ø5,0 - A 1,5
OPGS42-4	Casquilho guia Ø4,2 (x4)	AXIN152-27B52	AxIN® Base Axiom® BL Ø5,0 - A 2,5
OPGS42-10	Casquilho guia Ø4,2 (x10)	AXIN156-01-B	AxIN® Base Axiom® TL N - Ø4,0
OPGS36-ET	CASQUILHO GUIA Ø3,6 ETKON	AXIN156-0X-S	Parafuso AxIN® M1,6 BLK Axiom® TL
OPGS50-10	Casquilho guia Ø5,0 (x10)	TBASEC-N-S	Ti-base Axiom® TL N Ø4,0 compatível com CEREC® - Ø4,0 - Bloco tamanho S
OPGS42-ET	CASQUILHO GUIA Ø4,2 ETKON	TBASEC-R-L	Ti-base Axiom® TL R - Ø4,8 compatível com CEREC® - Ø5,0 - Bloco tamanho L
OPGS50-ET	CASQUILHO GUIA Ø5,0 ETKON	AXIN156-02-B	AxIN® Base Axiom® TL R - Ø4,8
OPGS50-4	Casquilho guia Ø5,0 (x4)	MUFLEX-5	X-Base® MU Ø4,8 Ac 5,0 mm
MU141	PARAFUSO M1,4 MU TI	MUFLEX-5-AA	X-Base® MU Ø4,8 Ac 5,0 mm AA
OPLA010	PILAR LOCATOR® Ø4,0 H1	MUNFLEX-4	X-Base® MUN Ø4,0 Ac 4,0 mm
OPLA020	PILAR LOCATOR® Ø4,0 H2	MUNFLEX-4-AA	X-Base® MUN Ø4,0 Ac 4,0 mm AA
OPLA030	PILAR LOCATOR® Ø4,0 H3	OPFLEX414	X-Base® BL Ø4,0 AG 1,5 mm AC 4,0 mm indexado
OPLA040	PILAR LOCATOR® Ø4,0 H4	OPFLEX414-AA	X-Base® BL Ø4,0 Ag 1,5 mm Ac 4,0 mm AA
OPLA050	PILAR LOCATOR® Ø4,0 H5	OPFLEX414-AAU	X-Base® BL Ø4,0 Ag 1,5 mm Ac 4,0 mm AA - U versão
OPLA100	FÊMEA LOCATOR®	OPFLEX416	X-Base® BL Ø4,0 AG 1,5 mm AC 6,0 mm indexado
OPLA200	4 INSERÇÕES LOCATOR® STD	OPFLEX416-AA	X-Base® BL Ø4,0 Ag 1,5 mm Ac 6,0 mm AA
OPLA300	4 INSERÇÕES LOCATOR® LIGHT	OPFLEX416-AAU	X-Base® BL Ø4,0 Ag 1,5 mm Ac 6,0 mm AA - U versão
OPLA400	4 INSERÇ. LOCATOR® EXTRA-LIGHT	OPFLEX424	X-Base® BL Ø4,0 AG 2,5 mm AC 4,0 mm indexado
OPLA500	4 COIFAS IMPRESSÃO LOCATOR®	OPFLEX424-AA	X-Base® BL Ø4,0 Ag 2,5 mm Ac 4,0 mm AA
OPLA700	FÊMEA LOCATOR® GAMA ALARGADA	OPFLEX424-AAU	X-Base® BL Ø4,0 Ag 2,5 mm Ac 4,0 mm AA - U versão
OPLA710	4 BORRACHA LOCATOR® CINZENTO	OPFLEX426	X-Base® BL Ø4,0 AG 2,5 mm AC 6,0 mm indexado
OPLA720	4 BORRACHA LOCATOR® VERMELHO	OPFLEX426-AA	X-Base® BL Ø4,0 Ag 2,5 mm Ac 6,0 mm AA

Limpeza manual	PROTOCOLO 3		
Limpeza automática	PROTOCOLO 7		
Referência	Designação	Referência	Designação
OPLA730	4 BORRACHA LOCATOR® LARANJA	OPFLEX426-AAU	X-Base® BL Ø4,0 Ag 2,5 mm Ac 6,0 mm AA - U versão
OPLA740	4 BORRACHA LOCATOR® VERDE	OPFLEX434	X-Base® BL Ø4,0 AG 3,5 mm AC 4,0 mm indexado
OPAC141	PARAFUSO PILAR CÓN. ANG. M1,4	OPFLEX434-AA	X-Base® BL Ø4,0 Ag 3,5 mm Ac 4,0 mm AA
OPAC200	COIFA PROVISÓRIA ANG. Ø4,8	OPFLEX434-AAU	X-Base® BL Ø4,0 Ag 3,5 mm Ac 4,0 mm AA - U versão
OPAC500	COIFA IMPRESSÃO PICK-UP	OPFLEX436	X-Base® BL Ø4,0 AG 3,5 mm AC 6,0 mm indexado
OPAC500-4	4 COIFAS IMPRESSÃO PICK-UP	OPFLEX436-AA	X-Base® BL Ø4,0 Ag 3,5 mm Ac 6,0 mm AA
OPAC501	PARAFUSO PILAR PICK-UP CURTO	OPFLEX436-AAU	X-Base® BL Ø4,0 Ag 3,5 mm Ac 6,0 mm AA - U versão
OPAC502	PARAFUSO PILAR PICK-UP COMP.	OPFLEX514	X-Base® BL Ø5,0 AG 1,5 mm AC 4,0 mm indexado
OPAC600	COIFA IMPRESSÃO POP-IN	OPFLEX514-AA	X-Base® BL Ø5,0 Ag 1,5 mm Ac 4,0 mm AA
OPAC600-4	4 COIFAS IMPRESSÃO POP-IN	OPFLEX514-AAU	X-Base® BL Ø5,0 Ag 1,5 mm Ac 4,0 mm AA - U versão
OPSC200	COIFA PROVISÓRIA Ø4,0	OPFLEX516	X-Base® BL Ø5,0 AG 1,5 mm AC 6,0 mm indexado
OPSC500	COIFA IMPRESSÃO PICK-UP	OPFLEX516-AA	X-Base® BL Ø4,0 Ag 3,5 mm Ac 6,0 mm AA
OPSC500-4	4 COIFAS IMPRESSÃO PICK-UP	OPFLEX516-AAU	X-Base® BL Ø5,0 Ag 1,5 mm Ac 6,0 mm AA - U versão
OPSC600	COIFA IMPRESSÃO POP-IN	OPFLEX524	X-Base® BL Ø5,0 AG 2,5 mm AC 4,0 mm indexado
OPSC600-4	4 COIFAS IMPRESSÃO POP-IN	OPFLEX524-AA	X-Base® BL Ø5,0 Ag 2,5 mm Ac 4,0 mm AA
MU140	Parafuso M1,4 Multi-Unit BLACK	OPFLEX524-AAU	X-Base® BL Ø5,0 Ag 2,5 mm Ac 4,0 mm AA - U versão
MUAA140	Parafuso protético M1,4 AA	OPFLEX526	X-Base® BL Ø5,0 AG 2,5 mm AC 6,0 mm indexado
MUC400	Coping calcinável com base CoCr Multi-Unit R - Ø4,8	OPFLEX526-AA	X-Base® BL Ø5,0 Ag 2,5 mm Ac 6,0 mm AA
MUNC400	Coping calcinável com base CoCr Multi-Unit N - Ø4,0	OPFLEX526-AAU	X-Base® BL Ø5,0 Ag 2,5 mm Ac 6,0 mm AA - U versão
MUNPAC100	Anel Multi-Unit PACIFIC N - Ø4,0	OPFLEX534	X-Base® BL Ø5,0 AG 3,5 mm AC 4,0 mm indexado
OPMU160	Parafuso definitivo Multi-Unit M1,6 BLACK	OPFLEX534-AA	X-Base® BL Ø5,0 Ag 3,5 mm Ac 4,0 mm AA
TS160P	Parafuso definitivo Axiom® TL plural, preto	OPFLEX534-AAU	X-Base® BL Ø5,0 Ag 3,5 mm Ac 4,0 mm AA - U versão
ILL100	STANDARD LOCK INLINK	OPFLEX536	X-Base® BL Ø5,0 AG 3,5 mm AC 6,0 mm indexado

Limpeza manual	PROTOCOLO 3		
Limpeza automática	PROTOCOLO 7		
Referência	Designação	Referência	Designação
ILL100-4	STANDARD LOCK INLINK (x4)	OPFLEX536-AA	X-Base® BL Ø5,0 AG 3,5 mm AC 6,0 mm AA
ILL100T-4	Bloqueio standard de prova inLink® (x4)	OPFLEX536-AAU	X-Base® BL Ø5,0 Ag 3,5 mm Ac 6,0 mm AA - U versão
ILL200	STANDARD LOCK IL/ TRANSPORTADOR	OPFLEX614	X-Base® BL Ø6,0 AG 1,5 mm AC 4,0 mm indexado
ILLG100	GUIDING LOCK INLINK	OPFLEX614-AA	X-Base® BL Ø6,0 Ag 1,5 mm Ac 4,0 mm AA
ILLG100-2	GUIDING LOCK INLINK (x2)	OPFLEX614-AAU	X-Base® BL Ø6,0 Ag 1,5 mm Ac 4,0 mm AA - U versão
ILLG100T-4	Bloqueio guia de prova inLink® (x4)	OPFLEX616	X-Base® BL Ø6,0 AG 1,5 mm AC 6,0 mm indexado
ILLG200	GUIDING LOCK IL /TRANSPORTADOR	OPFLEX616-AA	X-Base® BL Ø6,0 AG 1,5 mm AC 6,0 mm AA
ILLG210	Bloqueio inLink® orientação BLACK transportador	OPFLEX616-AAU	X-Base® BL Ø6,0 Ag 1,5 mm Ac 6,0 mm AA - U versão
ILL110	Bloqueio inLink® standard BLACK	OPFLEX624	X-Base® BL Ø6,0 AG 2,5 mm AC 4,0 mm indexado
ILL210	Bloqueio inLink® standard BLACK transportador	OPFLEX624-AA	X-Base® BL Ø6,0 Ag 2,5 mm Ac 4,0 mm AA
ILLG110	Bloqueio inLink® orientação BLACK	OPFLEX624-AAU	X-Base® BL Ø6,0 Ag 2,5 mm Ac 4,0 mm AA - U versão
ILLG110-2	Bloqueio inLink® orientação BLACK (x2)	OPFLEX626	X-Base® BL Ø6,0 AG 2,5 mm AC 6,0 mm indexado
ILL110-4	Bloqueio inLink® standard BLACK (x4)	OPFLEX626-AA	X-Base® BL Ø6,0 Ag 2,5 mm Ac 6,0 mm AA
TS161P	Parafuso definitivo M.1,6 Axiom® TL plural acesso angular titânio	OPFLEX626-AAU	X-Base® BL Ø6,0 AG 2,5 mm AC 6,0 mm AA - U versão
TSAA160P	Parafuso definitivo M.1,6 Axiom® TL plural acesso angular BLACK	OPFLEX634	X-Base® BL Ø6,0 AG 3,5 mm AC 4,0 mm indexado
TSAA161P	Parafuso definitivo M.1,6 Axiom® TL plural AA titânio	OPFLEX634-AA	X-Base® BL Ø6,0 Ag 3,5 mm Ac 4,0 mm AA
AXDA015	Pilar de bola - Axiom® BL	OPFLEX634-AAU	X-Base® BL Ø6,0 Ag 2,5 mm Ac 4,0 mm AA - U versão
AXDA025	Pilar de bola - Axiom® BL	OPFLEX636	X-Base® BL Ø6,0 AG 3,5 mm AC 6,0 mm indexado
AXDA035	Pilar de bola - Axiom® BL	OPFLEX636-AA	X-Base® BL Ø6,0 Ag 3,5 mm Ac 6,0 mm AA
AXDA045	Pilar de bola - Axiom® BL	OPFLEX636-AAU	X-Base® BL Ø6,0 Ag 3,5 mm Ac 6,0 mm AA - U versão
OPNOVA035	Pilar Novaloc® - Axiom® BL	OPFLEXS1-AA	X-Base® BL parafuso BLACK Ag 1,5 mm AA
OPNOVA015	Pilar Novaloc® - Axiom® BL	OPFLEXS2-AA	X-Base® BL parafuso BLACK Ag 2,5 mm AA
OPNOVA025	Pilar Novaloc® - Axiom® BL	OPFLEXS3-AA	X-Base® BL parafuso BLACK Ag 3,5 mm AA
OPNOVA045	Pilar Novaloc® - Axiom® BL	TFLEX-N4-P	X-Base® TL N PLURAL Ac 4,0 mm

Limpeza manual	PROTOCOLO 3		
Limpeza automática	PROTOCOLO 7		
Referência	Designação	Referência	Designação
OPNOVA055	Pilar Novaloc® - Axiom® BL	TFLEX-N4-PAA	X-Base® TL N PLURAL Ac 4,0 mm AA
TOPNOVA030-N	Pilar Novaloc® - Axiom® TL	TFLEX-N4-S	X-Base® TL N AC 4,0 mm indexado
TOPNOVA000-N	Pilar Novaloc® - Axiom® TL	TFLEX-N4-SAA	X-Base® TL N Ac 4,0 mm indexado AA
TOPNOVA010-N	Pilar Novaloc® - Axiom® TL	TFLEX-N4-SAAU	X-Base® TL N Ac 4,0 mm indexado AA - U versão
TOPNOVA020-N	Pilar Novaloc® - Axiom® TL	TFLEX-N5-P	X-Base® TL N PLURAL Ac 5,0 mm
TOPNOVA040-N	Pilar Novaloc® - Axiom® TL	TFLEX-N6-S	X-Base® TL N AC 6,0 mm indexado
TOPNOVA000-R	Pilar Novaloc® - Axiom® TL	TFLEX-N6-SAA	X-Base® TL N Ac 6,0 mm AA
TOPNOVA010-R	Pilar Novaloc® - Axiom® TL	TFLEX-N6-SAAU	X-Base® TL N Ac 6,0 mm AA - U versão
TOPNOVA020-R	Pilar Novaloc® - Axiom® TL	TFLEX-R4-P	X-Base® TL R PLURAL Ac 4,0 mm
TOPNOVA040-R	PILAR NOVALOC AXIOM TL R H4,0	TFLEX-R4-PAA	X-Base® TL R PLURAL Ac 4,0 mm AA
TOPNOVA030-R	Pilar Novaloc® - Axiom® TL	TFLEX-R4-S	X-Base® TL R AC 4,0 mm indexado
TAXDA000-N	Pilar de bola - Axiom® TL	TFLEX-R4-SAA	X-Base® TL R Ac 4,0 mm indexado AA
TAXDA010-N	Pilier boule H1,0 Axiom TL N	TFLEX-R4-SAAU	X-Base® TL R Ac 4,0 mm AA - U versão
TAXDA030-N	Pilar de bola - Axiom® TL	TFLEX-R5-P	X-Base® TL R PLURAL Ac 5,0 mm
TAXDA020-N	Pilar de bola - Axiom® TL	TFLEX-R6-S	X-Base® TL R AC 6,0 mm indexado
TAXDA000-R	Pilar de bola - Axiom® TL	TFLEX-R6-SAA	X-Base® TL R Ac 6,0 mm AA
TAXDA010-R	Pilar de bola - Axiom® TL	TFLEX-R6-SAAU	X-Base® TL R Ac 6,0 mm AA - U versão
TAXDA020-R	Pilar de bola - Axiom® TL	TFLEXS-AA	X-Base® TL parafuso BLACK AA
TAXDA030-R	Pilar de bola - Axiom® TL	TFLEXS-PAA	X-Base® TL parafuso BLACK AA
MUAA141	Parafuso protético M1,4 AA titânio	HECO001	PILAR CÓNICO HE Ø4,1 ALT. 1,0
MUC100	Multi-Unit Ø4,8 Coping provisório em titânio	HECO002	PILAR CÓNICO HE Ø4,1 ALT. 3,0
MUC200	Multi-Unit Ø4,8 Coping provisório em PEEK	HECO003	PILAR CÓNICO HE Ø4,1 ALT. 5,0
MUNC100	Multi-Unit Ø4,0 Coping provisório em PEEK	HECO009	PILAR CÓNICO HE Ø5,0 ALT. 1,0
MUNC200	Multi-Unit Ø4,0 Coping provisório em titânio	HECO010	PILAR CÓNICO HE Ø5,0 ALT. 3,0
OPTS161	Parafuso protético M1,6 titânio	HECO011	PILAR CÓNICO HE Ø5,0 ALT. 5,0
AXIN-C-40-10	Coifa Provisória AxIN® Ø4,0 10°	HEDA001	PILAR DALBO HE Ø4,1 ALT. 2,0
AXIN-C-48-10	Coifa Provisória AxIN® Ø4,8 10°	HEDA002	PILAR DALBO HE Ø4,1 ALT. 4,0
AXIN-C-40-15	Coifa Provisória AxIN® Ø4,0 15°	HEDA003	PILAR DALBO HE Ø5,0 ALT. 2,0
AXIN-C-50-15	Coifa Provisória AxIN® Ø5,0 15°	HEDA004	PILAR DALBO HE Ø5,0 ALT. 4,0
AXIN-C-50-25	Coifa Provisória AxIN® Ø5,0 25°	HEPE001	PILAR PEEK HE Ø4,1
AXIN-C-40-25	Coifa Provisória AxIN® Ø4,0 25°	HEPE002	PILAR PEEK HE Ø5,0
AXIN-C-48-15	Coifa Provisória AxIN® Ø4,8 15°	HETI008	PILAR TIT. HE Ø4,1 00° ALT 1,0
AXIN-C-48-25	Coifa Provisória AxIN® Ø4,8 25°	HETI009	PILAR TIT. HE Ø4,1 00° ALT 2,0
AXIN-C-50-10	Coifa Provisória AxIN® Ø5,0 10°	HETI010	PILAR TIT. HE Ø4,1 00° ALT 3,0
MUNCAA110	Coping provisório de titânio MU N - Ø4,0 - AA - 10°	HETI011	PILAR TIT. HE Ø5,0 00° ALT 2,0

Limpeza manual	PROTOCOLO 3		
Limpeza automática	PROTOCOLO 7		
Referência	Designação	Referência	Designação
MUNCAA100	Coping provisório de titânio MU N - Ø4,0 - AA - 0°	HETI012	PILAR TIT. HE Ø4,1 15° ALT 1,0
MUCAA125	Coping provisório de titânio MU R - Ø4,8 - AA - 25°	HETI013	PILAR TIT. HE Ø4,1 15° ALT 2,0
MUCAA120	COIFA PROV. TI MU Ø4,8 AA 20°	HETI014	PILAR TIT. HE Ø4,1 25° ALT 1,0
MUCAA115	Coping provisório de titânio MU R - Ø4,8 - AA - 15°	HETI015	PILAR TIT. HE Ø4,1 25° ALT 2,0
MUCAA110	Coping provisório de titânio MU R - Ø4,8 - AA - 10°	HETI016	PILAR TIT. HE Ø5,0 15° ALT 2,0
MUCAA100	Coping provisório de titânio MU R - Ø4,8 - AA - 0°	HETI017	PILAR TIT. HE Ø5,0 25° ALT 2,0
MU140Z	Parafuso definitivo titânio M1,4 Multi-Unit	HETR001	COIFA IMPRES. HE Ø4,1 PICK CÓN
MUNCAA125	Coping provisório de titânio MU N - Ø4,0 - AA - 25°	HETR002	COIFA IMPRES. HE Ø4,1 PICK REC
MUNCAA120	COIFA PROV. TI MUN Ø4,0 AA 20°	HETR003	COIFA IMPRES. HE Ø5,0 PICK CÓN
MUNCAA115	Coping provisório de titânio MU N - Ø4,0 - AA - 15°	HETR004	COIFA IMPRES. HE Ø4,1 REPO CÓN
ILC100-N	inLink® N - Pilar provisório 0° standard	HETR005	COIFA IMPRES. HE Ø4,1 REPO REC
ILC100-R	inLink® R - Pilar provisório 0° standard	HETR006	COIFA IMPRES. HE Ø5,0 REPO CÓN
ILC100T-N	inLink® N - Pilar provisório de prova 0° standard	HETR007	COIFA IMPRES. PILAR CÓN. HE Ø4
ILC100T-R	inLink® R - Pilar provisório de prova 0° standard	HETR008	COIFA IMPRES. PILAR CÓN. HE Ø5
ILC125-N	inLink® N - Pilar provisório 25° standard	HETR009	COIFA IMPRES. HE Ø5,0 PICK REC
ILC125-R	inLink® R - Pilar provisório 25° standard	HETR010	COIFA IMPRES. HE Ø5,0 REPO REC
ILC125T-N	inLink® N - Pilar provisório de prova 25° standard	OICO007	PILAR PROVISÓRIO OI/HE Ø4
ILC125T-R	inLink® R - Pilar provisório de prova 25° standard	OICO023	PILAR PROVISÓRIO OI/HE Ø5,0
ILGC100-N	inLink® N - Pilar provisório 0° guia	OITI001	PARAFUSO HEXA. PROTÉT M2 TIT.
ILGC100-R	inLink® R - Pilar provisório 0° guia	OITI002	PARAFUSO HEXA. PROTÉT M1,4 TIT
ILGC125-N	inLink® N - Pilar provisório 25° guia	OITR001	COPING DE MOLDAGEM COM CAPTAÇÃO OI Ø3,5 CÓNICO
ILGC125-R	inLink® R - Pilar provisório 25° guia	OITR002	COPING DE MOLDAGEM COM CAPTAÇÃO OI Ø3,5 RETO
TS161	Parafuso provisório para pilar Axiom® TL M1,6	OITR003	COPING DE MOLDAGEM COM CAPTAÇÃO OI Ø4,0 CÓNICO
TC100-N	Axiom® TL N Pilar provisório - indexado	OITR004	COPING DE MOLDAGEM COM CAPTAÇÃO OI Ø4,0 RETO
TC100-R	Axiom® TL R Pilar provisório - indexado	OITR005	COPING DE MOLDAGEM COM CAPTAÇÃO OI Ø5,0 CÓNICO
ILC110-R	inLink® R - Ø4,8 provisório - pilar - 10° - standard	OITR018	COPING DE MOLDAGEM PARA PILAR CÓNICO OI Ø3,5
ILC115-R	inLink® R - Ø4,8 provisório - pilar - 15° - standard	OITR019	COPING DE MOLDAGEM PARA PILAR CÓNICO OI Ø4

Limpeza manual	PROTOCOLO 3		
Limpeza automática	PROTOCOLO 7		
Referência	Designação	Referência	Designação
ILC115-N	inLink ® N - Ø4,0 provisório - pilar - 15° - standard	OITR021	COPING DE MOLDAGEM PARA PILAR CÔNICO OI Ø5
ILC110-N	inLink ® N - Ø4,0 provisório - pilar - 10° - standard	OITR022	COPING DE MOLDAGEM COM CAPTAÇÃO OI Ø5,0 RETO

Limpeza manual	PROTOCOLO 4
Limpeza automática	PROTOCOLO 6
Referência	Designação
INCCD	Chave de catraca dinamométrica
INCC	Chave de catraca reversível
INCCDC	Chave dinamométrica
INKITOPDS	Kit stops Axiom® Multi Level®
INKITOPDSV	Axiom® Multi Level® Caixa de stop de broca
OPOP028	Axiom® 2,8 Chave de garra
INKITOPDSL	Kit de stop Axiom® Multi Level® : 42 stop de broca incluindo grandes diâmetros
INKITOPDSL	Kit de stop Axiom® Multi Level® incluindo grandes diâmetros - vazio
11565	Suporte
11750M	Micromotor
11750MLED	MICROMOTOR LED
11795-X	Tampa de esterilização de micromotor para motor Implanteo®

Limpeza manual	PROTOCOLO 4
Limpeza automática	PROTOCOLO 8
Referência	Designação
MODGS36	Kit de instrumentos de cirurgia guiada completa INTEGRAL - Ø3,6 mm - completo
MODGS42	Kit de instrumentos de cirurgia guiada completa INTEGRAL - Ø4,2 mm - completo
MODGS42V	Kit de instrumentos de cirurgia guiada completa INTEGRAL - Ø4,2 mm - vazio
MODGS50V	Kit de instrumentos de cirurgia guiada completa INTEGRAL - Ø5,0 mm - vazio
MODGS50	Kit de instrumentos de cirurgia guiada completa INTEGRAL - Ø5,0 mm - completo
MODGS3642V	Kit de instrumentos de cirurgia guiada completa INTEGRAL - Ø3,6 - Ø4,2 mm - vazio
MODGS36V	Kit de instrumentos de cirurgia guiada completa INTEGRAL - Ø3,6 mm - vazio
MODGS3642	Kit de instrumentos de cirurgia guiada completa INTEGRAL - Ø3,6 - Ø4,2 mm - completo

 **Anthogyr**
2 237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches - França
Tel. +33 (0)4 50 58 02 37
www.anthogyr.com

