

CE 0459

Anthogyr
2 237, Av. André Lasquin
74700 Sallanches - France
Phone : +33(0)4 50 58 02 37
Fax : +33(0)4 50 93 78 60
www.anthogyr.com
Email : sales@anthogyr.com
Edition : 2016-03
REF. 0630PLA_NOT_UK



Медичне обладнання відповідає вимогам директиви 93/42/EEC.



Увага! Ознайомтесь із супровідними інструкціями; небезпечно.



Ознайомтесь з умовами використання.



Не використовувати повторно.



Нестерильно.



Стерилізувати в автоклаві без упаковки за вказаної температури.



Артикул.



Номер партії.



Не використовуйте, якщо упаковку пошкоджено.



Зберігати в сухому місці за вологості 30 % – 70 %.



Зберігати в темному місці.



Виробник



Дата виготовлення.



Федеральні закони США дозволяють продаж цього товару лише сертифікованим стоматологам.



Відповідає нормам і стандартам РФ.

Система фіксації LOCATOR®

КОМПЛЕКТ

спеціальні кріплення LOCATOR®, деталі для реставрації, компоненти й інструменти для стоматологічної лабораторії.

ВАЖЛИВО. Цей документ містить останню версію інструкцій із використання.

Прочитайте та збережіть цей документ.

ОПИС

Універсальний шарнір, гнучке кріплення для зубних імплантатів Axiom® REG або Axiom® PX.

ПОКАЗАННЯ

Система фіксації LOCATOR® призначена для використання зі знімними зубними протезами, які цілком або частково утримуються на імплантатах Axiom® REG або Axiom® PX на нижній чи верхній щелепі.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не підходить для використання, якщо потрібне жорстке з'єднання. Не рекомендується використовувати з одним імплантатом із відхиленням від вертикалі більше 20 градусів.

УВАГА!



Федеральні закони США дозволяють продаж цього пристрою тільки ліцензованим стоматологам.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Системи фіксації LOCATOR® не перевіряли на безпечність і сумісність в умовах магнітного резонансу. Системи фіксації LOCATOR® не перевіряли здатність до нагріву чи зміщення в умовах магнітного резонансу.

ОДНОРАЗОВІ ПРИСТРОЇ

Системи фіксації LOCATOR® призначені для одноразового використання. Одноразові пристрої не можна повторно використовувати й повторно стерилізувати (існує ризик зараження й пошкодження робочих поверхонь).

У разі повторного використання компанія Anthogyr не гарантує функціональність і безпечність продукту. Компанія Anthogyr не несе жодної відповідальності за компонент і, повторно стерилізовані користувачем.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ



Усі компоненти й інструменти постачаються **НЕСТЕРИЛЬНИМИ**. Титанові абатменти й інструменти можна стерилізувати в автоклаві або сухим гарячим повітрям із дотриманням указаних нижче параметрів.

1. Стерилізуйте в автоклаві за температурою 121 °C (250 °F) (15–20 фунтів на кв. дюйм (103,4–137,9 кПа) на рівні моря) протягом мінімум 20 хвилин.

2. Стерилізуйте сухим гарячим повітрям за температури 170 °C (338 °F) протягом мінімум 2 годин.

Нейлонові патричні частини можна стерилізувати/дезинфікувати за допомогою хімічних стерилізуючих розчинів. Щоб стерилізувати/дезинфікувати нейлонові патричні частини (усі мікроорганізми, включаючи бактерії Clostridium sporogenes і спори бактерій Bacillus subtilis має бути видалено), їх потрібно занурити в стерилізуючий розчин мінімум на 3 години за кімнатної температури.

ПРОЦЕДУРИ ПРОТЕЗУВАННЯ ТА МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

За допомогою каліброваного динамометричного ключа закрутіть абатмент Locator до 25 Н*см.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Застосування значень моменту сили, вищих за рекомендовані, може спричинити розламування абатмента LOCATOR® та/або імплантату.

Методичні посібники до систем фіксації LOCATOR® можна отримати від виробника або представника з продажу. Ці документи також доступні в інтернеті за посиланням www.zestanchors.com.

Для безпечного вживлення імплантатів Axiom® REG та Axiom® PX недостатньо керуватися тільки інструкціями. Обов'язково потрібно дотримуватися інструкцій у посібнику з проведення хірургічних процедур із використанням імплантатів Axiom® REG та Axiom® PX. Цей документ входить у комплект кожного хірургічного набору. Він також доступний для ознайомлення на сайті www.anthogyr.com або його можна замовити в компанії Anthogyr, звернувшись за наданими вище контактами.